

## Kontaktní kojící kloboučky



### Použití:

- V případě plochých nebo vpáčených bradavek matky.
- Ochrana poraněných a citlivých bradavek během kojení.
- Pomůcka při kojení předčasně nedonošených dětí, klobouček vytváří tlak na bradavku, zvyšuje průtok MM.

Tvar kloboučku umožňuje zachovat miminku kontakt s přirozenou vůní matčina prsu. Kojící klobouček je vyroben z velmi jemného silikonu, je šetrný k pokožce a má neutrální vůni.

Použití kloboučku konzultujte s lékařem či laktační poradkyní. Kloboučky jsou určeny pro dočasné či krátkodobé použití.

### Návod:

- Před použitím si důkladně umyjte ruce.
- Opatrně omyjte prs teplou vodou a zlehka osušte. (nepoužívejte mýdlo nebo prostředky obsahující alkohol, které pokožku vysušují a způsobují popraskání bradavek)
- na okraje kloboučku naneste vodu nebo PureLan™100 kvůli lepší přilnavosti kloboučku k pokožce.
- Vytlačte špičku kloboučku téměř naruby a uchopte pevně okraje kloboučku. Nasaďte klobouček na střed bradavky. Přetahujte okraje kloboučku tak dlouho, dokud klobouček pohodlně nepřilne.
- Vykrojená část kloboučku je prostor určený pro nos miminka, aby cítilo teplo a vůni matčiny pokožky.

### Čištění a sterilizace:

Před prvním použitím kloboučky sterilizujte. Po každém použití omyjte horkou jarovou vodou, poté proudem čisté vody, 1x denně sterilizujte. Přidáním kávové lžičky kyseliny citrónové předejdete usazování vodního kamene.

Po vyčištění, pokud nejsou kloboučky použity, vložte do ochranného plastového pouzdra. (Ochranné pouzdro lze rovněž sterilizovat)

### Velikost:

- Small (S) 16 mm
- Medium (M) 20 mm
- Large (L) 24 mm

### Výhradní zástupce a servisní středisko:



Více než jen prodej ...

### DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a

612 48 Brno

Tel.: 541 321 095

Fax: 541 321 096

<http://www.dnformed.cz> ([www.medela.cz](http://www.medela.cz))

email: [medela@dnformed.cz](mailto:medela@dnformed.cz)