



PRODUKTOVÝ KATALOG

Pomůcky ke kojení



Společnost Medela AG byla založena v roce 1961 Olle Larssonem. Jeho syn **Michael Larsson** je předsedou představenstva od roku 2001. **Thomas Golücke** je výkonným ředitelem společnosti od roku 2024.

...jsme zde, abychom Vám pomohli

Představení společnosti Medela AG

Zakladatelem švýcarské společnosti Medela AG byl Olle Larsson. Při jejím vzniku v roce 1961 se jednalo o malou rodinnou firmu. V roce 1965 byla společnost transformována na akciovou společnost se zaměřením na výzkum, vývoj a výrobu zdravotnických odsávacích systémů – chirurgických odsávaček tělních tekutin používaných ve zdravotnických zařízeních. Následně se její působnost rozšířila i o odsávací systémy a pomůcky pro kojící matky. Postupem času se společnost vypracovala na globálního výrobce technologicky vyspělých produktů daného typu. Svoji působnost na světovém trhu posílila zakládáním vlastních dceřiných společností, jejichž počet se každým rokem zvyšuje. V současné době jich je po celém světě celkem 90. Klíčovým aspektem úspěchu v minulosti i v současnosti je především zaměření se na výzkum odsávacích systémů lékařské technologie. Velký důraz je kladen na pravidelnou komunikaci se svými autorizovanými distributory, kteří jsou spojovacím článkem mezi uživateli a výrobcem. Výrobce se snaží pružně reagovat na podněty konečných uživatelů v rámci zkvalitnění jak produktů, tak poskytovaných služeb. Nezbytnou součástí úspěchu je i neustálé sledování trendů designů, obalové techniky a marketingových materiálů. Výsledkem práce designerů je nezbytné spojení funkčnosti a praktičnosti s krásou. Odměnou za tuto velmi důležitou činnost je již několik mezinárodních ocenění za design, které společnost Medela AG obdržela.

Základní rysy filosofie Medela AG

Společnost klade velký důraz především na výzkum, kvalitu svých produktů a jedinečnost jejich vlastností. Do svých řad přijímá pouze kvalifikované pracovníky, kteří neustále procházejí dalším vzděláváním. Medela AG klade důraz na kvalitní švýcarskou výrobu. Na trh zavádí výrobky, které jsou úspěšné nejen díky vynikající technické stránce, ale i díky atraktivnímu modernímu designu. Dbá na kompletní servis a péči o zákazníky.

Výrobky pro podporu kojení

Společnost Medela AG svými výrobky pro péči o matku a dítě oslovuje velmi specifickou skupinu zákazníků – těhotné ženy a maminky po porodu. Jejím cílem není dosažení maximálního zisku za cenu výroby nekvalitních výrobků, ale snaha kvalitními produkty zpříjemnit ženám nejkrásnější období jejich života – mateřství. Proto se snaží neustálým výzkumem, ve spolupráci s předními vědeckými odborníky a zdravotnickým personálem, vyvíjet nové technologie, které jsou v souladu s přírodou.

Kojení je dar

Mateřské mléko je nenahraditelné, neboť obsahuje všechny potřebné protilátky, živiny a vitamíny. Je nejlevnějším zdrojem výživy novorozence, je k dispozici v potřebné teplotě a množství kdekoliv a kdykoliv. V průběhu kojení se vytváří silné mateřské pouto mezi maminkou a dítětem.

Přirozená podpora kojení

Většina maminek je schopna své dítě po porodu kojit. Ale bohužel mohou nastat situace, kdy kojení není možné, např. předčasně narozené dítě. Medela se rozhodla vyrábět pomůcky, které budou podporovat kojení, budou pomáhat maminkám předcházet vzniku možných problémů při kojení a pomohou vyřešit problémy, které se již v průběhu kojení vyskytly.

Jedinečné novinky

V uplynulém období firma Medela uvedla na světový trh několik unikátních produktů, které jsou důkazem správné filosofie firmy, např. 2-fázové odsávačky mateřského mléka s iniciační technologií nebo odsávání z obou prsů pomocí nové technologie prsních nástavců Flex™. Každoročně Medela přichází s dalšími novinkami, které zákaznicky vždy přesvědčí o vysoké kvalitě a efektivitě jejich výrobků.



Více informací
www.medela.cz/who

Náš závazek týkající se kojení a cíle Kodexu WHO

Každé dítě si zaslouží ten nejlepší start do života

Mateřské mléko není jen klíčem k dobrému startu do života, ale zároveň je zdrojem obrovského množství pozitivních výhod, které nás provází po celý život. Kojení je zásadní nutností pro zdraví celé populace a také jedním z neúčinnějších preventivních zdravotních opatření pro děti i matky, a to bez ohledu na to, ve které části světa žijí. WHO a UNICEF doporučují výhradní kojení po dobu šesti měsíců. Společnost Medela toto doporučení plně podporuje. V roce 1981 přijalo Světové zdravotnické shromáždění Mezinárodní kodex WHO pro uvádění náhrad mateřského mléka na trh, a to jako doporučení. Pod pojmem „Kodex“ se jedná o soubor doporučení navržených pro regulaci uvádění náhrad mateřského mléka, lahví a saviček na trh. Podporuje bezpečnou a přiměřenou výživu kojenců tím, že chrání a propaguje kojení.

Závazek ke kojení již od roku 1961

Od založení společnosti Medela v roce 1961 byla podpora kojících matek jádrem všeho, co ve firmě děláme. Náš zakladatel Olle Larsson učinil z tohoto závazku středobod poslání firmy, když v roce 1981 sepsal slib společnosti na podporu kojení:

„Slibujeme svou oddanost kojení jako nejlepší formě výživy pro kojence i jejich rodiny. Dále se zavazujeme, že naše doplňkové výrobky pro kojení a literatura nebudou nikdy použity k tomu, aby ovlivňovaly matky k přechodu z kojení na kojeneckou výživu. Ani propagační literatura a příslušenství pro kojení nesmí být žádným způsobem použito k propagaci náhradní kojenecké mléčné výživy.“

Totéž platí i dnes. Přibližně 1 800 našich zaměstnanců po celém světě cítí a dodržuje naše následující prohlášení: „Jsme zde proto, abychom prostřednictvím celoživotních výhod mateřského mléka zlepšili zdraví matek a dětí,“ a také naše poslání a slib značky „Být předním světovým partnerem a obhájcem mateřského mléka.“

V souladu s tímto posláním zaujíme holistický přístup, který usiluje o následující:

- Prostřednictvím vědy a výzkumu lépe porozumět lidské laktaci
- Celosvětová lepší podpora zdravotnických pracovníků prostřednictvím vzdělávání
- Prostřednictvím vzdělávání a služeb podporovat matky ve všech fázích procesu kojení
- Poskytování nejlepších výrobků pro odsávání mateřského mléka a krmení.

Dáváme matkám podporu, kterou naléhavě potřebují

Během posledních 50 let jsme detailně pochopili, jakou cestu musí matky v průběhu kojení urazit a jakým praktickým potížím a výzvám jsou vystaveny, a jak to může vést již v samotném začátku procesu kojení k výraznému poklesu počtu kojících matek. Z tohoto důvodu poskytujeme řadu řešení – od výrobků a služeb až po včasné oslovení matek s nabídkou vzdělávání a podpory – až k pomoci, jak bezproblémově začlenit kojení do jejich běžného života.

Medela se zasadila o to, aby se do popředí zájmu dostalo odsávání mateřského mléka. Jde však o mnohem více než jen odsávačky mateřského mléka, protože nabízíme kompletní systém podpory kojení, včetně speciální láhve (SNS): láhev pro děti se speciálními potřebami nebo enterální systém pro krmení, který pomáhá slabším a nemocným dětem přijímat mateřské mléko.

Pro rodiny, které se spoléhají na odsávačky, jsou tyto produkty důležitou součástí plánu kojení. A také láhve a savičky jsou tedy nezbytnou součástí celého systému.

A proto, abychom plně matky podpořili nabídkou kompletního řešení, budeme i nadále v naší řadě Essentials nabízet láhve a savičky na mateřské mléko. Jako společnost zaměřená na výzkum poskytujeme informace založené na výsledcích výzkumu o tom, jak správně používat lahvičky a savičky, stejně jako odsávačky a další nabízené výrobky. Protože investujeme do vývoje praktik, které jsou založeny na vědeckých důkazech, jsme propojeni s výzkumnými pracovníky, zdravotníky, matkami, rodinami a lékaři po celém světě, kteří dělají vše, co mohou, aby pomohli matkám kojít a dětem pít mateřské mléko svých maminek.

Náš závazek dodržovat doporučení WHO týkající se kojení a cíle Kodexu WHO

Mezi komerčními společnostmi jsme jedním z největších příznivců kojení a bezvýhradně a upřímně podporujeme doporučení WHO týkající se kojení. Kromě toho jsme plně oddáni cílům Kodexu WHO. Neustále a rozhodně podporujeme matky, děti a celé rodiny na jejich cestě kojení a rezolutně se vyhýbáme propagaci náhrad mateřského mléka.

Nové marketingové směrnice

Kromě toho jsme připravili nové marketingové směrnice pro materiály, které se zabývají krmením kojenců (lahvičky a savičky). Naším cílem je:

- Posílit svoji podporu doporučení WHO ohledně kojení prostřednictvím odpovídajících a snadno rozpoznatelných ikon s odkazem na webovou stránku s podrobnými informacemi pro zákazníky.
- Zajistit, aby v žádném z marketingových materiálů zabývajících se krmením z lahví a saviček nedocházelo k idealizaci krmení lahví.

To znamená, že:

1. nebudeme dělat žádná prohlášení, která by naznačovala podobnost s kojením
2. na materiálech souvisejících se savičkami a lahvičkami nebudou kojenci pít z lahviček
3. lahvičky na skladování mateřského mléka budou zobrazovány v souvislosti s odsáváním.

Podrobné pokyny, které jasně vyjadřují náš závazek vůči kojícím matkám a poskytují rámec pro naše komunikační aktivity, si přečtete na našich webových stránkách.

I nadále se budeme řídit svým prohlášením a propagací celoživotních výhod spojených s kojením a mateřským mlékem a budeme usilovat o lepší zdraví maminek i jejich dětí a uděláme vše, co je v našich silách, abychom jim umožnili kojít své děti co nejdéle.

Baar, Švýcarsko, 26. března 2020



Michael Larsson, prezident a delegát správní rady

Annette Brüls, generální ředitelka Medela AG (2018-2024)

Více informací
www.medela.cz/who



Produktové portfolio

Produkty Medela odráží 30 let výzkumu spojeného se zkušenostmi matek a laktačních poradců. Díky tomu vznikla ucelená řada pomůcek pokrývající všechny potřeby moderních maminek a jejich dětí. V centru pozornosti všech našich aktivit stojí důležité a cenné období kojení.



Obsah

ZALOŽENO NA VÝZKUMU

Str. 7

Díky dlouhodobému výzkumu nabízí Medela pomůcky založené na nejnovějších technologiích vycházejících z přírody. Svoji pozornost věnuje nejen pomůckám pro domácí péči, ale rovněž profesionálním pomůckám pro nemocniční provoz, zejména pro péči o předčasně narozené děti.

PÉČE O PRSY

Str. 8

Zejména na počátku kojení vyžadují prsy zvýšenou pozornost a péči. Pro toto výjimečné období Medela připravila řadu pomůcek, které s maximální citlivostí pečují o prsy a pomáhají překonat případné počáteční obtíže.

ODSÁVÁNÍ MATEŘSKÉHO MLÉKA

Str. 12

V centru naší pozornosti se nacházejí pomůcky pro odsávání mateřského mléka. V kategorii odsávaček patří Medela mezi světové špičky a to zejména díky jedinečné 2-fázové technologii věrně napodobující sání dítěte. Široké portfolio odsávaček zahrnuje několik typů od jednoduchých osobních po profesionální nemocniční odsávačky.

SBĚR MATEŘSKÉHO MLÉKA

Str. 28

Bezpečný a hygienický sběr mateřského mléka je důležitou součástí péče o zdraví dítěte. Medela nabízí k tomuto účelu jak pomůcky pro opakované použití, tak pomůcky jednorázové - sterilní.

PÉČE O MATEŘSKÉ MLÉKO

Str. 30

Tyto produkty byly navrženy pro matky a zdravotnický personál z důvodu zjednodušení péče o mateřské mléko v rámci přepravy, rozmrazování, ohřevu mléka a údržby pomůcek.

PODÁVÁNÍ MATEŘSKÉHO MLÉKA

Str. 32

Některé děti potřebují při krmení malou pomoc, kterou jim Medela zajišťuje prostřednictvím speciálních a alternativních pomůcek na krmení. Všechny pomůcky jsou navrženy s cílem podpory a zachování přirozeného způsobu sání dítěte.

SPODNÍ PRÁDLO

Str. 36

Kvalitní prádlo hraje u každé moderní ženy významnou roli. Medela navrhla a vyrábí prádlo pro těhotné a kojící ženy.

PÉČE O DÍTĚ

Str. 38

Víme, že matka i dítě si navzájem dávají lásku, podporu a štěstí. Chceme pomáhat pěstovat a prohlubovat toto jedinečné láskyplné pouto. Aby mezi vás a vaše dítě nevstoupilo nic jiného než láska.

NÁHRADNÍ DÍLY

Str. 40

Veškeré náhradní díly lze objednat na www.medela.cz

VZDĚLÁVÁNÍ

Výrobce MEDELA AG poskytuje veškeré nově získané poznatky odborné i laické veřejnosti. Organizuje semináře, provádí osvětu, publikuje v časopisech a literatuře.

SERVIS A PRODEJ

Společnost DN Formed Brno s.r.o. je nejen výhradním zástupcem v ČR, ale také autorizovaným servisním střediskem. Požadavky a případné potíže našich zákazníků řešíme obratem k jejich plné spokojenosti. Naším cílem je bezproblémové a bezpečné použití všech pomůcek.

Vzhledem k tomu, že mnoho produktů Medela jsou výrobcem deklarovány jako zdravotnické prostředky podle zák. č.375/ 2022 Sb. o zdravotnických prostředcích, vždy jsme dbali a budeme dbát na odbornost, kvalitu a způsobilost našich obchodních partnerů.

Schválené a doporučené prodejce, kteří byli proškoleni našimi profesionály, najdete na www.medela.cz. Doporučujte zákazníkům pouze tato prodejní místa, kde najdou odborná doporučení a případnou pomoc.

Založeno na výzkumu




Složení mateřského mléka

Mateřské mléko obsahuje všechny složky pro zdravý vývoj dítěte. Nezajišťuje pouze výživu, ale přináší imunologické a vývojové výhody, které jsou jedinečné a specifické u každé dvojice matka – dítě. Složení mateřského mléka (množství proteinů, karbohydrátů a tuků) se mění jak v průběhu období kojení, tak i v rámci jednoho dne, díky čemuž se neustále přizpůsobuje aktuálním potřebám dítěte. Z těchto důvodů Světová zdravotnická organizace WHO doporučuje výhradní kojení po dobu prvních šesti měsíců věku dítěte. Navzdory stálým výzkumům mateřského mléka nejsme dosud schopni plně porozumět všem vlastnostem a výhodám, které nám přináší, ačkoliv už dnes díky současným znalostem je možné nazvat mateřské mléko „tekutým zlatem“.

Anatomie prsu

Prsy jsou jedinečným kojícím systémem, jehož činnost začíná vlivem hormonů již v těhotenství. Jakmile se dítě narodí a porodí se placenta, hormony v těle ženy nastartují laktaci. Dítě svým sáním stimuluje produkci hormonu prolaktinu, který zodpovídá za tvorbu mléka a dále hormonu oxytocinu, který spouští tok mateřského mléka. Oxytocin vyvolává ejekční reflex způsobující stah svalů podél mlékovodů a tím umožňuje tok mléka a jeho uvolnění na vývodech bradavky. Čím častěji je dítě přikládáno k prsu, tím více mléka se tvoří. Tvorba mléka není závislá na velikosti prsů.

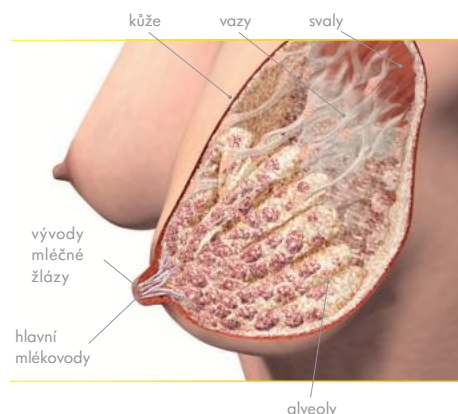

Sání dítěte

Výzkum prováděný společností Medela AG spolu s odborníky přinesl nové klíčové poznatky v oblasti způsobu sání dítěte:

- ✓ hlavní roli při spuštění a toku mléka hraje podtlak (vakuum)
- ✓ jazyk nevykonává peristaltický pohyb
- ✓ není zde známka zjevného tlaku na bradavku
- ✓ špička jazyka nezasahuje až na přechod mezi tvrdým a měkkým patrem

Maximální vakuum je dosaženo, když je jazyk v dolní poloze, což má za následek tok mléka.

Při pohybu jazyka nahoru tok ustává. Minimální hodnota podtlaku v ústech dítěte činí -64 ± 45 mmHg.

Zdraví

Medela pomůcky, které přichází do kontaktu s mateřským mlékem, neobsahují zdraví škodlivý Bisphenol-A.



Přednosti kojení pro dítě	Přednosti kojení pro matku
<ul style="list-style-type: none">• přirozená a snadno stravitelná výživa• mateřské mléko obsahuje protilátky – působí protizánětlivě• nižší výskyt alergických nemocí• snížení rizika náhlého úmrtí novorozenců• pohyby úst, čelisti a jazyka během sání mají přirozený vliv na rozvoj správné artikulace• mateřské mléko je komplexní tekutina, která plně odpovídá měnícím se potřebám rostoucího dítěte• mateřské mléko má vždy správnou teplotu, je připraveno pro dítě kdekoliv a kdykoliv• kojení je intimní zážitek, který obohatí život matky a dítěte, rozvíjí jejich citový vztah	<ul style="list-style-type: none">• rychlejší zavinování dělohy po porodu s minimálním krvácením• snížení rizika výskytu rakoviny prsů a vaječníků• méně stresu díky možnosti okamžitého podání mateřského mléka• finanční i časová úspora• rychlejší získání původní postavy před porodem• snížení absence matek v zaměstnání, neboť kojené děti jsou obecně zdravější

Péče o prsy



Prevence a léčba

Počátek kojení často vyžaduje malou pomoc. Řada pomůcek Medela představuje ucelený systém, který pomáhá předcházet vzniku potíží, případně urychluje proces hojení poraněných a citlivých bradavek. Nezapomínejte však na důležitost správné techniky kojení a v případě výskytu potíží kontaktujte laktační poradkyni. Seznam laktačních poradkyň Medela najdete na www.medela.cz.



PURELAN™ LANOLINOVÁ MAST

K101041324 (Purelan 7 g)

K101041340 (Purelan 37 g)

- ✓ rychlá úleva pro bolavé bradavky a suchou pokožku
- ✓ bezpečný pro vaše dítě - není nutné ho před kojením smývat
- ✓ efektivní - bohatá struktura vytváří ochrannou vrstvu na pokožce a rehydratuje zevnitř
- ✓ 100% přírodní jednosložkový lanolin, bez přísad, konzervačních látek a vůně
- ✓ dermatologicky testován
- ✓ hypoalergenní a vhodný pro citlivou pokožku
- ✓ vyroben z mulesing-free vlny
- ✓ ultra čistý lanolin lékařské kvality testovaný podle nejvyšších bezpečnostních standardů European Pharmacopoeia

VARIANTY

- Purelan 37 g
- Purelan 7 g



ORGANICKÝ BALZÁM NA BRADAVKY

K101044902 (40 g)

- ✓ přirozená úleva pro kojící matky s bolavými bradavkami a suchou pokožkou díky vyživujícímu a zklidňujícímu dvojitému účinku Double Action™ olivového oleje a měsíčku lékařského
- ✓ certifikát Cosmos Organic a Vegan, hypoalergenní, dermatologicky testováno
- ✓ výživný a snadno použitelný: lehký organický balzám na bradavky, který se příjemně vstřebává beze zbytků
- ✓ bezpečný pro vaše miminko, není třeba jej před kojením smývat. V potravinářské kvalitě, vaše miminko si ho ani nevšimne!
- ✓ vyrobeno bez parfemace, přídatných látek, alkoholu, BHT, palmového oleje a GMO
- ✓ vhodné i na popraskané rty a suchou nebo citlivou pokožku

VARIANTA

- 40 g



ORGANICKÝ MASÁŽNÍ OLEJ NA PRSY

K101044944 (50 ml)

- ✓ úleva pro kojící matky díky výživnému a hřejivému dvojitému účinku Double Action™ avokádového oleje a zázvoru
- ✓ certifikát Cosmos Organic a Vegan, hypoalergenní a dermatologicky testováno
- ✓ nelepivé a snadno roztíratelné složení pro pohodlnou aplikaci a masáž
- ✓ bezpečný pro vaše miminko, není třeba jej před kojením smývat. V potravinářské kvalitě, vaše miminko si ho ani nevšimne!
- ✓ vyrobeno bez parfemace, přídatných látek, alkoholu, BHT, palmového oleje a GMO
- ✓ skleněná lahvička vybavená regulátorem průtoku pro kontrolu dávkování produktu pro snadnou a pohodlnou aplikaci

VARIANTA

- 50 ml



DOPORUČUJEME:

Kombinace použití masti Purelan a chráničů bradavek již od prvního dne kojení je ideální prevencí před možným vznikem bolavých či popraskaných bradavek.



KONTAKTNÍ KOJICÍ KLOBOUČKY

K200.1628 (S - 16 mm)

K200.1596 (M - 20 mm)

K200.1633 (L - 24 mm)

- ✓ použití v případě plochých, vpáčených či poraněných bradavek
- ✓ chrání bolavé a popraskané bradavky v průběhu kojení
- ✓ speciální anatomický tvar umožňuje kontakt dítěte s pokožkou matky
- ✓ vyrobeny z velmi jemného silikonu bez chuti a vůně
- ✓ praktická krabička pro jejich hygienické uložení
- ✓ dostupné ve 3 velikostech: S, M, L
- ✓ balení 2 ks

Upozornění: nesmí se používat jako ochrana bradavek mezi kojením.



HYDROGELOVÉ POLŠTÁŘKY

K008.0055 (balení 4 ks)

- ✓ ochrana a léčba bolestivé, popraskané prsní tkáně
- ✓ při dotyku chladí podrážděné bradavky a přináší tak okamžitou úlevu
- ✓ ideální pro hojení ragád (vlhké hojení)
- ✓ baleny jednotlivě sterilně - připraveny k okamžitému použití
- ✓ hydrogelový polštářek lze použít opakovaně až po dobu 24 hodin
- ✓ nepoužívat, jestliže je na bradavce již stroupek (vhodný Purelan)

VARIANTY

- balení 4 ks



FORMOVAČE BRADAVEK

K008.0043

- ✓ připravuje na kojení vpáčené či ploché bradavky
- ✓ vyvíjí tlak na vazivo dvorce
- ✓ perforovaná zevní miska zajišťuje cirkulaci vzduchu a zabraňuje vzniku kvasinek
- ✓ vyrobeny z měkkého silikonu
- ✓ nošení od 32. týdne těhotenství
- ✓ balení 2 ks



CHRÁNIČE BRADAVEK

K008.0042

- ✓ ochrana bolestivých či poraněných bradavek mezi kojením
- ✓ zabraňuje bolestivému odírání o oblečení
- ✓ otvory v zevní misce zajišťují cirkulaci vzduchu a zabraňují vzniku kvasinek
- ✓ urychlují hojení
- ✓ vyrobeny z měkkého silikonu
- ✓ balení 2 ks

	Formovače	Purelan	Chrániče	Hydrogelové polštářky	Kontaktní kojící kloboučky
Citlivé bradavky		✓	✓	○	
Suché bradavky		✓		○	
Bolestivé bradavky			✓	○	
Popraskané bradavky		○	✓	✓	○
Vpáčené a ploché bradavky	✓				✓

Vysvětlivky: ✓ doporučené ○ náhradní varianta

Péče o prsy

Zachycení unikajícího mléka

Mezi kojením dochází k samovolnému úniku mléka z prsů, což v maminkách vzbuzuje nepříjemné pocity. Bradavky je nutné mezi kojením udržovat v suchu, aby nedocházelo k jejich mokrání. Medela nabízí několik možností zachycení mléka v závislosti na jeho objemu.



VLOŽKY JEDNORÁZOVÉ SUPER

K008.0320 (balení 30 ks)

K008.0374 (balení 60 ks)

- ✔ vysoce savé, udržují bradavky v suchu
- ✔ uzavírají vlhkost
- ✔ hygienicky baleny po 1 ks

VARIANTY

- balení 30 ks
- balení 60 ks



VLOŽKY JEDNORÁZOVÉ ULTRATENKÉ

K101037038

- ✔ inovativní oválný tvar pěkně sedí na prsu a je tak velmi diskrétní
- ✔ zachytí vlhkost uvnitř vložky
- ✔ pět vrstev absorpce a tenčí než 2 mm
- ✔ flexibilní ochranný boční spoj zabraňuje úniku mléka po stranách
- ✔ balení 30 ks
- ✔ jednotlivě hygienicky zabaleny



MISKY K ZACHYCENÍ MLÉKA

K008.0240

- ✔ zachycení většího množství mléka mezi kojením i při kojení (z druhého prsu)
- ✔ možnost sběru mléka k jeho uchování v láhvi nebo mraz. sáčku
- ✔ snadné vyprázdnění
- ✔ vyrobeny z měkkého silikonu
- ✔ balení 2 ks

Jak zvolit správný typ pomůcky k zachycení unikajícího mléka?

- ✔ Vložky jednorázové ultratenké - při malém, středním úniku mléka (do 15 ml)
- ✔ Vložky jednorázové super - při větším úniku mléka (do 40 ml)
- ✔ Misky k zachycení mléka - při velkém úniku mléka (nad 40 ml)
- ✔ Silikonový sběrač - při velkém úniku mléka (do 100 ml)

Množství unikajícího mléka	Jednorázové vložky Super	Ultratenké vložky	Misky k zachycení mléka	Silikonový sběrač mateřského mléka
Minimální		✔		
Střední	✔			
Velké			✔	✔

Vysvětlivky:
✔ doporučené

Zachycení mléka

Silikonový sběrač

K101044202

NOVÝ silikonový sběrač mateřského mléka Medela je skutečným pomocníkem při kojení a spořičem mateřského mléka. Sběrač s dvojitou ochranou proti vylití, šňůrkou a přísavnou základnou chrání každou vzácnou kapku mléka, aby vaše miminko dostalo vše!



- ✓ Dvojitá ochrana proti vylití: díky zátce a víčku
- ✓ Klip na šňůrce: minimalizuje náhodné vylití a poskytuje klid při používání
- ✓ Bezpečná přísavná základna: přisaje se na rovném povrchu, aby se zabránilo převrnutí při odložení
- ✓ Pohodlný: měkký silikonový prsní nástavec a tělo sběrače
- ✓ Snadné použití a čištění: 1 dílná konstrukce
- ✓ Tichý a diskrétní sběrač mateřského mléka
- ✓ Lehký a přenosný, ideální na cesty: vezměte si jej s sebou kamkoliv jako svého pomocníka při kojení
- ✓ Bezpečný pro vás i pro dítě: všechny části, které se dotýkají mateřského mléka, jsou vyrobeny bez BPA.
- ✓ Vyrobeno ze 100% potravinářského silikonu, bez BPA
- ✓ Pojme až 100 ml mateřského mléka
- ✓ Není odsávačkou mateřského mléka - sběrač mateřského mléka nebo silikonová odsávačka nevytváří žádné sací cykly, které by aktivně a účinně odstraňovaly mléko z prsu



BALENÍ OBSAHUJE:

- 1 ks silikonový sběrač mateřského mléka
- 1 ks silikonová zátka
- 1 ks víčko
- 1 ks šňůrka s klipem

VLASTNOSTI:

- Důvod použití: únik mléka
- Materiál bez BPA: silikon
- Objem: 100 ml
- Typ: manuální
- Vhodnost použití: po porodu

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Kdy mám používat silikonový sběrač mateřského mléka?

Mnoho maminkám při kojení z jednoho prsu uniká mléko z druhého prsu, silikonový sběrač mateřského mléka je navržen tak, aby zachytil mateřské mléko, které při kojení přirozeně uniká z druhého prsu, a zajistil, že každá kapka bude využita a nepřejde nazmar.

Jak nejlépe vyčistit silikonový sběrač mateřského mléka?

Po každém použití jej umyjte ručně nebo v myčce nádobí. Silikonový sběrač mateřského mléka před prvním použitím a jednou denně dezinfikujte vyvařením ve vodě po dobu přibližně 3 minut nebo pomocí sterilizačních sáčků Quick Clean.

Více informací naleznete na našem webu www.medela.cz

Odsávání mateřského mléka





Technologie odsávání Medela: 2-fázový systém

Přirozený vrozený instinkt vede děti k neefektivnějšímu možnému sání z prsu a to pomocí změny způsobu sání při kojení. Dvouletý výzkum, vedený profesorem Peterem Hartmannem z australské univerzity, vedl Medelu k vývoji 2-fázového systému odsávání, které věrně napodobuje sání novorozence. Počáteční krátké rychlé sání stimuluje spuštění ejekčního reflexu. Jakmile dojde k zahájení toku mléka, dítě přechází k pomalejšímu a hlubšímu sání pro získání maximálního množství mléka v co nejkratší době. První fázi zajišťuje stimulační rytmus 120 cyklů za minutu. Následná druhá odsávací fáze je v rytmu 45 až 78 cyklů za minutu v závislosti na vytvořeném podtlaku.

Přínos 2-fázového odsávání

- Přirozenost:** podobný pocit jako při sání dítěte z prsu
- Efektivita:** větší množství mléka za kratší dobu
- Jedinečnost:** rychlejší spuštění toku mléka, kratší doba odsávání
- Bezpečnost:** šetrné k prsní tkáni

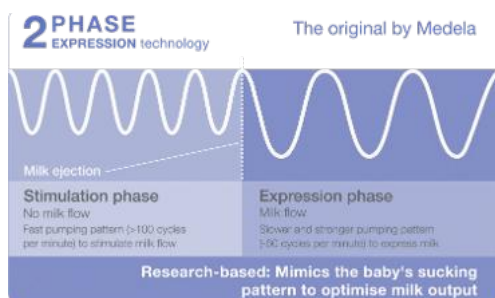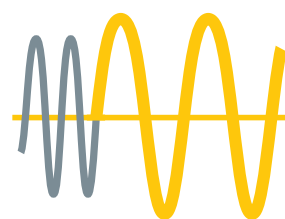

Přehled odsávaček

Osobní

- ✓ určeny pouze pro jednu maminku, nejsou určeny k zapůjčení
- ✓ mechanické: Harmony™
- ✓ elektrické Single: Swing Flex™, Solo™, Solo™ Hands-free
- ✓ elektrické Double: Swing Maxi™ NEW, Swing Maxi™ Hands-free, Freestyle™ Hands-free

Nemocniční

- ✓ určeny pro použití více maminkami v nemocnicích, jsou určeny také k zapůjčení prostřednictvím rentálních stanic, uvedených na www.medela.cz
- ✓ elektrické: Symphony PLUS






Výběr odsávačky

Je velmi důležité vybrat správný typ odsávačky, neboť každá odsávačka je konstrukčně stavěna pro určitou aktivitu odsávání. Proto věnujte velkou pozornost našemu doporučení. Životnost odsávačky je závislá na četnosti, délce a intenzitě odsávání. Uvedený postup výběru odsávačky je naším doporučením, je ale nutné vždy zvážit a brát v úvahu individuální potřeby matky.

Postup pro výběr vhodné odsávačky

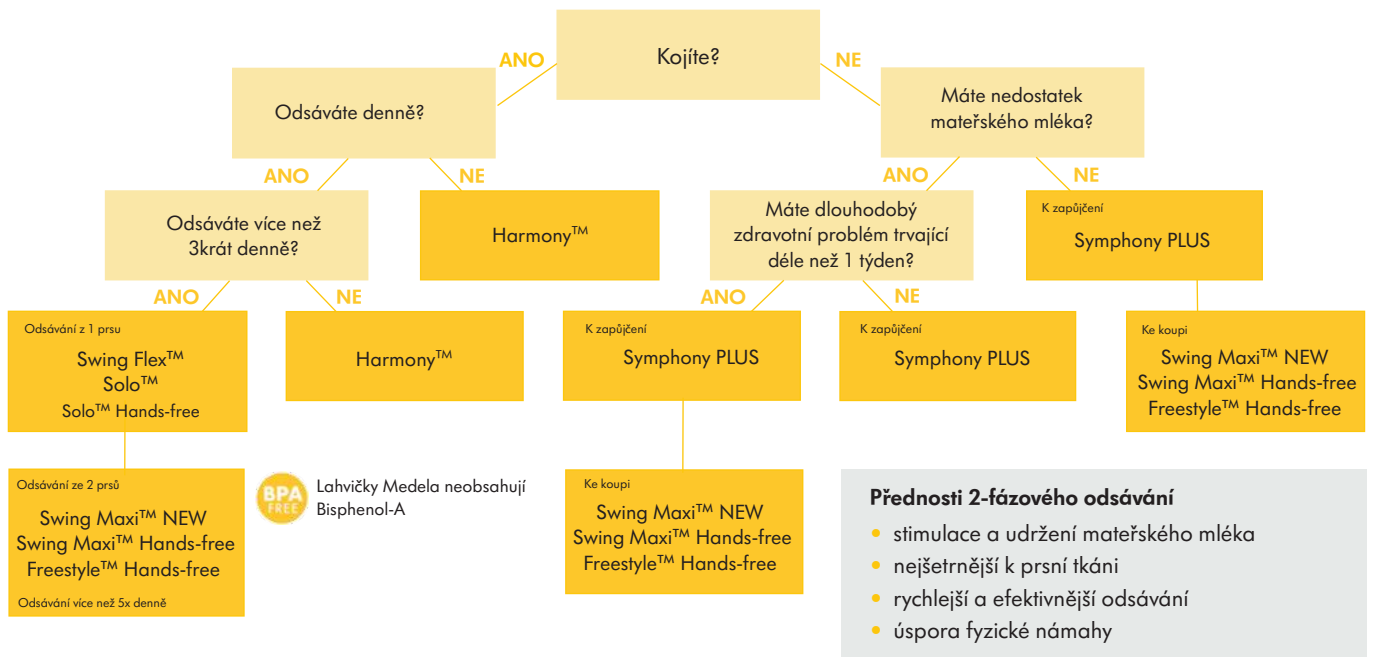

Osobní odsávačky

Harmony™

K101041156 (Harmony™)

K101041164 (Harmony™ Essentials Pack)



Oblíbená odsávačka Harmony™ je jedinou manuální odsávačkou, která byla vytvořena na základě technologie 2-fázového systému sání.



- ✓ **Kompaktní, lehká a přenosná:** Můžete si vzít Harmony™ kamkoliv
- ✓ **Diskrétní a tichá:** Odsávejte s jistotou kdykoliv a kdekoliv
- ✓ **Prsní nástavce PersonalFit Flex™:** Pro větší pohodlí a více mléka
- ✓ **Technologie 2-fázového odsávání:** Její jedinečné madlo vám pomůže napodobit přirozený rytmus sání vašeho dítěte
- ✓ **Jednoduché použití:** Intuitivní a ergonomický design
- ✓ **Snadné čištění:** Jednoduchá montáž a demontáž, také mytí a dezinfekce odsávačky Harmony™ je hračka

VARIANTY

- Harmony™
- Harmony™ Essentials Pack



BALENÍ OBSAHUJE:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 ks Hlava ventilu | 1 ks Žlutý ventil, 2 ks bílá membrána |
| 1 ks PersonalFit Flex™ M (24 mm) | 1 ks Víčko, Stojánek |
| 1 ks Láhev 150 ml | 1 ks Madlo vč. těsnicí podložky |

BALENÍ ESSENTIALS PACK NAVÍC OBSAHUJE:

- 4 ks Jednorázová vložka ultratenká Safe & Dry
- 4 ks Sáček na skladování mléka
- 1 ks Silikonová savička na krmení s ochranným krytem, velikost S
- 1 ks Šroubovací uzávěr

Pozn.: Veškeré díly lze zakoupit samostatně jako náhradní díly

UŽITEČNÉ RADY

V případě nedostatečného výkonu odsávačky proveďte následující body:

- přítomnost O-kroužku na těsnicí podložce madla
- neporušenost a správné upevnění těsnicí podložky na madlo
- neporušenost a čistotu žlutého ventilu a bílé membránky

Více informací naleznete v návodu, případně na www.medela.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vakuum: volitelná úroveň
Stimulační fáze: 0 - 150 mmHg
Odsávací fáze: 0 - 250 mmHg

Swing Flex™

K101033781



Stylový design a praktické použití řadí 2-fázovou elektrickou odsávačku Swing Flex™ mezi nejoblíbenější odsávačky mateřského mléka.



- ✓ **Efektivní:** 2-fázový systém odsávání pomáhá nástupu a udržení laktace
- ✓ **Výkonná:** Odsaje více mléka za méně času
- ✓ **Jedinečná:** Vhodná pro denní použití, 3-5x denně
- ✓ **Pohodlná a šetrná:** Možnost nastavení intenzity odsávání
- ✓ **Jednoduchá:** Snadné sestavení, použití a údržba
- ✓ **Tichá:** Poskytuje možnost diskrétního odsávání ve všech situacích
- ✓ **Mobilní:** Možnost uchycení na opasek, možnost zavěsit na krk nebo kdekoliv do prostoru (šňůrka není součástí balení)
- ✓ **Upozornění:** Swing Flex™ nelze rozšířit na odsávání z obou prsů



DOPORUČUJEME: Pás pro snadné odsávání - viz str. 37

BALENÍ OBSAHUJE:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 ks Konektor PersonalFit Flex™ | 1 ks Motor Swing |
| 1 ks PersonalFit Flex™ S, M (21 mm, 24 mm) | 1 ks Hadice Swing Flex™ |
| 1 ks Láhev 150 ml | 1 ks Adaptér Swing |
| 1 ks Víčko, Stojánek | |

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vakuum: nastavitelná úroveň
Stimulační fáze: 35 - 120 mmHg, 111 cyklů / min
Odsávací fáze: 35 - 250 mmHg, 45 - 72 cyklů / min
Hlučnost: max. 57dBA
Provoz: síťový i bateriový

UŽITEČNÉ RADY

V případě nedostatečného výkonu odsávačky prověřte následující body:

- sestavení dílů (membrána v konektoru)
- neporušenost membrány v konektoru
- neporušenost hadičky

Více informací naleznete v návodu, případně na www.medela.cz

Solo™

K101041614



Solo™ je kompaktní, efektivní a snadno použitelná elektrická odsávačka mléka pro odsávání z jednoho prsu s integrovanou baterií, technologií 2-Phase Expression® a prsním nástavcem PersonalFit Flex™.



- ✓ **Snadné použití:** Intuitivní uživatelské rozhraní se 4 tlačítky a 9 stupni intenzity vakua
- ✓ **Snadno se skládá** a čistí díky několika částem
- ✓ **Lehký a kompaktní design**
- ✓ **Ještě flexibilnější použití:** Integrovaná baterie až pro 6 odsávacích cyklů na jedno úplné nabití
- ✓ **Rychlejší nabíjení** díky připojení USB-C (ve srovnání s připojením micro-USB)
- ✓ **Technologie 2-Phase-Expression®** napodobuje přirozený rytmus sání vašeho dítěte
- ✓ **Prsní nástavec PersonalFit Flex™** pro větší pohodlí a o 11 % více mléka. Včetně velikosti M - 24 mm
- ✓ **Výrazně tišší** než předchozí generace odsávaček: pouze 45 dB při nejvyšší úrovni vakua
- ✓ **Uzavřený systém**, který zabraňuje vstupu mateřského mléka do hadičky
- ✓ **Kratší stimulační fáze** (1 minuta) - lépe odráží fyziologii odsávání mléka



DOPORUČUJEME: Pás pro snadné odsávání - viz str. 37

BALENÍ OBSAHUJE:

1 ks Motor Solo™
1 ks 150 ml láhev s víčkem
1 ks Stojan na láhev
1 ks Konektor PersonalFit Flex™

1 ks Prsní nástavec PersonalFit Flex™, velikost M (24 mm)
1 ks USB nabíjecí kabel (USB-C)
1 ks USB napájecí adaptér

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vakuum: nastavitelná úroveň
Stimulační fáze: 45 - 120 mmHg, 111 cyklů / min
Odsávací fáze: 45 - 245 mmHg, 45 - 72 cyklů / min
Hlučnost: max. 57dBA
Provoz: síťový i bateriový

UŽITEČNÉ RADY

V případě nedostatečného výkonu odsávačky prověřte následující body:

- sestavení dílů (membrána v konektoru)
- neporušenost membrány v konektoru
- neporušenost hadičky

Více informací naleznete v návodu, případně na www.medela.cz

Solo™ Hands-free

K101045514

Hands-free

Single elektrická odsávačka mateřského mléka Medela Solo™ Hands-free: ideální hands-free řešení pro praktické odsávání (in-bra odsávání). Naše elegantní, kompaktní a intuitivní odsávačka Solo™ v kombinaci se sběrnou nádobkou Medela Hands-free - anatomicky navrženou tak, aby podporovala efektivní odsávání mléka, velmi lehká* pro větší pohodlí a snadno čistitelná pouze ze tří částí.

* Pouze 76 g



- ✓ **Anatomický design:** Navržena tak, aby se přizpůsobila tvaru prsu a podpořila efektivní odsávání mléka a maximální pohodlí
- ✓ **Ultra lehká:** S pouhými 76 g patří k nejlehčím dostupným, navržena tak, aby se pohodlně a diskrétně vešla do podprsenky
- ✓ **3 díly, snadné čištění:** Snadno se sestavuje a lze ji mýt v myčce nádobí, díky čemuž je odsávání méně časově náročné
- ✓ **Průhledný design:** Snadno zkontrolujete, zda bradavku do tunelu prsního nástavce umísťujete správně, což zabraňuje tření a podporuje efektivní odsávání mléka. Průhledná nádobka vám pomůže pozorovat, kdy a jak mléko teče, a změřit objem na konci odsávání
- ✓ **Konektivita:** Užívejte si automatické sledování díky propojení s aplikací Medela Family™ - vaším osobním asistentem, který poskytuje automatické sledování v reálném čase, personalizovaný, vědecky podložený obsah a také chytré nástroje a tipy pro odsávání
- ✓ **Intuitivní ovládání:** Díky pouhým 4 tlačítkům se odsávačka Solo™ Hands-free používá intuitivně a snadno se ovládá



BALENÍ OBSAHUJE:

- 1 ks Motor Solo™ Hands-free
- 1 ks Prsní nástavec Medela Hands-free™, velikost 24 mm
- 1 ks Membrána Hands-free™
- 1 ks 150 ml sběrná nádobka Hands-free™
- 1 ks Hadice Solo Hands-free™
- 1 ks Napájecí síťový adaptér s kabelem USB-C

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Vakuum: volitelných 9 stupňů intenzity vakua
Výkon vakua (v nadmořské výšce 500 m [atmosferický tlak 954,62 hPa]):
- -45 až -245mmHg, 45 - 111 cyklů/min.
- Provoz: síťový i bateriový

UŽITEČNÉ RADY

- V případě nedostatečného výkonu odsávačky prověřte následující body:
- sestavení dílů (zejména sestavení žluté membrány, správné nasazení na prsní nástavec)
 - neporušenost a čistotu žluté membrány

Více informací naleznete v návodu, případně na www.medela.cz

TIP:

Podprsenka 3v1 pro snadné odsávání viz str. 36



Swing Maxi™ NEW

K101041615



Odsávačka Swing Maxi™ je kompaktní a snadno použitelná elektrická odsávačka na dva prsy, která rychle zapadne do vašeho života a její použití je ještě flexibilnější. S integrovanou baterií, která dokáže zvládnout až 6 odsávacích cyklů na jedno plné nabití.



- ✓ **Efektivní:** Odsávání z obou prsů současně - až **o 18 % více mléka** za kratší dobu
- ✓ **Technologie 2-Phase-Expression®** napodobuje přirozený rytmus sání vašeho dítěte
- ✓ **Prsní nástavec PersonalFit Flex™** pro větší pohodlí a o 11 % více mléka. Včetně 2 velikostí (S - 21 mm, M - 24 mm)
- ✓ **Ještě flexibilnější použití:** Integrovaná baterie až pro 6 odsávacích cyklů na jedno úplné nabití
- ✓ **Rychlejší nabíjení** díky připojení USB-C (ve srovnání s připojením micro-USB)
- ✓ **Snadné použití:** Intuitivní uživatelské rozhraní se 4 tlačítky a 9 stupni intenzity vakua
- ✓ **Snadno se skládá a čistí** díky několika částem
- ✓ **Výrazně tišší** než předchozí generace odsávaček: pouze 45 dB při nejvyšší úrovni vakua
- ✓ **Uzavřený systém**, který zabraňuje vstupu mateřského mléka do hadičky
- ✓ **Kratší stimulační fáze** (1 minuta) - lépe odráží fyziologii odsávání mléka



Double pumping

- ✓ Otestováno - informace sdíleny na základě vědeckého výzkumu se zdravotníky a kojícími maminkami.
- ✓ Efektivnější - odsávání z obou prsů současně stimuluje mléčnou žlázu k vyšší produkci mléka.
- ✓ O 18 % více mléka - při odsávání z obou prsů současně můžete získat až o 18 % více mléka než při odsávání z každého prsu zvlášť.
- ✓ Vyšší energetická hodnota mléka - proto také odsajete více zadního mléka s vyšším obsahem tuku a i proto je prs lépe vyprazdňován.
- ✓ Úspora času - při odsávání z obou prsů současně ušetříte polovinu času.

BALENÍ OBSAHUJE:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 2 ks Konektor PersonalFit Flex™ | 1 ks Motor Swing Maxi™ NEW |
| 2 ks Prsní nástavec PersonalFit Flex™
S, M (21 mm, 24 mm) | 1 ks USB síťový adaptér |
| 2 ks Láhev 150 ml vč. víčka | 1 ks USB napájecí kabel |
| 2 ks Stojan láhve | 1 ks Hadice Swing Maxi™ NEW |

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vakuum: nastavitelná úroveň
Stimulační fáze: 45 - 120 mmHg, 111 cyklů/min.
Odsávací fáze: 45 - 245 mmHg, 45 - 72 cyklů/min.
Hlučnost: 45 dB
Provoz: síťový i bateriový

UŽITEČNÉ RADY

V případě nedostatečného výkonu odsávačky prověřte následující body:

- sestavení dílů (zejména konektoru a žluté membrány, správné nasazení krytu konektoru)
- neporušenost a čistotu žluté membrány
- v případě odsávání z jednoho prsu
- zasazení nevyužitých hadic do jejího pevného středu

Více informací naleznete v návodu, případně na www.medela.cz

TIP:

Pás pro snadné odsávání
viz str. 37



Swing Maxi Hands-free™

Hands-free

Vyzkoušejte nové hands-free řešení společnosti Medela – elektrickou odsávačku Swing Maxi™ Hands-free pro maximální pohodlí. Kompaktní, s intuitivním ovládáním a v kombinaci s Medela Hands-free sběrnými nádobkami – anatomicky navrženými pro podporu efektivního odsávání mléka, velmi lehkými* pro větší pohodlí a snadno čistitelnými pouze ze tří částí.

* Pouze 76 g



- ✓ **Kompaktní a lehká:** Odsávačka Swing Maxi Hands-free™ se snadno vejde do kapsy nebo se přenáší díky své lehké kompaktní konstrukci a vestavěné baterii. V kombinaci se sběrnou nádobkou vás udrží mobilní, když to nejvíce potřebujete
- ✓ **Efektivní:** Odsávání z obou prsů současně – až o 18 % více mléka za kratší dobu
- ✓ **Anatomický design:** Sběrné nádobky navrženy tak, aby se přizpůsobily tvaru prsu a podpořily efektivní odsávání mléka a maximální pohodlí
- ✓ **Ultra lehké:** S pouhými 76 g patří k nejlehčím dostupným sběrným nádobkám, navrženy tak, aby se pohodlně a diskrétně vešly do podprsenky
- ✓ **3 díly, snadné čištění:** Nádobky se snadno sestavují a lze je mýt v myčce nádobí, díky čemuž je odsávání méně časově náročné
- ✓ **Konektivita:** Užijte si automatické sledování díky propojení s aplikací Medela Family™ - vaším osobním asistentem, který poskytuje automatické sledování v reálném čase, personalizovaný, vědecky podložený obsah a také chytré nástroje a tipy pro odsávání
- ✓ **Intuitivní ovládání:** Díky pouhým 4 tlačítkům se odsávačka Swing Maxi™ Hands-free používá intuitivně a snadno se ovládá



BALENÍ OBSAHUJE:

1 ks Motor Swing Maxi™
2 ks Prsní nástavec Medela HF™, 24 mm
2 ks Prsní nástavec Medela HF™, 21 mm
2 ks Membrána HF™

2 ks 150 ml sběrná nádobka HF™
1 ks Hadice double HF™
1 ks Šňůrka pro větší mobilitu
1 ks Napájecí síťový adaptér s kabelem USB-C

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vakuum: nastavitelná úroveň
Stimulační fáze: 45 - 120 mmHg, 111 cyklů/min.
Odsávací fáze: 45 - 245 mmHg, 45 - 72 cyklů/min.
Hlučnost: 45 dB
Provoz: síťový i bateriový

UŽITEČNÉ RADY

V případě nedostatečného výkonu odsávačky prověřte následující body:

- sestavení dílů (zejména sestavení žluté membrány, správné nasazení na prsní nástavec)
- neporušenost a čistotu žluté membrány

Více informací naleznete v návodu, případně na www.medela.cz

* HF™ - Hands-free™

TIP:

Podprsenka 3v1 pro snadné odsávání viz str. 36



Freestyle™ Hands-free

K101044160

Hands-free

Freestyle™ Hands-free je nejmenší a první nositelná double elektrická odsávačka mateřského mléka Medela s funkcí Hands-free, která je navržena tak, abyste se během odsávání mohli věnovat jiným činnostem. Kompaktní odsávačka kapesní velikosti je samostatnou jednotkou, která umožňuje, aby se naše lehké sběrné nádoby diskrétně vešly do podprsenky a poskytly vám vynikající zážitek z odsávání bez použití rukou.



- ✓ **Nositelné, velmi lehké sběrné nádoby** patří k nejlehčím dostupným (76 g každá)
- ✓ **Motor odsávačky zůstává v kapse**, místo aby Vás zatěžoval na prsou
- ✓ **Anatomicky tvarované sběrné nádoby** unikátně navržené tak, aby maximalizovaly odsávání mléka a pohodlí tím, že snižují tlak na prsní tkáň
- ✓ **Snadné čištění** - pouze tři díly, lze mýt v myčce nádobí
- ✓ **Vestavěná baterie** s možností dobíjení přes USB
- ✓ **Propojení s aplikací** Medela Family™ přes Bluetooth
- ✓ **Technologie 2-Phase Expression™** napodobuje přirozený rytmus sání dítěte



BALENÍ OBSAHUJE:

- 1 ks Motor Freestyle™ Hands-free
- 1 ks USB síťový adaptér
- 1 ks USB-C napájecí kabel
- 2 ks Prsní nástavec Hands-Free™ vel. 21 mm
- 2 ks Prsní nástavec Hands-Free™ vel. 24 mm
- 1 ks Hadice double Hands-Free™
- 2 ks Sběrné nádoby 150 ml

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Vakuum: volitelných 9 stupňů intenzity vakua
Výkon vakua (v nadmořské výšce 500 m [atmosferický tlak 954,62 hPa]):
- -45 až -245mmHg, 45 - 111 cyklů/min.
- Provoz: síťový i bateriový

UŽITEČNÉ RADY

- V případě nedostatečného výkonu odsávačky prověřte následující body:
- sestavení dílů (zejména sestavení žluté membrány, správné nasazení na prsní nástavec)
 - neporušenost a čistotu žluté membrány

Více informací naleznete v návodu, případně na www.medela.cz

TIP:

Podprsenka 3v1 pro snadné odsávání viz str. 36





Jedna odsávačka, dva způsoby odsávání



Tradiční



Hands-free



ODSÁVACÍ SOUPRAVA DOUBLE PERSONALFIT FLEX™

K101046262

- ✓ klasická odsávací souprava
- ✓ zefektivňuje rutinní odsávání
- ✓ odsávejte a skladujte mléko přímo do lahví
- ✓ klinicky ověřená účinnost
- ✓ pohodlné ovládání polohy a přiložení prsního nástavce



ODSÁVACÍ SOUPRAVA DOUBLE HANDS-FREE™

K101045989

- ✓ anatomický tvar
- ✓ ultra lehké nádoby
- ✓ 3 díly, snadné čištění a sestavení
- ✓ průhledný design
- ✓ noste ji společně s kojící podprsenkou
- ✓ navržena na míru i na funkčnost
- ✓ naprostá diskrétnost, pohodlí a komfort

KOMPATIBILNÍ S ODSÁVAČKAMI:



Freestyle™



Swing Maxi™



Součástí balení je kompletní sada pro tradiční odsávání

NEBO



Součástí balení je kompletní sada pro odsávání bez pomoci rukou

Nemocniční odsávačka mateřského mléka

Společnost Medela AG vytvořila špičkovou řadu produktů pro náročné prostředí nemocničních provozů. Mezi ně patří odsávačka Symphony PLUS, která poskytuje podporu matkám již v prvních dnech mateřství. Symphony PLUS je zabezpečena systémem proti vniknutí mléka do motoru, což zamezuje případné kontaminaci. Pouze tyto odsávačky mohou být používány více matkami a zapůjčeny do domácí péče. Každá matka, která používá nemocniční odsávačku, musí z hygienických důvodů používat vlastní odsávací soupravu, čímž je zabezpečena maximální hygiena a bezpečnost.

Symphony PLUS

K024.0301 (Pronájem Symphony PLUS)

K024.0006 (Prodej Symphony PLUS)

2-fázová, vysoce výkonná a účinná odsávačka určená pro odsávání z jednoho nebo obou prsů současně. Ideální v případě vysoké četnosti odsávání, samozřejmostí je možnost nastavení vakua. Představuje pro matky spojení účinnosti a přirozeného pocitu jako při kojení.



Vhodnost použití:

- ✓ pozdní nástup laktace (porod císařským řezem, protražovaný porod, předčasně narozené dítě)
- ✓ nedostatečná nebo snížená tvorba mléka
- ✓ bolestivé, poraněné bradavky

Volitelné příslušenství:

- ✓ odsávací souprava single
- ✓ odsávací souprava double
- ✓ vozík nebo kufr



TECHNICKÉ ÚDAJE ODSÁVAČKY:

Vakuum: nastavitelná úroveň
Hlučnost: max. 57dB
Provoz: síťový



TECHNICKÉ ÚDAJE PROGRAMU INITIATE:

Stimulace 1: -70/-200 mmHg, 120 cyklů/min
Stimulace 2: -70/-200 mmHg, 90 cyklů/min
Odsávací fáze: 100 - 250 mmHg, 34 - 54 cyklů/min a pauzy

TECHNICKÉ ÚDAJE PROGRAMU MAINTAIN:

Stimulační fáze: 50 - 120 mmHg, 100 cyklů/min
Odsávací fáze: 50 - 250 mmHg, 45 - 72 cyklů/min

PROGRAMOVÁ KARTA SYMPHONY PLUS

Karta je určena pro potřeby matek předčasně i v termínu narozených dětí.

Programová karta obsahuje:

- ✓ Program **INITIATE** pro zahájení tvorby mléka. Napodobuje vzor nepravidelného, rychlého sání a pauzy v termínu narozených dětí v prvních dnech laktace a podporuje na odsávačce závislé matky úspěšně iniciovat adekvátní produkci mléka.
- ✓ Program **MAINTAIN** pro budování a udržení tvorby mléka. 2-fázová technologie napodobuje sání dítěte, během ustálené laktace optimalizuje množství mléka a podporuje všechny matky při budování a udržení laktace.



Více informací najdete na www.medela.cz v části Zapůjčení odsávačky → Související soubory → Medela Symphony Almanach



Pronájem odsávaček

Medela vnímá potřeby matek a jejich dětí, snaží se svými produkty předcházet vzniku možných problémů, které mohou během kojení nastat. Proto se rozhodla nabídnout pomoc v situaci, kdy je kojení obtížné či zcela nemožné.

Symphony PLUS



Maminkám je možno zapůjčit do nemocniční nebo domácí péče pouze nemocniční elektrickou odsávačku Symphony, která je zabezpečena speciálním hygienickým systémem, který zamezuje vniknutí mléka do motoru a vylučuje tak přenos případné infekce a bakteriální nákazy. Jejich výkonné motory mohou pracovat 24 hodin denně a zaručují velmi dlouhou životnost odsávaček.

SYMPHONY, 2-FÁZOVÁ

✔ pro stimulaci tvorby mléka

Vhodnost použití nemocniční odsávačky je třeba předem konzultovat s odborníky - lékařem, porodní asistentkou, laktčním poradcem nebo zástupkyní firmy Medela.

UPOZORNĚNÍ: Osobní odsávačky nejsou určeny k zapůjčení, neboť nejsou konstrukčně stavěny k tak velké aktivitě odsávání a nedokáží zajistit maximální bezpečnost a hygienu, která je při kontaktu s mateřským mlékem nezbytná.

Rentální stanice

V ČR je vybudována rozsáhlá síť tzv. Rentálních stanic, kde maminky získají nejen odsávačku k zapůjčení, ale také najdou odbornou radu a pomoc. Dbáme na to, aby maminky získaly vždy správné informace a to od námi vyškolených profesionálů či odborníků. V Rentálních stanicích si maminky mohou současně zakoupit produkty značky Medela.

✔ Podmínkou zapůjčení je, aby si každá maminka zakoupila vlastní odsávací soupravu, která se z hygienických důvodů nezapůjčuje. Nejvhodnější soupravou je Odsávací souprava pro opakované použití.

DOPORUČENÍ: Odsávačku Symphony PLUS dokáže po jejím vrácení plnohodnotně nahradit pouze osobní elektrická 2-fázová odsávačka Freestyle™, která je určena pro každodenní časté odsávání většího množství mléka.

Seznam Rentálních stanic a více informací o rentálním systému najdete na www.medela.cz

Odsávací soupravy



SOUPRAVA PERSONALFIT™ PLUS SINGLE

K008.0427

- ✔ příslušenství k odsávačce Symphony PLUS
- ✔ souprava určená k odsávání z jednoho prsu (single)
- ✔ objem lahvičky 150 ml
- ✔ materiál polypropylen

BALENÍ OBSAHUJE:

Prsní nástavec M (24 mm)
Možnost zakoupit jinou velikost prsního nástavce



SOUPRAVA PERSONALFIT™ PLUS DOUBLE

K008.0434

- ✔ příslušenství k odsávačce Symphony PLUS
- ✔ souprava určená k odsávání z obou prsů současně (double)
- ✔ objem lahviček 150 ml
- ✔ materiál polypropylen

BALENÍ OBSAHUJE:

Prsní nástavec M (24 mm)
Možnost zakoupit jinou velikost prsního nástavce



SOUPRAVA PERSONALFIT™ PLUS NEMOCNIČNÍ


K008.0486 (prsní nástavec S - 21 mm)

K008.0465 (prsní nástavec M - 24 mm)

- ✔ určeno pro nemocniční provoz
- ✔ příslušenství k odsávačce Symphony PLUS
- ✔ souprava určená k odsávání z jednoho prsu (single)
- ✔ objem lahvičky 80 ml
- ✔ materiál polypropylen
- ✔ lze sterilizovat v autoklávu
- ✔ baleno v sáčku

VARIANTY

- S (prsní nástavec 21 mm)
- M (prsní nástavec 24 mm)

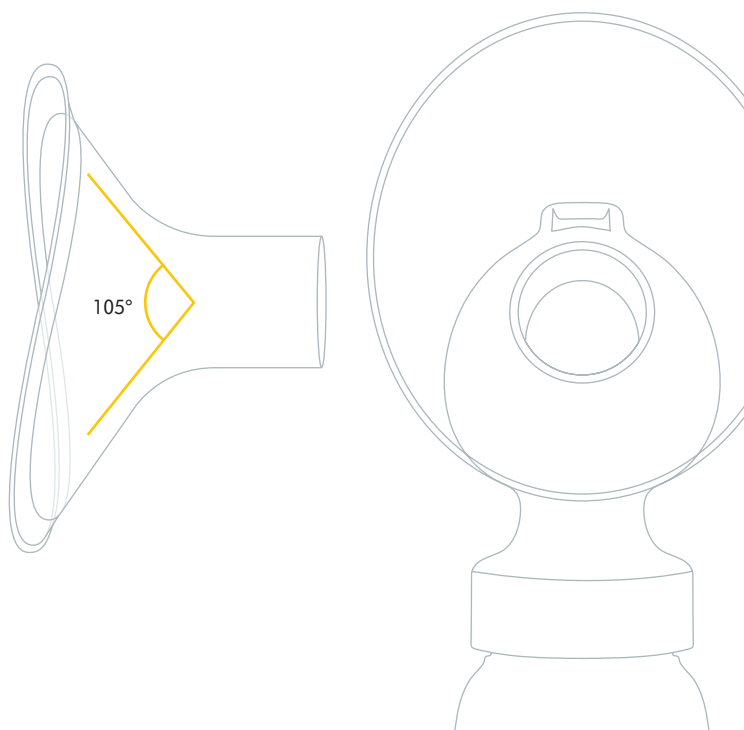

PersonalFit™ PLUS soupravy pro odsávačku Symphony PLUS

Více mléka. Více komfortu. Větší účinnost.



Odsávačka	Harmony™	Swing Flex™	Solo™	Solo™ Hands-free	Swing Maxi™ NEW	Swing Maxi™ NEW Hands-free™	Freestyle Hands-free™	Symphony Plus™
Typ	Manuální	Elektrická na jeden prs	Elektrická na jeden prs	Elektrická na jeden prs	Elektrická na dva prsy	Elektrická na dva prsy	Elektrická na dva prsy	Elektrická na dva prsy
Popis	Lehká a přenosná PersonalFit Flex™ prsní nástavec pro větší pohodlí a více mléka Snadné použití a čištění	Pro rychlé a efektivní odsávání, kdykoliv potřebujete Lehká a přenosná Snadné použití	Snadné použití, intuitivní ovládání Několik tlačítek, snadno se čistí Vestavěná dobíjecí baterie USB	Ideální pro multitasking Intuitivní ovládání Snadné použití a čištění - pouze 3 části	Vylepšená mobilita Snadné použití, intuitivní ovládání Vestavěná dobíjecí baterie USB	Snadné hands-free řešení pro dvojitě a jednoduché odsávání Ideální pro multitasking Anatomicky tvarovaná a velmi lehká pro větší pohodlí 3 díly, snadno se čistí	Skvělá mobilita s kompaktním a lehkým designem Vestavěná USB dobíjecí baterie a připojení k aplikaci Intuitivní dotyková obrazovka, multifunkční ovládací prvky	Určeno pro použití v nemocnici. Profesionální nemocniční zařízení, pro více uživatelů Je klinicky prokázáno, že zahajuje, buduje a udržuje laktaci Vhodné pro matky předčasně i v termínu narozených, zdravých i nemocných kojenčů
mmHg (vakuum) cykly za minutu (cpm)	Do -250 mmHg	-45 do -245 mmHg, 45 – 111 cpm	-45 do -245 mmHg, 45 – 111 cpm	-45 do -245 mmHg, 45 – 111 cpm	-45 do -245 mmHg, 45 – 111 cpm	-45 do -245 mmHg, 45 – 111 cpm	-45 do -245 mmHg, 45 – 111 cpm	-50 do -250 mmHg, 45 – 120 cpm
Počet stupňů intenzity vakua ve stimulační fázi	Nemá	11	9	9	9	9	9	16
Počet stupňů intenzity vakua v odsávací fázi	Nemá	11	9	9	9	9	9	16
Displej / Ovládací prvky	Ruční madlo	4 jednoduše použitelná tlačítka	4 jednoduše použitelná tlačítka, LED světelné indikátory	4 jednoduše použitelná tlačítka, LED světelné indikátory	4 jednoduše použitelná tlačítka, LED světelné indikátory	4 jednoduše použitelná tlačítka, LED světelné indikátory	Dotykový LED displej osvětlený časovač odsávacího cyklu, stav baterie, úroveň vakua, připojení Bluetooth® atd.	Otáčkový knoflík: odsávací program, časovač odsávacího cyklu, úroveň vakua atd.
Hlavní napájení	Nemá	Plug-in adaptér globální kompatibilita 100 - 240 V	USB (typ C), Plug-in adaptér globální kompatibilita 100 - 240 V	USB (typ C), Plug-in adaptér globální kompatibilita 100 - 240 V	USB (typ C), Plug-in adaptér globální kompatibilita 100 - 240 V	USB (typ C), Plug-in adaptér globální kompatibilita 100 - 240 V	USB (typ C), Plug-in adaptér globální kompatibilita 100 - 240 V	Sítový kabel pro globální použití kompatibilita 110 - 240 V
Bateriový provoz	Nemá	Vnitřní prostor na baterie (4 baterie AA, nejsou součástí balení)	Vestavěná USB dobíjecí baterie až na 6 odsávacích cyklů	Vestavěná USB dobíjecí baterie až na 6 odsávacích cyklů	Vestavěná USB dobíjecí baterie až na 6 odsávacích cyklů	Vestavěná USB dobíjecí baterie až na 6 odsávacích cyklů	Vestavěná USB dobíjecí baterie až na 8 odsávacích cyklů	Nemá
Prsní nástavec (k dispozici v balení)	24 mm PersonalFit Flex™	21 mm a 24 mm PersonalFit Flex™	24 mm PersonalFit Flex™	24 mm PersonalFit Hands-free™	2x 21 mm & 2x 24 mm PersonalFit Flex™	2x 21 mm & 2x 24 mm PersonalFit Hands-free™	2x 21 mm & 2x 24 mm PersonalFit Hands-free™	21 mm - 36 mm PersonalFit™ PLUS Několik velikostí je k dispozici jako součást vybraných odsávacích souprav Symphony. Lze koupit samostatně.
Nádoby na mateřské mléko (k dispozici v balení)	1 x 150 ml	1 x 150 ml	1 x 150 ml	1 x 150 ml	2 x 150 ml	2 x 150 ml	2 x 150 ml	Několik velikostí je k dispozici jako součást vybraných odsávacích souprav Symphony - prodávají se samostatně

Nová Flex technologie



Výhody Flex technologie



VÍCE MLÉKA

Po 15 minutách odsávání bylo získáno o 11 % více mléka



VÍCE POHODLÍ

Matky popsaly odsávání jako jemnější a přirozenější



VĚTŠÍ ÚČINNOST

Významné zlepšení v čištění, manipulaci a používání



105° úhel napomáhá lepšímu přizpůsobení pro lepší tok mléka



Ochrana před přetečením (uzavřený systém), abyste mohly odsávat v pohodlné poloze, která vám vyhovuje

Dostupné čtyři velikosti tunelu

Měkký, hladký, flexibilní lem

Oválný tvar se dá otočit o 360°

VĚDELI JSTE, ŽE ...?

...při optimalizaci toku mléka hraje klíčovou roli tvar prsního nástavce?

Medela přišla s výzkumem, který dokázal, že správně padnoucí prsní nástavec je nezbytný pro pohodlné efektivní odsávání. Kromě správného průměru tunelu je však důležitý i tvar trychtýře prsního nástavce, který se musí přizpůsobit tvaru prsu.

Medela podpořila průkopnický výzkum anatomie prsů, který odhalil, že mléčné kanálky jsou blíže k povrchu pokožky, než se doposud myslelo. Tradiční prsní nástavce s 90° úhlem rozevření mohou vyvíjet na svém okraji bodový tlak na mléčné kanálky, což potenciálně snižuje tok mléka. Rovněž ve většině případů špička bradavky nesažá do tunelu. Medela proto testovala větší úhly rozevření u prsních nástavců na databázi 3D skenů různých laktujících prsů a vědci našli optimální úhel 105°, který lépe odpovídá konturám skenovaných prsů bez ohledu na jejich tvar nebo velikost. Kromě toho je bradavka umístěna dále do tunelu, čímž se snižuje bodový tlak na okraji - tím je zajištěno pohodlnější odsávání a zároveň možnost lepšího toku mléka.



VŠECHNY ODSÁVAČKY A SOUPRAVY MEDELA JIŽ DISPONUJÍ NOVOU TECHNOLOGIÍ FLEX




Volba velikosti prsního nástavce

Ujistěte se, že používáte správnou velikost prsního nástavce. Nástavec je nezbytný pro účinné odsávání a pomáhá optimalizovat tok mléka.

Jak vybrat správnou velikost prsního nástavce Medela

Odsávání by nemělo být bolestivé. Pro maximální pohodlí a účinnost odsávání nabízí Medela pět velikostí prsních nástavců. Tento návod vám pomůže určit optimální velikost nástavce podle průměru vaší bradavky.

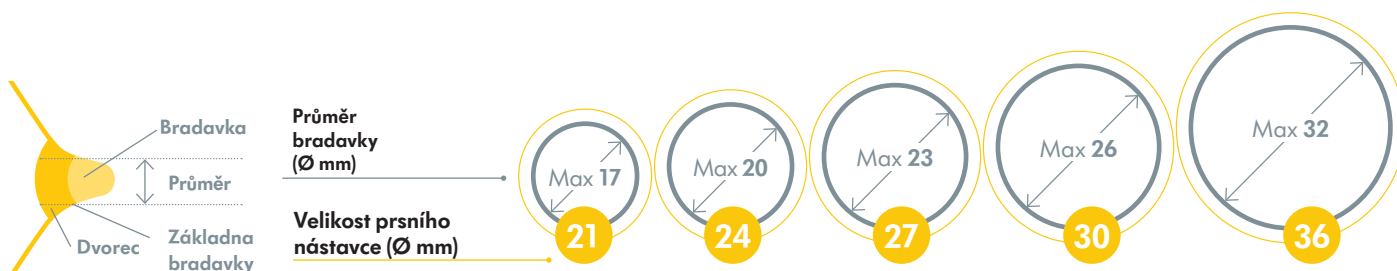

Krok 1

Pomocí pravítka nebo měřicí pásky změřte průměr vaší bradavky u základny (přes střed) v milimetrech (mm). Při měření vynechte prsní dvorec.


Krok 2

Podle změřeného průměru určete svou velikost prsního nástavce Medela. Příklad: Pokud je průměr vaší bradavky 16 mm, pak doporučená velikost prsního nástavce Medela je 21 mm.


PersonalFit Flex™ není k dispozici ve velikosti 36mm

VYZKOUŠEJTE VELIKOST PRSNÍHO NÁSTAVCE


- Nejprve vyzkoušejte prsní nástavec dodaný s odsávačkou nebo použijte nástavec vybraný podle změřeného průměru bradavky.
- Umístěte bradavku do středu tunelu a jemně přidržte prsní nástavec na prsu.
- Nastavte maximálně pohodlný podtlak pro dosažení optimální úrovně sání.
- Při odsávání v odsávací fázi (po stimulační fázi) postupujte podle obrázků níže.

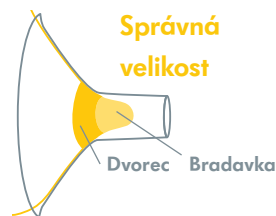

- Bradavka je umístěna ve středu tunelu nástavce a pohybuje se volně.

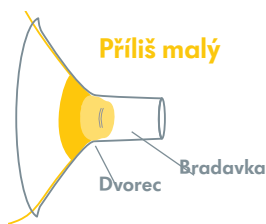

- Bradavka se odírá o strany tunelu prsního nástavce.
- Vyzkoušejte větší velikost.

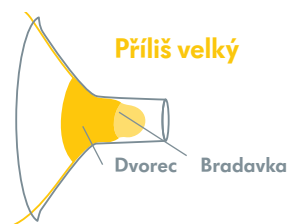

- Bradavka a nadměrná část prsního dvorce jsou vtahovány do tunelu prsního nástavce.
- Vyzkoušejte menší velikost.

VĚDĚLI JSTE, ŽE ...

- Možná budete potřebovat na každý prs jinou velikost prsního nástavce.
- Velikost prsního nástavce závisí na prsní tkáni a elasticitě kůže.
- Velikost prsního nástavce se po určité době používání odsávačky může změnit.
- Při odsávání se působením vakua může změnit velikost vaší bradavky.
- Přílišným přitlačením nástavce na prs se mohou zablokovat mlékovody.

DŮVODY PRO VYZKOUŠENÍ JINÉ VELIKOSTI PRSNÍHO NÁSTAVCE

- Odírá se vaše bradavka o strany tunelu prsního nástavce natolik, že je vám to nepříjemné?
- Vidíte, že je nadměrná část dvorce vtahovaná do tunelu prsního nástavce?
- Vidíte nějaké zčervenání?
- Cítíte v prsu po odsávání neodsáté mléko?

Pokud jste na některou z otázek odpověděla „ANO“, zvažte vyzkoušení jiné velikosti podle výše uvedených pokynů. V případě, že si stále nejste jistá, zda jste zvolila správnou velikost, poraďte se s laktiční poradkyní nebo specialistou v oblasti kojení.

Sběr mateřského mléka

Skladování a zmrazování mateřského mléka



Medela láhve byly navrženy pro bezpečné, dlouhodobé skladování mateřského mléka bez ztráty jeho výjimečných vlastností. Jsou vyrobeny z bezpečného materiálu - polypropylenu, jehož samozřejmostí je absence škodlivé látky Bisphenolu-A. Velkou výhodou je jejich kompatibilita se všemi odsávkami Medela. Samozřejmostí je značení objemu pomocí barevných měrek.



SADA 2 KS LAHVÍ, OBJEM 250 ml

K008.0075

- ✓ odolné proti nárazu
- ✓ vhodné pro denní slévání velkého přebytku mléka

BALENÍ OBSAHUJE:

2 ks Láhev 250 ml
2 ks Šroubovací uzávěr
2 ks Víčko



SADA 3 KS LAHVÍ, OBJEM 150 ml

K008.0073

- ✓ odolné proti nárazu
- ✓ vhodné pro denní slévání malého přebytku mléka

BALENÍ OBSAHUJE:

3 ks Láhev 150 ml
3 ks Šroubovací uzávěr
3 ks Víčko



SÁČKY NA SKLADOVÁNÍ MLÉKA EASY POUR

K101046327 (balení 25 ks)

K101046334 (balení 50 ks)

- ✓ snadné nalévání a vylévání jednou rukou - díky patentovaným otvorům nedochází k rozlití ani křížové kontaminaci
- ✓ chrání živiny mateřského mléka díky extra silnému materiálu
- ✓ dokonalé utěsnění díky jednoduchému dvojitému zipovému zavírání
- ✓ sáčky lze pro snadnou manipulaci postavit a při skladování položit naplocho

VARIANTY

- balení 25 ks
- balení 50 ks

DOPORUČENÍ:

- Pro skladování mateřského mléka
- lahvičky či sáčky označte datem uložení
 - naplňte do max. ¾ objemu
 - po rozmrazení mléka obsah jemně krouživým pohybem promíchejte
 - neohřívejte rozmrazené mléko v mikrovlnné troubě, pouze v teplé vodě pro zachování složek mléka

* Velmi čisté podmínky znamenají přísné dodržování pokynů v souladu s článkem, který pojednává o čištění a dezinfekci odsávky mateřského mléka. Tyto pokyny pro skladování a rozmrazování mateřského mléka jsou doporučením – další informace získáte u svého laktačního poradce.

Místo skladování	Teplota v místnosti 16 °C až 25 °C	Lednice 4 °C nebo chladnější	Mrazák -18 °C nebo chladnější	Zmrazené mateřské mléko rozmražené v lednici
Doba bezpečného skladování	Nejlépe do 4 hodin Do 6 hodin u mléka odstříkaného ve velmi čistých podmínkách*	Nejlépe do 3 dnů Do 5 dní u mléka odstříkaného ve velmi čistých podmínkách*	Nejlépe do 6 měsíců Do 9 měsíců u mléka odstříkaného ve velmi čistých podmínkách*	Do 2 hodin při pokojové teplotě Do 24 hodin v lednici Opětovně nezamrazovat

Zdroj: Eglash, A., Simon, L., & The Academy of Breastfeeding Medicine. ABM clinical protocol #8: human milk storage information for home use for full-term infants, revised 2017. Breastfeed Med 12, (2017).

Sběr mateřského mléka



Láhve



Pro sběr mateřského mléka je možno použít jak pomůcky jednorázové, tak pro opakované použití. V nemocničním provozu je kladen důraz na maximální hygienu a pro jejich účel jsou určeny pomůcky, které lze sterilizovat / autoklávat až na 134 °C.

Vhodné
pro použití
v nemocnici



LÁHEV NA KOLOSTRUM S VÍČKEM, JEDNORÁZOVÁ

K200.2110

- ✓ objem 35 ml
- ✓ sterilní
- ✓ určena pro odsávání mleziva nebo malého množství mateřského mléka
- ✓ speciální kónické dno usnadňuje odběr mleziva do injekční stříkačky a minimalizuje jeho ztrátu
- ✓ menší velikost a tvar lahvičky je pro maminky motivující, neboť jim poskytují reálnou představu množství vytvořeného mleziva v prvních dnech po porodu
- ✓ možnost opakovaného použití u jedné maminky v průběhu 24 hodin
- ✓ čištění běžnou desinfekcí
- ✓ v balení 2 ks



LÁHEV S VÍČKEM, JEDNORÁZOVÁ

K008.0297 (80 ml - 1 ks)

K008.0304 (150 ml - 1 ks)

- ✓ objem 80 ml a 150 ml
- ✓ sterilní a hygienicky čisté
- ✓ vhodné pro pasterizaci mléka
- ✓ snižuje riziko bakteriální nákazy
- ✓ minimalizuje ztráty odsátého mateřského mléka vznikající při přelévání
- ✓ materiál: nárazuvzdorný polypropylen testovaný k uchování potravin
- ✓ četnost použití: max. 24 hodin nebo 8 odsávacích cyklů
- ✓ určeno pro použití pouze jednou maminkou



LÁHVE S VÍČKEM, JEDNORÁZOVÉ

K200.2957 (80 ml - 40 ks)

K200.2956 (150 ml - 40 ks)

K200.4802 (250 ml - 40 ks)

- ✓ objem 80 ml, 150 ml a 250 ml
- ✓ sterilní a hygienicky čisté Ready-to-Use
- ✓ vhodné pro pasterizaci mléka
- ✓ snižuje riziko bakteriální nákazy
- ✓ minimalizuje ztráty odsátého mateřského mléka vznikající při přelévání
- ✓ materiál: nárazuvzdorný polypropylen testovaný k uchování potravin
- ✓ četnost použití: max. 24 hodin nebo 8 odsávacích cyklů
- ✓ určeno pro použití pouze jednou maminkou



Péče o mateřské mléko



Přeprava a sterilizace

Na pomůcky pro opakované použití se vztahují přísné hygienické normy, neboť přichází do kontaktu s mateřským mlékem. Z uvedeného důvodu musí být alespoň 1x denně sterilizovány nejméně na 100 °C, aby se zabránilo vzniku bakterií a přenosu infekce. V případě použití jedné pomůcky více maminkami musí být sterilizovány po každém použití.



CHLADICÍ TAŠKA

K200.1756

- ✓ vhodná pro přepravu a uchování odsátého mateřského mléka
- ✓ izolační vrstva v tašce uchová mléko déle chladné

BALENÍ OBSAHUJE:

4 ks Láhev 150 ml
4 ks Šroubovací uzávěr
4 ks Víčko
1 ks Chladící médium



QUICK CLEAN™

K008.0065 (balení 5 ks)

K008.0066 (balení 20 ks)

- ✓ sterilizační sáčky do mikrovlnné trouby
- ✓ rychlá dezinfekce v páře během 3 min
- ✓ pomocí páry zničí 99,9 % všech běžných bakterií bez použití chemických látek
- ✓ bezpečné, rychlé a praktické řešení vhodné domů i na cesty
- ✓ každý sáček na 20 použití

VARIANTY

- balení 5 ks
- balení 20 ks



Ohřev mateřského mléka



Teplota má významný vliv nejen na citlivé složky mateřského mléka, ale také na křehkou konstituci nedonošeného dítěte. Šetrné ohřívání je klíčem k udržení všech důležitých živých bioaktivních a nepostradatelných složek mateřského mléka neporušených tak, aby se co nejvíce blížily čerstvému mateřskému mléku. Standardizované, bezpečné a snadno použitelné zařízení patří do základního vybavení všech novorozeneckých JIP či porodnic. Zabezpečí mléku požadovanou teplotu.

Vhodné
pro použití
v nemocnici



OHŘÍVAČ CALESCA

K020.0000

- ✓ šetrný a bezpečný suchý ohřev
- ✓ zajistí správnou teplotu pro ohřev mléka a chrání tak živiny i vitamíny nejen v mateřském mléce
- ✓ suchý ohřev eliminuje riziko kontaminace
- ✓ rozmrazení malých dávek mléka v krátkém čase
- ✓ jednorázové vložky brání křížové kontaminaci a přenosu infekcí mezi pacienty
- ✓ jednoduchá obsluha a nenáročná údržba
- ✓ je zaměřena na teploty od 30 °C do 38 °C, což jsou teploty matčiny bradavky a dvorce a optimální pro chuť



HYGIENICKÉ VLOŽKY CALESCA

K020.0002

- ✓ zajistí maximální hygienu
- ✓ zabrání možné křížové kontaminaci

Hygienické vložky se vkládají do ohříváče Caleasca. Do hygienické vložky je možné vložit všechny Medela láhve a většinu nádob do 250 ml, stejně jako stříkačky 1 ml - 60 ml.

Podávání mateřského mléka



System pro kojené děti Calma



Pozorovala jste někdy Vaše dítě, jak saje z prsu? Víte, jaké úsilí musí vyvinout, aby se dostatečně napilo? Pro nás dospělé je příjem potravy automatickou činností. Pro dítě představuje krmení náročnou kombinaci sání, polykání, dýchání a odpočinku dle jeho individuálního rytmu. Dítě si řídí příjem potravy dle svých možností a potřeb. Příroda nám nabízí jedinečný vzor. Ve snaze o hlubší pochopení vzájemného vztahu matky a dítěte při kojení a ve spojení s odbornými znalostmi byl společností Medela AG vyvinut nový jedinečný způsob podávání mléka kojeným dětem.

CALMA

- ✓ udržuje naučený přirozený způsob sání
- ✓ speciální membrána s ventilem zabraňuje samovolnému toku mléka, dítě musí sát, aby mléko z láhve vytékalo
- ✓ umožňuje dítěti pít, dýchat a odpočívat zcela podle jeho vlastního rytmu
- ✓ možnost odpočinku při krmení přináší dítěti pocit klidu, takže frekvence dýchání a srdeční rytmus jsou shodné jako při kojení
- ✓ uvedené faktory mají vliv na dostatečné oxysličení krve
- ✓ jedinečný systém ventilace odvádí přebytečný vzduch z láhve
- ✓ snadná údržba, hygienické použití na cestách



CALMA – PRO KOJENÉ DĚTI

- ✓ Calma – láhev pro kojené děti (komplet), 150 ml
K008.0124
- ✓ Calma – láhev pro kojené děti (komplet), 250 ml
K008.0188
- ✓ Calma – systém pro kojené děti (bez láhve)
K008.0139

TEST CALMA

Čím se liší Calma od ostatních lahví s dudlíkem?

Nalejte do láhve Calma vlažnou vodu (34-37 °C), našroubujte Calma systém, otočte ji 2x za sebou dnem vzhůru (do úhlu 65°), zmáčkněte dvěma prsty savičku. Mléko nevytéká, může lehce ukápnout. Máte v ruce láhev Calma pro kojené děti, která samovolně neteče.

Důvod: Na membránu s ventilem působí podtlak, který vytváří dítě při sání.

UŽITEČNÉ RADY

- po každém použití oddělte jednotlivé díly a omyjte v horké jarové vodě, následně vypláchněte čistou vodou, sterilizujte pouze 1x denně
- postup krmení z Calmy je obdobný jako při kojení (dítě drží v ústech nejen bradavku, ale i část dvorce)
- mléko v lahvičce ohřívejte bez našroubovaného systému Calma, po ohřevu obsah protřepejte pouze s uzávěrem, poté našroubujte systém Calma
- více informací naleznete v návodu, případně na www.medela.cz



LÁHEV S DUDLÍKEM 150 ML

K200.2271

- ✓ univerzální – ideální pro odsávání, skladování, zamrazování a krmení mateřským mlékem
- ✓ použijte jednu stejnou lahvičku na skladování a krmení – nedojde k úbytku vzácného mateřského mléka
- ✓ snadná údržba
- ✓ odolné – při pádu neprasknou ani se neroztříští
- ✓ bezpečný materiál pro Vás i Vaše dítě – bez BPA

DUDLÍK K LÁHVI

K200.1936 (velikost S)
K200.1934 (velikost M)

- ✓ v balení 2 ks

VARIANTY

- S (0+)
- M (3+)

DUDLÍK K LÁHVI JEDNORÁZOVÝ

K200.3201 (velikost S)
K200.3200 (velikost M)

- ✓ vhodné pro použití v nemocnici
- ✓ možnost výběru mezi malým a středním průtokem
- ✓ baleny jednotlivě po jednom kuse
- ✓ není třeba čistit před prvním použitím
- ✓ připraveny pro okamžité použití
- ✓ pouze na jedno použití
- ✓ bez TPE, latexu a BPA
- ✓ krabice obsahuje 100 ks
- ✓ jednorázové produkty optimalizují nemocniční procesy
- ✓ podpora hygienické péče

VARIANTY

- S (0+) menší průtok
- M (3+) větší průtok



TĚHOTENSKÝ A KOJICÍ POLŠTÁŘ

K101035260

- ✓ podpora pro pohodlný odpočinek v těhotenství s bříškem
- ✓ pomocník při kojení
- ✓ opora během odsávání
- ✓ nedráždivý a antialergenní
- ✓ tichá výplň pro nerušený odpočinek

Podávání mateřského mléka

Alternativní pomůcky



Přirozené kojení není bohužel možné ve všech případech. Děti, které nemohou být kojeny, potřebují mateřské mléko a podporu, aby byly schopny získat potřebné množství důležitých nutričních hodnot. Podpora těchto dětí je jedním z rozhodnutí, ke kterému se společnost Medela AG zavázala. Jako přední výrobce na našem trhu nabízí pomůcky pro alternativní způsob podávání mateřského mléka.

Vhodné
pro použití
v nemocnici



FINGER

K008.0027

- ✓ jemný silikonový nástavec na injekční stříkačku
- ✓ určen pro podávání malého množství mateřského mléka
- ✓ pro opakované použití
- ✓ sterilizace až na 134 °C
- ✓ určeno pro krátkodobé podávání mléka



BABYCUP

K800.0507

- ✓ ideální pro podávání mateřského mléka, formule, případně léků
- ✓ jednoduché použití
- ✓ objem 30 ml

	Finger	Babycup	Suplementor	SpecialNeeds	Calma
Předčasně narozené děti / slabé děti	✓	✓	✓	○	
Alternativa krmení z láhve		○	✓		✓
Trénink sání			✓		✓
Rozštěp rtu / patra	○	○	○	✓	
Neurologické postižení (např. Downův syndrom)	✓	○		✓	
Stimulace tvorby mléka			✓		
Podávání léků	✓	✓			
Krmení adoptovaného dítěte			✓		

Vysvětlivky:
✓ doporučené
○ náhradní varianta



SUPLEMENTOR

K101043649

- ✔ při krmení umožňuje přímý kontakt mezi matkou a dítětem
- ✔ lze jej použít, pokud je potřeba přidat do mateřského mléka také doplňkovou výživu
- ✔ podporuje zvýšení laktace
- ✔ nabízí možnost kontroly množství podávaného mateřského mléka
- ✔ učí dítě správně sát díky vytváření vakua přímo u prsu
- ✔ zkracuje dobu krmení, snadné čištění
- ✔ vhodný pro spavé děti, děti s nízkou



LÁHEV SPECIALNEEDS

K101046039

- ✔ určen pro děti s rozštěpem (rtu a patra) nebo s jinými sacími problémy
- ✔ nastavitelný průtok dle potřeby dítěte
- ✔ speciální ventil zabraňuje zahlcení dítěte při krmení a polykání přebytečného vzduchu
- ✔ možnost doobjednání Mini dudlíku pro předčasně narozené děti
- ✔ objem 150 ml



DUDLÍK SPECIALNEEDS™ NÁHRADNÍ

K800.0452

DUDLÍK SPECIALNEEDS™ MINI

K800.0080

BALENÍ OBSAHUJE:

- 1 ks Láhev 150 ml (plastová bez BPA)
- 1 ks Víčko TwistLok
- 1 ks Víčko láhve
- 1 ks Svorka pro regulaci toku mléka
- 1 ks Hadička TwistLok
- 1 ks Klip
- 1 ks Kroužek
- 1 ks Čistící pomůcka


BALENÍ OBSAHUJE:

- 1 ks Láhev 150 ml
- 1 ks Šroubovací uzávěr, SpecialNeeds
- 1 ks Ventil, SpecialNeeds
- 1 ks Membrána, SpecialNeeds
- 1 ks Dudlík, SpecialNeeds

Těhotenské a kojící prádlo



Medela prádlo přináší pocit lehkosti a jemnosti, zatímco poskytuje podporu prsům nebo břichu. Speciální strečový prodyšný materiál umožňuje maximální pohodlí. Bezešvé provedení a zpevněné části v zátěžových místech zaručují vysokou kvalitu. Prádlo je vyrobeno z kvalitního strečového materiálu, který se přizpůsobí měnícím se tvarům ženy.

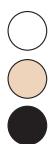


NOČNÍ PODPRSENKA KEEP COOL

- ✓ překřížený design
- ✓ sportovní střih na zádech
- ✓ jemný a prodyšný materiál
- ✓ materiál hlavní části: 95 % nylon, 5 % elastan
- ✓ materiál spodního pásu: 92 % nylon, 8 % elastan
- ✓ velikost: S, M, L, XL, XXL



KOJÍCÍ PODPRSENKA KEEP COOL

- ✓ lehké zadní zapínání na háčky
- ✓ nastavitelná ramínka
- ✓ košíček lze rozepnout jednou rukou
- ✓ materiál hlavní části: 92 % nylon, 8 % elastan
- ✓ materiál spodního pásu: 89 % nylon, 11 % elastan
- ✓ velikost: S, M, L, XL, XXL

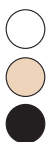


ULTRA PODPRSENKA KEEP COOL

- ✓ lehké zadní zapínání na háčky
- ✓ nastavitelná ramínka
- ✓ košíček lze rozepnout jednou rukou
- ✓ vyjímatelné výztuže
- ✓ materiál hlavní části: 86 % nylon, 14 % elastan
- ✓ pěnová výztuž: 100 % polyuretan
- ✓ velikost: S, M, L, XL, XXL



PODPRSENKA 3v1 PRO KOJENÍ A ODSÁVÁNÍ

- ✓ středně vysoká až vysoká opora
- ✓ odsávání bez pomoci rukou
- ✓ perforované pěnové vycpávky
- ✓ materiál s technologií Adaptive Stretch™
- ✓ materiál: 94 % nylon, 6 % elastan
- ✓ lze prát v pračce až na 60 °C
- ✓ velikost: S, M, L, XL, XXL

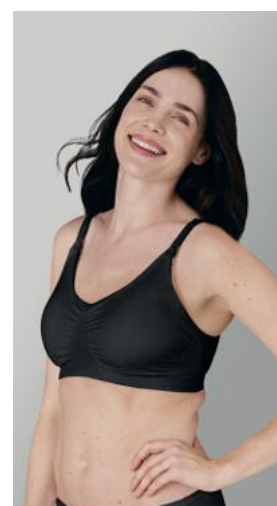

VÝBĚR VHODNÉ VELIKOSTI PODPRSENKY DLE VELIKOSTNÍ TABULKY

Rozdíl mezi obvodem měřeným přes prsy a pod prsy:

- 10-12 cm košíček A
- 12-14 cm košíček B
- 14-16 cm košíček C
- 16-18 cm košíček D

PŘÍKLAD

Pokud je obvod přes prsy 99 cm a obvod pod prsy 85 cm, rozdíl je $99 - 85 = 14$. Velikost 14 odpovídá dle tabulky košíčku B. Vaše velikost je tedy 85 B, což představuje velikost M.

OBVOD POD PRSY

UK/AU			B	C	D	DD	E	F
	EU	FR/ES	B	C	D	E	F	G
32	70	85		S	S	M	M	
34	75	90	S	S	M	M	L	L
36	80	95	S	M	M	L	L	L
38	85	100	M	M	L	L	XL	XL
40	90	105		L	L	XL	XL	XL
42	95	110		XL	XL	XL	XXL	XXL
44	100	115		XL	XL	XXL	XXL	XXL
46	105	120		XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
48	110	125		XXL	XXL	XXL		



Hands-free™ Pás pro snadné odsávání

Jedinečné řešení firmy Medela - speciální pás přináší ženám větší volnost při odsávání. Odsávání je možné bez pomoci rukou. Do pásu lze uchytit jakoukoliv odsávací soupravu Medela pro jeden nebo dva prsy. Je kompatibilní se všemi odsávačkami Medela.



UK/AU			B	C	D	DD	E	F	FF	G	GG	H
	EU	FR/ES	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
32	70	85	S	S	S	S	S	M	M	M		
34	75	90	S	S	S	S	M	M	M	M		
36	80	95	S	M	M	M	M	M	L	L	L	XL
38	85	100	M	M	M	M	L	L	L	L	XL	XL
40	90	105	L	L	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL
42	95	110	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	
44	100	115	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL		

PÁS PRO SNADNÉ ODSÁVÁNÍ

- ✔ jednoduché zapínání na zip
- ✔ diskretní design – zakryté bradavky
- ✔ materiál: 93 % Bavlna, 7 % Elastan
- ✔ velikost: S, M, L, XL

VÝBĚR VHODNÉ VELIKOSTI PÁSU PRO ODSÁVÁNÍ

Rozdíl mezi obvodem měřeným přes prsy a pod prsy:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 10-12 cm košíček A | 18-20 cm košíček DD / E |
| 12-14 cm košíček B | 20-22 cm košíček F |
| 14-16 cm košíček C | 22-24 cm košíček G |
| 16-18 cm košíček D | 24-26 cm košíček H |

PŘÍKLAD

Pokud je obvod přes prsy 99 cm a obvod pod prsy 85 cm, rozdíl je $99 - 85 = 14$. Velikost 14 odpovídá dle tabulky košíčku B. Vaše velikost je tedy 85 B, což představuje velikost M.

Těhotenský břišní pás - doprodej



TĚHOTENSKÝ BŘIŠNÍ PÁS

- ✔ přizpůsobuje se velikosti břicha bez ztráty tvaru pásu
- ✔ zesílená boční část zaručuje podporu břicha a bederní páteře
- ✔ materiál: 91 % Polyamid, 9 % Elastan
- ✔ velikost: S, M, L, XL


VELIKOST						
Míry boků	cm	palce	S	M	L	XL
80	31-34		S			
90	35-37		S	M		
100	37-40		S	M	L	
110	41-44			M	L	XL
120	45-47				L	XL
130	48-51					XL





Víme, že matka i dítě si navzájem dávají lásku, podporu a štěstí. Chceme pomáhat pěstovat a prohlubovat toto jedinečné láskyplné pouto. Aby mezi vás a vaše dítě nevstoupilo nic jiného než láska.

Jak vypadá ideální dudlík?

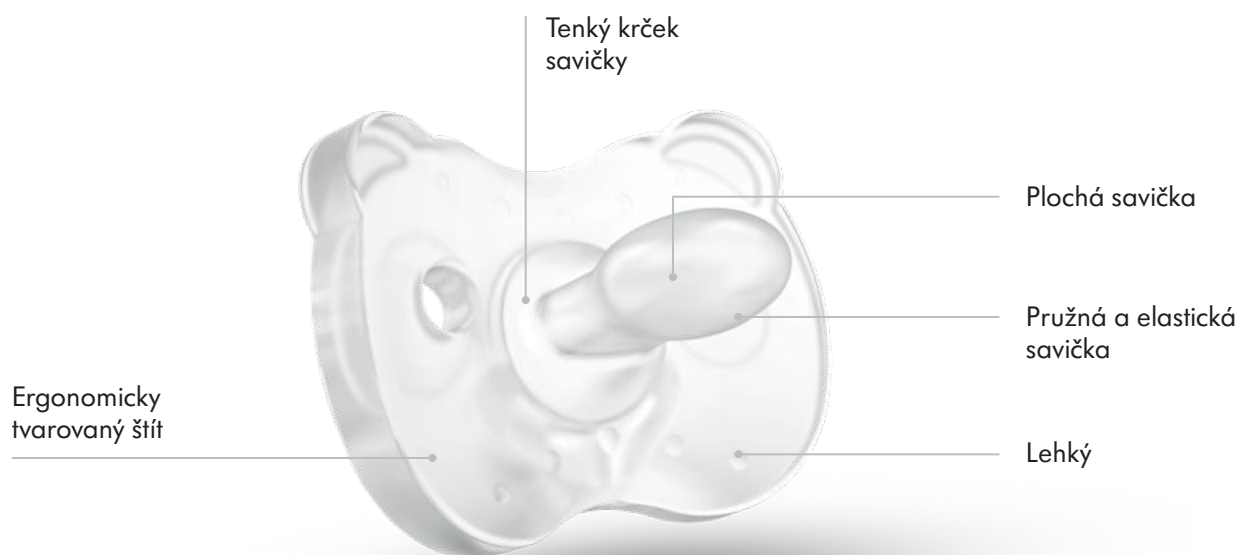

Logopedové doporučují, aby byly do designu dudlíku začleněny následující požadavky, které pomohou podporovat přirozený pohyb orofaciálních svalů:

- ✓ Tenký krček savičky, který minimalizuje prostor mezi horní a dolní čelistí.
- ✓ Plochá savička, která zabírá méně místa v ústech a umožňuje větší pohyb jazyka.
- ✓ Pružná a elastická savička, která umožňuje další pohyb jazyka.
- ✓ Lehká struktura, která minimalizuje práci obličejových svalů.
- ✓ Ergonomický štít, který pomáhá dudlíku přizpůsobit se konturám obličeje a zabraňuje otlakům.

Jak může dudlík pomoci mému dítěti?

Dudlík dokáže...

- ✓ uspokojit přirozenou potřebu dítěte po sání poté, co bylo nakrmeno, ale stále chce sát.
- ✓ pomoci uklidnit a uvolnit dítě, když jiné pokusy selhaly.
- ✓ pomoci snížit pocity bolesti u dětí, například během očkování nebo při odběru krve.
- ✓ zajistit další procvičování orofaciálních svalů, čímž podpoří vývoj dutiny ústní.
- ✓ může být nabízen v době spánku a pomoci tak snížit riziko syndromu náhlého úmrtí.





MĚKKÝ CELOSILIKONOVÝ DUDLÍK

K101042513 (Boy 0-6 m)
K101042519 (Boy 6-18 m)
K101042516 (Girl 0-6 m)
K101042523 (Girl 6-18 m)

- vyvinuto ve spolupráci s odborníky
- pružná, lehká a ortodontická savička s tenkým krčkem
- ergonomický štít, který napomáhá přirozenému dýchání
- sterilizační krabička v balení pro snadné čištění a přepravu



DUDLÍK NEWBORN

K101042498

- speciálně navržen pro novorozence
- vhodný na použití během prvních dvou měsíců
- ventilační otvory umožňují dětské pokožce dýchat
- mimořádně malý ergonomický štít
- dudlík bez kroužku, díky čemu se dítě méně rozptyluje
- obzvlášť lehký dudlík
- sterilizační krabička v balení pro snadné čištění a přepravu



DUDLÍK UNISEX

K101042608 (0-6 m)
K101042613 (6-18 m)

- vyvinuto ve spolupráci s odborníky
- ventilační otvory umožňují dětské pokožce dýchat
- pružná, lehká a ortodontická savička s tenkým krčkem
- ochranný kryt pro bezpečnou a hygienickou přepravu



DUDLÍK DAY&NIGHT






K101042527 (0-6 m)
K101042532 (6-18 m)

- knoflík svítící ve tmě
- ventilační otvory pro jemnější pocit na pokožce
- pružná, lehká a ortodontická savička s tenkým krčkem
- ochranný kryt pro bezpečnou a hygienickou přepravu






Náhradní díly

NÁHRADNÍ DÍLY UNIVERZÁLNÍ



KÓD	NÁZEV	
K800.0627	Šroubovací uzávěr	
K800.0628	Víčko láhve	
K800.0724	2 ventily včetně 6 membrán	
K800.0630	Stojánek na láhev	
K101036007	Hadice PVC, Freestyle • Koncovka do motoru ve tvaru O	

MANUÁLNÍ ODSÁVAČKA HARMONY



KÓD	NÁZEV	
K099.0260	Těsnící podložka madla vč. O-kroužku	
K101037027	O-kroužek	
K800.0671	Madlo (bez těsnící podložky)	

PRSNÍ NÁSTAVCE PERSONALFIT™ PLUS (1 KS)

PRSNÍ NÁSTAVCE PERSONALFIT FLEX™ (2 KS)

K008.0467	PersonalFit™ PLUS - prsní nástavec S, vel. 21 mm		K101041859	PersonalFit – prsní nástavec S, vel. 21 mm	
K008.0468	PersonalFit™ PLUS - prsní nástavec M, vel. 24 mm		K101033860	PersonalFit – prsní nástavec M, vel. 24 mm	
K008.0469	PersonalFit™ PLUS - prsní nástavec L, vel. 27 mm		K101033861	PersonalFit – prsní nástavec L, vel. 27 mm	
K008.0470	PersonalFit™ PLUS - prsní nástavec XL, vel. 30 mm		K101034862	PersonalFit – prsní nástavec XL, vel. 30 mm	
K008.0471	PersonalFit™ PLUS - prsní nástavec XXL, vel. 36 mm				

2-FÁZOVÁ ELEKTRICKÁ ODSÁVAČKA SOLO™


KÓD	NÁZEV		KÓD	NÁZEV	
K101041900	2x Konektor PersonalFit Flex™		K101041910	Hadice Solo™	

2-FÁZOVÁ ELEKTRICKÁ ODSÁVAČKA SWING MAXI™ NEW A FREESTYLE FLEX™





K101041900	2x Konektor PersonalFit Flex™		K101041916	Hadice Swing Maxi™ NEW a Freestyle Flex™	
------------	-------------------------------	---	------------	--	---

NÁHRADNÍ DÍLY PRO ODSÁVAČKY FLEX™

SWING FLEX™





K101034002	Hadice Swing Flex™	
K101041900	2x Konektor PersonalFit Flex™	

NÁHRADNÍ DÍLY HANDS-FREE™



KÓD	NÁZEV	
K101045060	Membrána	
K101046305	Hadice single	
K101046086	Hadice double	
K101046086	2x Prsní nástavec S, vel. 21 mm	
K101045050	2x Prsní nástavec M, vel. 24 mm	
K101045055	2x Prsní nástavec L, vel. 27 mm	

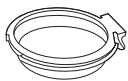Náhradní díly

NOVÉ ODSÁVACÍ SOUPRAVY PERSONALFIT™ PLUS

KÓD	NÁZEV	
K008.0472 (1 ks)	Membrána PersonalFit™ PLUS	
K008.0474 (1 ks)	Kryt membrány PersonalFit™ PLUS	
K008.0473 (1 ks)	Hadice PersonalFit™ PLUS	
K008.0466 (1 ks)	Konektor PersonalFit™ PLUS k Symphony	

NÁHRADNÍ DÍLY KRMENÍ

K800.0452 (1 ks) K101046123 (3 ks)	Dudlík SpecialNeeds (délka savičky 33 mm)	
K008.0080	Dudlík SpecialNeeds Mini (délka savičky 27 mm)	

Značky a symboly



2-fázová technologie

Program MAINTAIN s technologií 2-Phase Expression je založen na dvoufázovém vzorci sání narozeného dítěte během zavedené laktace pro optimalizaci produkce mléka a pro podporu matek při budování a udržování laktace.



Technologie Initiation

Program INITIATE s iniciační technologií Medela napodobuje nepravidelný a rychlejší vzorec sání a přestávek u novorozence v prvních dnech laktace.



Odsávání z obou prsů současně

Dvojitě odsávání umožní odsát až o 18 % více mléka s vyšším energetickým obsahem, šetří čas a pomáhá navyšovat laktaci.



Autokláv

Autoklávatelné (při 134 °C / 5 minut)



Medela plně podporuje doporučení

Světové zdravotnické organizace ohledně délky kojení

Další informace o doporučeních Světové zdravotnické organizace ohledně délky kojení naleznete na stránkách www.medela.cz/who



Balení obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii



Bluetooth připojení

Lze připojit k aplikaci Medela Family díky Bluetooth připojení. Více informací najdete na www.medela.cz



Pevná přísavná základna



Vhodné na cesty a do tašky



BPA free

Medela pomůcky, které přichází do kontaktu s mateřským mlékem, neobsahují zdraví škodlivý Bisphenol-A.



Anatomický design



BPA a BPS free



Ergonomický štít

Snižuje riziko zarudnutí a podráždění pokožky pro jemnější pocit na pokožce.



3 min sterilizační box

V balení pro snadné čištění a přepravu.



Ortodontické



Savička s tenkým krčkem

Je plochá, pružná, symetrická a ortodontická.



Ventilační otvory

Umožňuje dětské pokožce dýchat pro jemnější pocit na pokožce.



Savička pro novorozence

Savička je speciálně navržena pro první dva měsíce použití, pro raný vývoj svalů jazyka.



Ochranný kryt

Pro hygienickou a bezpečnou přepravu.



Vysoká přijatelnost

9 z 10 dětí jej miluje.



Knoflík svítící ve tmě

Snadno se hledá ve tmě.



SENSPEARLS™

Snižuje riziko zarudnutí a podráždění pokožky.



Lehké a pohodlné

Výrobce:

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Switzerland

Autorizovaný distributor a servisní středisko pro Českou republiku

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a
612 00 Brno
+420 532 198 888
www.dnformed.cz
dnformed@dnformed.cz
www.medela.cz
medela@medela.cz

 Medela SK&CZ

 medela_skcz

 MEDELA CZ

 medela_skcz

 medela_cz