


Návod k použití

Misky na sběr mateřského mléka do podprsenky

Návod na použití

Misky na zber materského mlieka do podprsenky

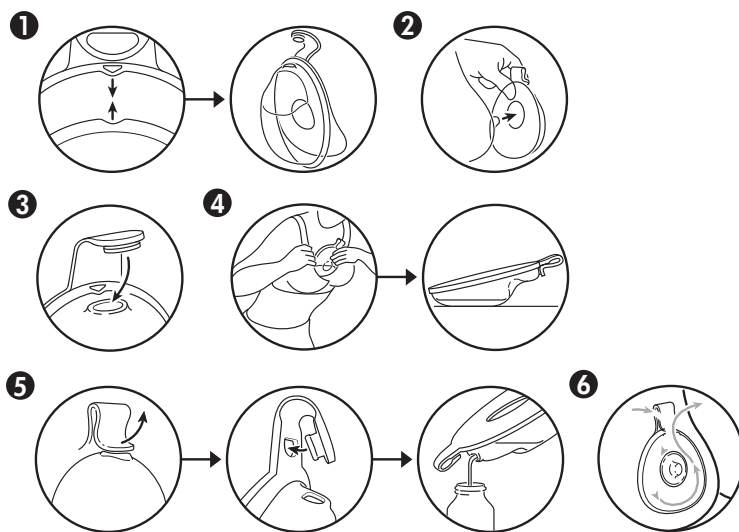

ČESKY

Medela Misky na sběr mateřského mléka do podprsenky zachytí každou drahocennou kapku mléka a díky své zátce zajišťují, že nedojde k úniku mléka. Anatomický design přináší jemný pocit na prsech a umožňuje pohodlné a diskrétní nošení.

Indikace

- Na nošení během kojení nebo odsávání, když začne téct mléko z druhého prsu.
- Na nošení mezi kojením nebo odsáváním, když uniká příliš mnoho mléka.

Sestavení a použití

1. Umístěte šipku na horní straně silikonové membrány do zářezu na horní straně misky. Připojte silikonovou membránu k misce. Ujistěte se, že je zapadlá po celém obvodu.
2. Umístěte sestavenou misku na sběr mléka do podprsenky tak, aby bradavka byla uprostřed otvoru. Ujistěte se, že nalévací hrdlo je nasměřováno nahoru. Doporučujeme nosit kojící podprsenku; pružný materiál zajišťuje menší tlak na prsy.
3. Při pohybu s nasazenou miskou na sběr mléka uzavřete nalévací hrdlo zátkou na horní straně, aby nedošlo k rozlití.
4. Chcete-li misku na sběr mléka vyjmout, mírně se předkloníte, uchopte drážku a vyjměte ji směrem nahoru. Položte misku na sběr mléka plochou základnou na povrch stolu, aby nedošlo k rozlití.
5. Chcete-li uskladnit zachycené kapající mléko, vyjměte zátku z nalévacího hrdla a upevněte ji do otvoru na silikonovém pásku. Nalijte mléko do skladovacího obalu, jako je například sáček na skladování mateřského mléka Medela Easy Pour nebo láhev. Informace o skladování mateřského mléka najdete na stránkách <https://www.medela.com/storing-breast-milk>.
6. V misce se může objevit kondenzace. Když odpočíváte, otevřete nalévací hrdlo a zasuňte zátku do otvoru na silikonovém pásku, aby bylo zajištěno větrání.

Upozornění: Nesmí se nosit při spánku nebo v ležící poloze. Při spánku nahradte misku na sběr mateřského mléka do podprsenky prsní vložkou. Při delším používání misky na sběr mléka ji vyjměte každé 2–3 hodiny, abyste umožnili cirkulaci vzduchu a zabránili stlačení prsů. Mléko nasbírané mezi kojením/odsáváním by mělo být zlikvidováno.

Pokyny k čištění

Před prvním použitím a poté jednou denně

- Čistěte části (silikonovou membránu a misku) podle pokynů v části „Po každém použití“.
- Dezinfikujte části podle pokynů v části „Dezinfekce“.

Po každém použití

- Všechny části vždy co nejdříve po každém použití umyjte.
- Části, které přichází do kontaktu s mlékem, opláchněte pod tekoucí studenou pitnou vodou. Umyjte části v teplé vodě s jemným prostředkem na nádobí. Opláchněte části studenou vodou.
- Oddělené části položte na čistý suchý hadřík a nechte uschnout na vzduchu.

Dezinfekce

- Části vyčistěte podle pokynů k čištění.
- Části zalijte vodou a vyvařujte 5 minut v hrnci.
- Alternativně lze misky na sběr mateřského mléka čistit v myčce nádobí, a to pouze v horním koši. Dezinfekce v mikrovlnných sáčcích Medela Quick Clean™ je bezpečná.
- Oddělené části položte na čistý suchý hadřík a nechte je uschnout na vzduchu.

Materiál misky (přední strana): polypropylen

Materiál membrány (zadní strana): silikon

Likvidace

Podle místních předpisů.

SLOVENSKY

Medela Misky na zber materského mlieka do podprsenky zachytia každú vzácnu kvapku mlieka a vďaka zátku zabezpečujú, že nedôjde k úniku. Anatomický dizajn prináša jemný pocit na prsiach a umožňuje pohodlné a diskrétné nosenie.

Indikácia

- Na nosenie počas dojčenia alebo odsávania, keď začne tiecť mlieko z druhého prsníka.
- Na nosenie medzi dojčením alebo odsávaním, keď uniká príliš veľa mlieka.

Zostavenie a použitie

1. Umiestnite šípku na hornej strane silikónovej membrány do zárezu na hornej strane misky. Pripojte silikónovú membránu k miske. Uistite sa, že je zacvaknutá po celom obvode.
2. Umiestnite zostavenú misku na zber mlieka do podprsenky tak, aby bola bradavka uprostred otvoru. Skontrolujte, či je nalievacie hrdlo nasmerované nahor. Odporúčame nosiť podprsenku na dojčenie; pružný materiál zabezpečí menší tlak na prsia.
3. Pri pohybe s miskou na zber mlieka zatvorte nalievacie hrdlo zátkou na hornej strane, aby nedošlo k rozliatiu.
4. Ak chcete misku na zber mlieka vybrať, mierne sa predkloňte, uchopte drážku a vyberte ju smerom nahor. Položte ju plochou základňou na stôl, aby sa mlieko nerozlialo.
5. Ak chcete uskladniť zachytené mlieko, vyberte zátku z nalievacieho hrdla a upevnite ju do otvoru na silikónovom pásiku. Nalejte mlieko do skladovacieho obalu, napríklad do vrečka na uskladnenie materského mlieka Medela Easy Pour alebo do fľaše. Informácie o skladovaní materského mlieka nájdete na stránke <https://www.medela.com/storing-breast-milk>.
6. V miske sa môže objaviť kondenzácia. Keď odpočívate, otvorte nalievacie hrdlo a zasunúť zátku do otvoru na silikónovom pásiku, aby sa zabezpečilo vetranie.

Upozornenie: Nesmie sa nosiť počas spánku alebo v ľahu. Pri spánku nahradte misku na zber materského mlieka v podprsenke prsnou vložkou. Pri dlhšom používaní misky na zber mlieka ju vyberte každé 2–3 hodiny, aby ste umožnili cirkuláciu vzduchu a predišli stláčaniu prs. Mlieko nazbierané medzi dojčením/odsávaním je potrebné zlikvidovať.

Pokyny na čistenie

Pred prvým použitím a potom raz denne

- Vyčistite časti (silikónovú membránu a misku) podľa pokynov v časti „Po každom použití“.
- Dezinfikujte časti podľa pokynov v časti „Dezinfekcia“.

Po každom použití

- Všetky časti umyte čo najskôr po použití.
- Časti, ktoré prišli do kontaktu s mliekom, opláchnite pod tečúcou studenou pitnou vodou. Umyte ich v teplej vode s jemným prostriedkom na riad a následne opláchnite studenou vodou.
- Oddelené časti položte na čistú suchú utierku a nechajte uschnúť na vzduchu.

Dezinfekcia

- Časti vyčistíte podľa pokynov na čistenie.
- Časti zalejte vodou a varte 5 minút v hrnci.
- Alternatívne možno misky na zber materského mlieka čistiť v umývačke riadu, ale len v hornom koši. Dezinfekcia v mikrovlnných vreckách Medela Quick Clean™ je bezpečná.
- Oddelené časti položte na čistú suchú utierku a nechajte uschnúť na vzduchu.

Materiál misky (predná strana): polypropylén

Materiál membrány (zadná strana): silikón

Likvidácia

Podľa miestnych predpisov.



Označuje, že daný predmet technicky lze recyklovat.
Označuje, že daný predmet sa technicky dá recyklovať.



Označuje, že přepravní balík nesmí být vystaven slunečnímu záření.
Označuje, že prepravný obal nesmie byť vystavený slnečnému žiareniu.



Tento symbol označuje, že obal obsahuje výrobky určené pro styk s potravinami podle nařízení 1935/2004.
Tento symbol označuje, že obal obsahuje výrobky určené na styk s potravinami v súlade s nariadením 1935/2004.



Označuje, že uživatel si musí prostudovat návod k použití.
Označuje, že používateľ si musí prečítať návod na použitie.



Označuje, že přepravní obal musí být chráněn před deštěm a skladován v suchu.
Označuje, že prepravný obal musí byť chránený pred dažďom a skladovaný v suchu.



Medela Consumer AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com
© Medela AG

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
www.medela.com

EU Responsible Person/
Importer:
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Str. 2
85386 Eching, Germany
www.medela.com/support

Medela Australia Pty Ltd
3 Arco Lane, Heatherton,
Victoria 3202,
Australia
Phone 03 9552 8600
contact@medela.com.au

Medela UK Ltd
Unit 3 Huntsman Drive
Northbank Industrial Park, Irlam
Manchester M44 5EG
United Kingdom
www.medela.com/support

Distributed by - Distribué par -
Distribuido por
Medela LLC
1101 Corporate Drive, McHenry,
IL 60050, USA
Phone (800) 435-8316 or
(815) 363-1166
customer.service@medela.com
www.medela.us
www.medelamx.com

Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Crescent, #8
Mississauga, ON, L5L 0A1, Canada
Phone (800) 435-8316
info@medela.ca
www.medela.ca

Výhradní distributor pro Českou republiku:
DN FORMED Brno, s.r.o.
Hudcova 487/76a
612 00 Brno, Česká republika
Telefon: +420 532 198 888
medela@medela.cz
www.medela.cz

Výhradný distribútor pre Slovenskú republiku:
DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka
Sibírska 1329/2
908 51 Holíč, Slovenská republika
Telefón: +420 532 198 888
medela@medela.sk
www.medela.sk



MCAG Ref. IFU In-bra Breast Milk
Collector 12CE/V1.0