

Freestyle Flex™

CZ Elektrická odsávačka
Návod k použití

SK Elektrická odsávačka
Návod na použitie



ČESKY	CZ
	4–51

SLOVENSKY	SK
	52–99

1. Důležité bezpečnostní informace

4

 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě prostudujte přiložený návod. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.

Výstrahy označují všechny pokyny důležité z důvodu bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může vést k poranění nebo k poškození výrobku.

Následující symboly a signální slova indikují míru nebezpečí souvisejícího s výstrahou:

 **VAROVÁNÍ**

Může způsobit vážný úraz nebo smrt.

 **UPOZORNĚNÍ**

Může způsobit menší poranění.

POZNÁMKA

Může vést ke hmotným škodám (nesouvisejícím s újmou na zdraví).

 **Informace**

Užitečné nebo důležité informace nesouvisející i s bezpečností.

Při používání elektrických výrobků, zejména v přítomnosti dětí, musí být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření.

VAROVÁNÍ

Předcházení požáru, poranění elektrickým proudem nebo závažným popáleninám:

- Když je odsávačka připojena ke zdroji energie, neměla by nikdy zůstat bez dozoru.
- Nikdy neprovozujte elektrické zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, bylo upuštěno nebo poškozeno nebo pokud spadlo do vody. Pokud zjistíte poškození, okamžitě přestaňte používat napájecí adaptér a zavolejte zákaznický servis Medela.
- Nepoužívejte elektrický výrobek, který byl vystaven vodě nebo jiným kapalinám, včetně:
 - Přístroj nepoužívejte při koupání nebo sprchování.
 - Nedávejte ani neponořujte do vody či jiné kapaliny.
 - Na jednotku odsávačky nepouštějte vodu.
 - Pokud byl elektrický výrobek vystaven vodě nebo jiným kapalinám, nedotýkejte se ho, odpojte zařízení od elektrické zásuvky, vypněte jej a kontaktujte výrobce.

VAROVÁNÍ

Chcete-li předejít zdravotním rizikům a snížit riziko poranění:

- Nepoužívejte odsávačku Freestyle Flex při řízení motorového vozidla.
- Odsávání může vyvolat porod. Nezačínejte s odsáváním před porodem. Pokud otěhotníte během kojení nebo odsávání mateřského mléka, poraďte se před dalším kojením či odsáváním s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.
- Pro matky infikované hepatitidou B, C nebo virem HIV: odsávání mateřského mléka nesnižuje ani neeliminuje riziko přenosu viru na dítě prostřednictvím mateřského mléka.
- Umyjte díly, které se dostanou do styku s prsem nebo mateřským mlékem ihned po jejich použití.
- Je-li odsávačka mateřského mléka nebo příslušenství používána v blízkosti dětí, je nutný pečlivý dohled.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně není dohlíženo nebo jim není poskytnut návod k použití spotřebiče osobou odpovídající za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- S tímto zařízením mohou manipulovat děti od osmi let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí výsledným rizikům.
- S přístrojem si nesmí hrát děti.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ

Předcházení požáru nebo popálení:

- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na síťovém adaptéru odpovídá napětí sítě. V **kapitole 19** najdete technické specifikace.
- Po ukončení používání vždy odpojte elektrické výrobky ze zásuvky, s výjimkou nabíjení.
- Neukládejte ani nepoužívejte zařízení na místě, kde hrozí, že spadne na zem nebo bude staženo do vany či umyvadla.
- Zařízení a příslušenství nejsou tepelně odolné. Udržujte mimo dosah horkých povrchů nebo otevřeného ohně.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li předejít zdravotním rizikům a snížit riziko poranění:

- Tento výrobek je určen pouze pro jednoho uživatele. Používání více osobami může způsobit ohrožení zdraví a zároveň zaniká záruka na výrobek.
- Tento výrobek nemůže být servisován ani opravován. Neopravujte zařízení sami.
- Neupravujte zařízení.
- Poškozený produkt nikdy nepoužívejte. Vadné nebo opotřebované díly vyměňte.
- Toto zařízení používejte pouze k výše uvedenému určenému účelu popsanému v návodu k použití.
- Nepoužívejte zařízení, když spíte nebo v případě nadměrné únavy.
- Je-li v hadičce plíseň, přestaňte ji používat a vyměňte ji.
- Mateřské mléko neohřívejte v mikrovlnné troubě, ani jej nevařte. Ohřívání v mikrovlnné troubě může způsobit závažné popáleniny úst dítěte v důsledku horkých míst, které ohřívání v mikrovlnné troubě vytváří (ohřívání v mikrovlnné troubě může rovněž měnit složení mateřského mléka.).

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li předejít zdravotním rizikům a snížit riziko poranění:

- Před prvním použitím očistěte a dezinfikujte všechny části, které se dostanou do styku s prsem nebo mateřským mlékem.
- S odsávačkou Freestyle Flex používejte pouze doporučené díly Medela.
- Pokud je odsávání nepříjemné nebo způsobuje bolest, vypněte přístroj, prstem oddělte těsnění mezi prsem a nástavcem na prs a sundejte nástavec z prsu.
- I když při prvním použití odsávačky můžete pociťovat určité nepohodlí, používání odsávačky by nemělo způsobovat bolest. Pokud si nejste jisti správnou velikostí nástavců na prsa, navštivte **www.medela.cz** nebo laktační poradkyni/specialistu na kojení, kteří vám pomohou s určením správné velikosti.
- Obraťte se na svého zdravotnického pracovníka nebo odborníka na kojení, pokud můžete odsávat pouze minimální nebo žádné mléko nebo pokud je odsávání bolestivé. Další informace najdete v **kapitole 6**.

POZNÁMKA

S láhvemi i s jednotlivými díly manipulujte opatrně:

- Plastové láhve a jednotlivé díly mohou být po zmrazení křehké a mohou se při pádu z výšky rozbít.
- Láhve a jednotlivé díly se mohou při nesprávném zacházení poškodit (např. při nárazu, po příliš silném utažení nebo převrnutí).
- Mateřské mléko nepoužívejte, pokud láhve nebo jednotlivé díly vykazují známky poškození.

1. Důležité bezpečnostní informace	4
2. Účel použití	11
3. Popis produktu	11
3.1 Popis zařízení	11
3.2 Součástí zařízení je	12
4. Začínáme s odsáváním	14
4.1 Příprava na odsávání	14
4.2 Napájení odsávačky	14
5. Čištění	15
5.1 Přehled čištění	16
5.2 Demontáž	17
5.3 Mytí	18
5.4 Dezinfekce	19
5.5 Čištění motoru	20
5.6 Čištění hadičky	21
6. Velikost prsního nástavce	22
6.1 Výběr správné velikosti prsního nástavce	22
6.2 Optimalizace velikosti prsního nástavce	23
7. Sestavení odsávačky	24
7.1 Sestavení odsávačky	24
7.2 Příprava na odsávání z jednoho prsu	26
7.3 Příprava na odsávání z obou prsů současně	27
7.4 Příprava na odsávání bez držení odsávací soupravy pomocí Pásu pro snadné odsávání	28
8. Ovládání odsávačky	29
8.1 Podmínky a označení	29
8.2 Ovládací a zobrazovací prvky	29
8.3 Nabíjení baterie	31
8.4 Odsávání mateřského mléka	32
9. Nalezení pohodlné úrovně podtlaku	35
10. Speciální funkce	36
10.1 Bluetooth® připojení	36
10.2. Opožděný start	38
11. Skladování a rozmrazování mateřského mléka	39
11.1 Skladování	39

11.2	Skladování mateřského mléka v chladicí tašce Medela	39
11.3	Zmrazení	40
11.4	Rozmrazování	40
11.5	Krmení mateřským mlékem	40
12.	Údržba a péče	41
12.1	Péče o napájecí adaptér	41
12.2	Údržba baterie	41
12.3	Dlouhodobé skladování	42
13.	Řešení problémů	43
14.	Příslušenství	45
15.	Záruka	46
16.	Likvidace	46
17.	Význam symbolů	47
18.	Mezinárodní předpisy	50
18.1	Elektromagnetická kompatibilita (EMK)	50
18.2	Pomůcka pro pití	50
19.	Technické údaje	51

2. Účel použití

Odsávačka mléka Freestyle Flex je elektrická odsávačka, která je určena pro kojící ženy k odsávání a uchovávání mateřského mléka. Odsávačka mléka Freestyle Flex je určena pro jednoho uživatele.

3. Popis produktu

3.1 Popis zařízení

Freestyle Flex je elektrická odsávačka pro osobní potřebu, která obsahuje technologii 2-fázového odsávání a je s ní možné odsávání z každého prsu zvlášť nebo odsávání z obou prsů současně. Provozní životnost odsávačky mateřského mléka Freestyle Flex je 250 hodin.

3.2 Součástí zařízení je


2x PersonalFit Flex
prsňí nástavec (21 mm)

2x PersonalFit Flex
prsňí nástavec (24 mm)

Další velikosti prsního
nástavce naleznete
v kapitole 6

4x Láhev


1x Motor

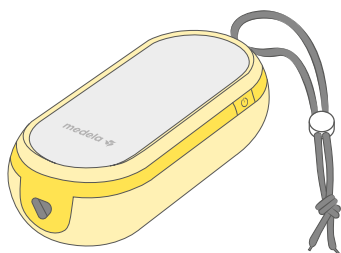

2x PersonalFit Flex konektor




1x Hadička

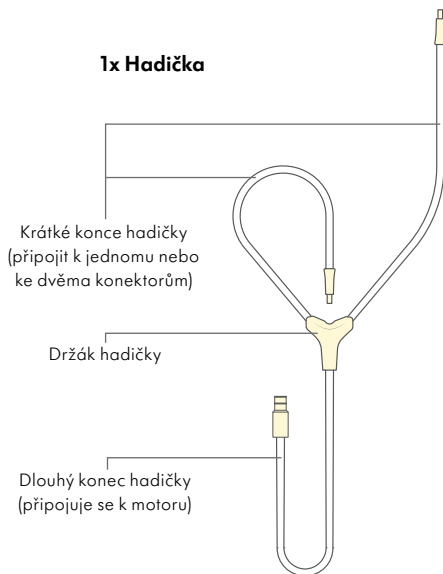

Náhradní díly a příslušenství, které lze objednat, naleznete v kapitole 14.




4x Víceúčelové víčko
láhve

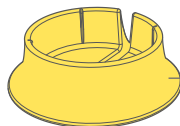

2x Stojan na láhve


1x napájecí adaptér s kabelem

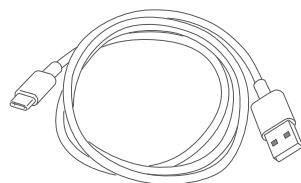


1x Taška odsávačky



1x Chladicí taška

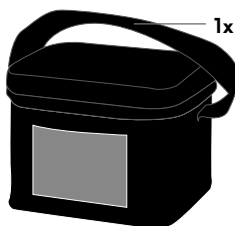

1x Chladicí médium
(součástí chladicí tašky)

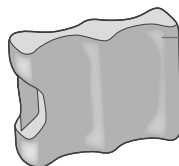

Náhradní díly a příslušenství, které lze objednat, naleznete v **kapitole 14**.

Všechny obrázky zobrazené v tomto návodu slouží pouze pro ilustraci. Skutečný produkt se může lišit v důsledku místních rozdílů nebo vylepšení produktu.

Společnost Medela si vyhrazuje právo nahradit jakoukoliv součást nebo příslušenství náhradou za rovnocenný výkon.

4. Začínáme s odsáváním

14

4.1 Příprava na odsávání


Abyste byli připraveni na odsávání mléka, proveďte před prvním použitím odsávačky následující kroky:

1. Nabíjejte baterii odsávačky mléka Freestyle Flex dvě hodiny - viz **část 8.3**.
2. Před čištěním oddělte všechny části, které jsou vystaveny prsům nebo mateřskému mléku - viz **část 5.2**.
3. Vyčistěte a dezinfikujte díly - viz **části 5.3 a 5.4**.

4.2 Napájení odsávačky


Existují dva způsoby, jak napájet odsávačku pro odsávání:

Dobíjecí baterií

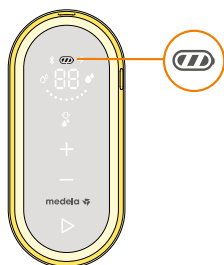

nebo

Síťovým adaptérem/kabelem

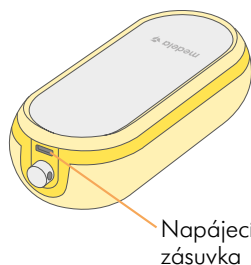

Před prvním použitím nabíjте baterii odsávačky po dobu dvou hodin pomocí napájecího adaptéru.

→ Po dokončení nabíjení se na displeji baterie zobrazí všechny tři pruhy.

Podrobnosti o displeji baterie viz **část 8.2**.

Zastrčte napájecí kabel do napájecí zásuvky na horní straně na motorové jednotce.

Podrobnosti o napájení odsávačky/nabíjení baterie viz **část 8.3**.

5. Čištění

Potřebné vybavení:

- Jemná tekutina na mytí
- Čistý měkký kartáč
- Čisté umyvadlo
- Pitná voda
- Čistý hrnec na vařící vodu

Části k mytí nebo dezinfekci:

- Prsní nástavce
- Láhve na mateřské mléko
- Víčka
- Konektory
- Membrány

UPOZORNĚNÍ

Udržování dílů odsávačky v čistotě a hygieně:

- Ihned po použití oddělte a umyjte všechny díly, které jsou ve styku s mateřským mlékem. Pomůže to odstranit zbytky mateřského mléka a zabránit množení bakterií.
- Důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem.
- K čištění používejte pouze pitnou vodu z vodovodu nebo balenou vodu.
- Části odsávačky nedávejte za účelem opláchnutí nebo umytí přímo do dřezu. Používejte čisté umyvadlo, které používáte pouze pro předměty určené pro krmení dítěte.
- K utření či osušení předmětů nepoužívejte utěrku na nádobí.
- K čištění nepoužívejte dezinfekční prostředky.

POZNÁMKA

Zabránění poškození hadičky.

- Nečistěte hadičku zde popsaným způsobem ani pomocí sáčků Quick Clean v mikrovlnné troubě. Dodržujte pokyny uvedené v **části 5.6**.

POZNÁMKA

Věnujte pozornost následujícímu:



- Dávejte pozor, abyste během čištění nepoškodili díly odsávací soupravy.
- Suchou odsávací soupravu uchovávejte v čisté tašce/krabičce až do příštího použití.
- Neskladujte mokré nebo vlhké díly, protože může dojít ke vzniku plísní.
- Pokud po vyvaření dílů zaznamenáte bílé zbytky, je možné, že voda, ve které jste je vyvařili, má vysoký obsah minerálů. Odstraňte tyto zbytky otřením čistým ručníkem a nechte díly přirozeně vyschnout.
- Destilovaná voda se k převaření dílů doporučuje, pokud chcete předejít hromadění minerálů, které vzniká postupem času a předejít tak zničení dílů odsávačky.

5.1 Přehled čištění


Mytí a dezinfekce jsou dvě různé činnosti. Mytí a dezinfekci je třeba provádět odděleně z důvodu vaší ochrany, ochrany vašeho dítěte a zachování účinnosti zařízení.

Mytí – Čištění povrchů jednotlivých dílů fyzickým odstraněním nečistot.

Dezinfekce – Likvidace mikroorganismů, jako jsou například bakterie a viry, které mohou být přítomny na povrchu dílů odsávačky.

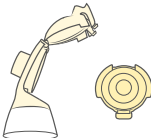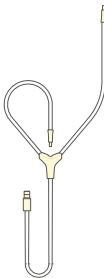	Prsní nástavce	Konektory a membrány	Láhve & víčka
Kdy vyčistit			
Před prvním použitím	Rozložte díly podle části 5.2 Díly umyjte podle části 5.3 Dezinfikujte díly podle části 5.4		
Po každém použití	Rozložte díly podle části 5.2 Díly umyjte podle části 5.3		
Jednou denně	Rozložte díly podle části 5.2 Dezinfikujte díly podle části 5.4		
	Hadice	Motor	
Kdy vyčistit			
Podle potřeby	Obvykle není čištění hadičky nutné. Viz část 5.6.	Otřete čistým vlhkým ručníkem. Viz část 5.5.	

5.2 Demontáž

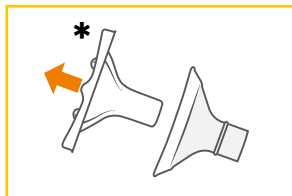

Před prvním použitím



Sejměte a zlikvidujte ochranný kryt* z prsního nástavce.



Po každém použití

Rozložte odsávací soupravu na jednotlivé díly (prsňní nástavec, konektor a láhev s mlékem) následujícím způsobem:

1. Odstraňte prsní nástavec z konektoru.
2. Otevřete zadní kryt konektoru stisknutím obou klapkek a otočením krytu nahoru.
3. Odstraňte membránu z těla konektoru.
4. Oddělte láhve na mléko, víčka a stojany na láhve.

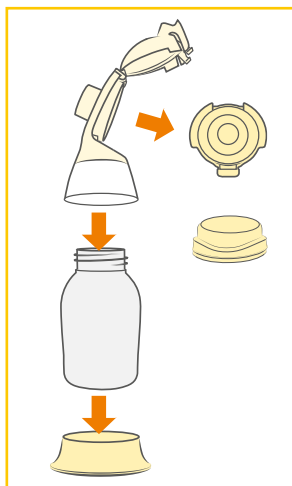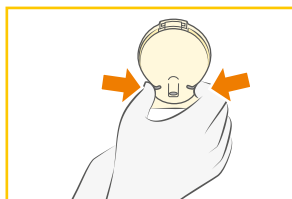


5.3 Mytí

Mytí je důležité z hygienického hlediska a slouží k čištění povrchu dílů fyzickým odstraněním nečistot. Díly myjte buď ručně, nebo v myčce nádobí.


Před prvním použitím a po každém použití

Ruční oplachování a mytí

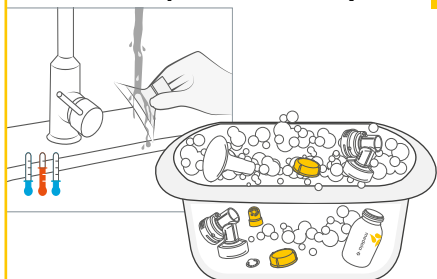

nebo

Mytí v myčce nádobí

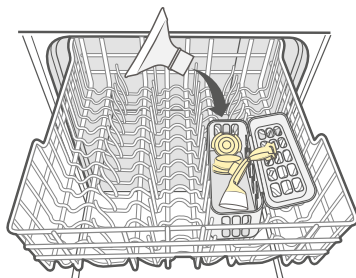

Nevkládejte díly přímo do kuchyňského dřezu pro opláchnutí a mytí. Pro kojenecké potřeby používejte vyhrazené umyvadlo.

1. Demontované díly, s výjimkou hadičky, opláchněte studenou a čistou pitnou vodou (přibližně 20 °C).
2. Vyčistěte tyto díly dostatečným množstvím teplé mýdlové vody (při teplotě přibližně 30 °C). Použijte běžně dostupný mycí prostředek, nejlépe bez umělých vůní a barviv (pH neutrální).
3. Díly oplachujte studenou vodou po dobu 10–15 sekund (při teplotě asi 20 °C).
4. Po umytí nechte vyschnout.

1. Umístěte rozložené díly, s výjimkou hadičky, do horního koše nebo do přihrádky na příbory. Použijte běžně dostupný čistící prostředek určený pro myčky nádobí.
2. Po umytí nechte vyschnout.

i Informace

Při používání myčky může dojít ke změně barvy dílů. To neovlivní funkci součástí. Hádčky běžně neumývejte. Další informace naleznete v **části 5.6**.

Sušení

Nechte přirozeně vyschnout na čisté a nepoužité utěrce nebo papírovém ubrousku.




5.4 Dezinfekce

Dezinfekce je důležitá pro hygienu a slouží k usmrcování živých organismů, jako jsou bakterie nebo viry. Převařte části buď na varné desce, nebo použijte mikrovlnné sáčky Quick Clean.

Před prvním použitím a potom jednou denně

Dezinfekce na sporáku

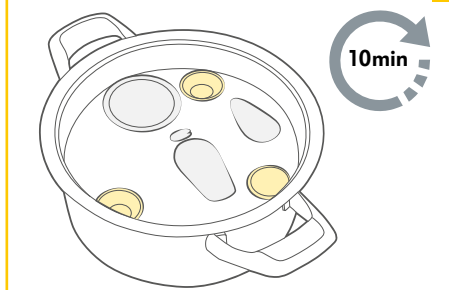

nebo

Dezinfekce v mikrovlnné troubě



1. Ponořte rozložené a umyté díly, s výjimkou hadičky, do vody a vyvařujte po dobu alespoň 10 minut.
2. Po dezinfekci nechte vyschnout.

1. Při použití sáčků Quick Clean v mikrovlnné troubě postupujte dle návodu k použití uvedeném na sáčku.
2. Po dezinfekci nechte vyschnout.

* Dostupnost ve vaší zemi zjistíte na místních webových stránkách/obchodech.

Sušení

1. Nechte přirozeně vyschnout na čisté a nepoužité utěrce nebo papírovém ubrousku.
2. Čisté a suché části uložte do čistého skladovacího sáčku nebo do čistého prostředí. Neskladujte díly ve vzduchotěsné nádobě nebo sáčku, pokud jsou vlhké. Je důležité, aby veškerá zbytková vlhkost vyschla.



5.5 Čištění motoru

Potřebné vybavení:

- Pitná voda
- jemný čistící prostředek
- Čistý ručník nebo papírová utěrka

Potřebné díly:

- Motor

⚠ UPOZORNĚNÍ



- Před čištěním motoru odsávačku odpojte.
- Neponořujte motor do vody; nepouštějte vodu na motor.

POZNÁMKA

- Nestříkejte a nelijte kapalinu přímo na odsávačku.
- Při čištění displeje motoru používejte pouze vlhký měkký ručník s jemným čistícím prostředkem. Jiné čistící prostředky nebo abrazivní oděvy mohou snížit výkon displeje.



1. Vypněte odsávačku mléka.
2. Odpojte odsávačku od zdroje energie.



3. Motor ořete čistým ručníkem navlhčeným pitnou vodou.
4. Motor ořete do sucha čistým suchým ručníkem.

5.6 Čištění hadičky

Obvykle není čištění hadičky nutné.

i Informace

Zkontrolujte hadičku. Pokud v hadičce došlo ke kondenzaci, ihned ji umyjte a vysušte, nebo vyměňte hadičku. Pokud uvidíte mateřské mléko uvnitř hadičky nebo konektoru hadičky, nepokoušejte se umývat, čistit nebo sterilizovat hadičku nebo konektor hadičky. Místo toho se obraťte na výrobce.


Potřebné vybavení:

- Pitná voda
- Jemný čistící prostředek

Potřebné díly:

- Hadička

Mytí hadičky

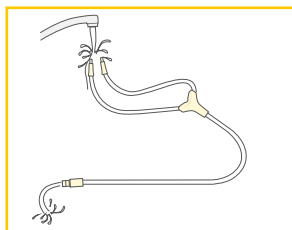


1. Vypněte odsávačku.
2. Vyměňte hadičku z motoru.
3. Vyměňte hadičku z víčka konektoru.
4. Hadičku opláchněte tak, že do obou krátkých konců hadičky nalejete studenou vodu, dokud nevyteče z dlouhého konce hadičky.
5. Umyjte hadičku v teplé mýdlové vodě.
6. Opláchněte hadičku čistou vodou.

Sušení hadiček

1. Vytřepějte z hadičky kapky vody.
2. Zavěste hadičku a nechte ji přirozeně vyschnout.
3. Před použitím se ujistěte, že je hadička úplně suchá

POZNÁMKA

- Je-li v hadičce plíseň, přestaňte ji používat a vyměňte ji. Příslušenství dostupné na objednávku naleznete v **kapitole 14**.
- **Nepoužívejte odsávačku s mokrou hadičkou; Mohlo by dojít k poškození odsávačky.**

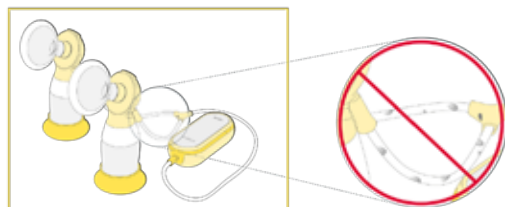

6. Velikost prsního nástavce

22


6.1 Výběr správné velikosti prsního nástavce

Ujistěte se, že používáte správnou velikost prsního nástavce. Je nezbytnou součástí účinného odsávání a pomáhá optimalizovat tok mléka.

Porozumění velikosti prsních nástavců Medela

Odsávání by nemělo být bolestivé. Pro maximální pohodlí a účinnost odsávání nabízí Medela několik velikostí prsních nástavců.*

Tento návod vám pomůže určit optimální velikost nástavce podle průměru vaší bradavky.

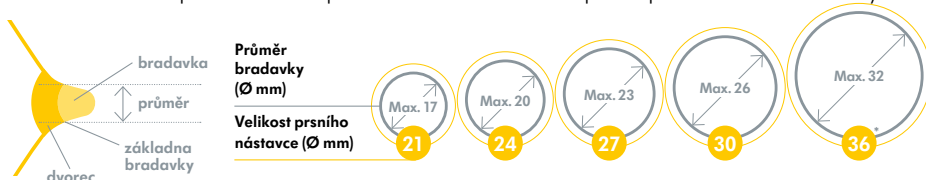

Krok 1

Pomocí pravítka nebo měřicí pásky změřte průměr vaší bradavky u základny (přes střed) v milimetrech (mm). Při měření vynechte prsní dvorec.

Krok 2

Podle změřeného průměru určete svou velikost prsního nástavce Medela. Příklad: Pokud je průměr vaší bradavky 16 mm, pak doporučená velikost prsního nástavce Medela je 21 mm.

i Informace

Prsní nástavce PersonalFit Flex jsou k dispozici ve velikostech do 30 mm. Pokud potřebujete větší prsní nástavec (36 mm), obraťte se na místního prodejce Medela nebo na www.medela.cz.

*Informace o objednání najdete v **kapitole 14**.

6.2 Optimalizace velikosti prsního nástavce

- Nejprve vyzkoušejte prsní nástavec dodaný s odsávačkou nebo použijte nástavec vybraný podle změřeného průměru bradavky.
- Umístěte bradavku do středu tunelu a jemně přidržujte prsní nástavec na prsu.
- Nastavte maximálně pohodlný podtlak (viz **kapitola 9**) pro dosažení optimální úrovně sání.
- Při odsávání v odsávací fázi (po stimulační fázi) postupujte podle obrázků níže.



- Bradavka se odírá o strany tunelu prsního nástavce.
- Vyzkoušejte větší velikost.



- Bradavka je umístěna ve středu tunelu nástavce a pohybuje se volně.



- Bradavka a nadměrná část prsního dvorce jsou vtahovány do tunelu prsního nástavce.
- Vyzkoušejte menší velikost.

Důvody pro vyzkoušení jiné velikosti prsního nástavce

- Pokud se vaše bradavka tře o strany tunelu natolik, že způsobí nepohodlí.
- Pokud je do tunelu vtahována nadměrná část dvorce.
- Pokud dojde ke zčervenání.
- Pokud vám bradavka nebo dvorec zbělá.
- Pokud cítíte v prsu po odsávání neodsáté mléko.

Pokud nastane některá z těchto podmínek, zvažte vyzkoušení jiné velikosti podle výše uvedených pokynů k měření.

V případě, že si stále nejste jistá, zda jste zvolila správnou velikost, poraďte se s laktální poradkyní nebo specialistou v oblasti kojení.

7. Sestavení odsávačky

24

Při sestavení odsávačky používejte pouze čisté a suché díly. Informace o čištění naleznete v kapitole 5.

7.1 Sestavení odsávačky

Potřebné díly:

- Hadička
- Motor
- Prsní nástavce
- Láhve na mléko
- Víčko
- Konektory
- Membrány



⚠ UPOZORNĚNÍ

Prevence kontaminace mateřského mléka:

- Než se dotknete jednotky odsávačky, jednotlivých dílů a prsů, důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem.
- Osušte si ruce čistou utěrkou nebo jednorázovou papírovou utěrkou.
- Nedotýkejte se vnitřní strany lahvi a víček.


Ujistěte se, že zařízení funguje správně a bezpečně:

Před použitím zkontrolujte, zda komponenty odsávací soupravy nejsou opotřebené nebo poškozené. V případě potřeby je vyměňte.


- Před použitím vždy zkontrolujte, zda jsou všechny díly čisté. Pokud nejsou díly čisté, vyčistěte je podle postupu v kapitole 5.
- Používejte pouze originální díly Medela. Podrobnosti najdete v kapitole 14.

POZNÁMKA

Aby nedošlo k poškození jednotky odsávačky, musí být všechny díly před použitím zcela suché.

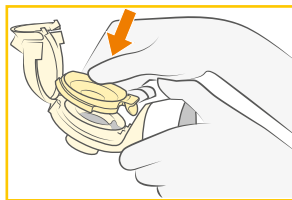

1. Opatrně zasuňte (tmavě žlutou) membránu s klapkou do otvoru těla konektoru.
→ Ujistěte se, že membrána těsní okraj těla konektoru.

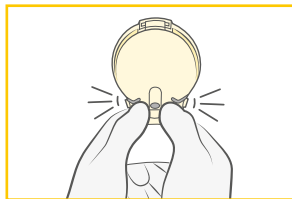


2. Zaklapněte kryt konektoru. Uzavření indikuje slyšitelné cvaknutí.




3. Našroubujte konektor na láhev.



→ Opatrně nasadíte prsní nástavec do konektoru. Vyberte si velikost prsního nástavce, která vám vyhovuje. Výběr správného nástavce viz **kapitola 6**.

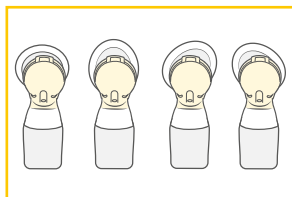

4. S oválným prsním nástavcem lze otáčet (360°) a umístit jej do požadované polohy, která je pro vás nejpohodlnější.

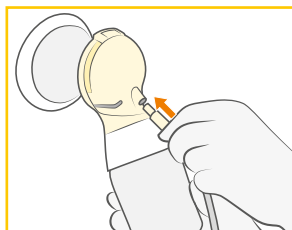


5. Zasuňte kratší konec hadičky do odpovídajícího otvoru v uzávěru konektoru.




6. Dlouhý konec hadičky zasuňte do jednotky odsávačky až nadoraz.


7.2 Příprava na odsávání z jednoho prsu

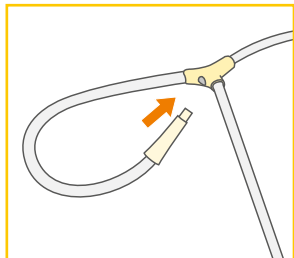


1. Zasuňte volný konec hadičky do držáku hadičky.

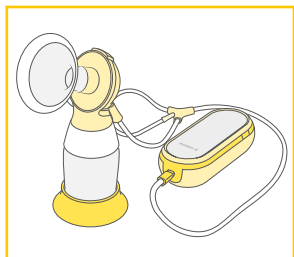

→ Správně sestavený systém (pro odsávání z jednoho prsu).

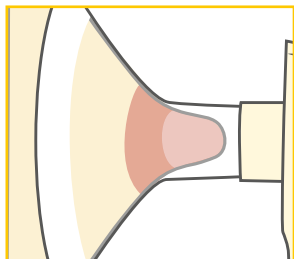

2. Umístěte prsní nástavec na prs tak, aby bradavka byla správně uprostřed tunelu.

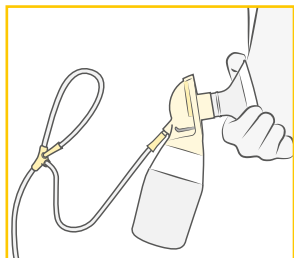


3. Přidržte prsní nástavec na prsu palcem a ukazováčkem.
4. Podepřete prs dlaní ruky.
5. Začněte odsávat podle popisu v **části 8.4**.


7.3 Příprava na odsávání z obou prsů současně

i Informace


- Dvojité odsávání šetří čas a zvyšuje nutriční hodnotu mléka.
- Možná budete chtít spustit odsávačku mléka pomocí funkce odloženého startu, která vám umožní mít obě ruce volné při zahájení odsávání.
Funkce odloženého startu viz **část 10.2**.
- Pro odsávání bez pomoci rukou můžete vyzkoušet Pás pro snadné odsávání (dostupný na www.medela.cz).

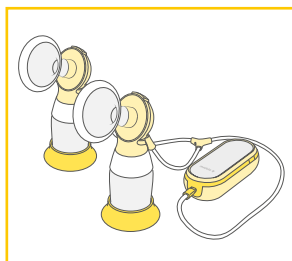

1. Sestavte dvě odsávací soupravy tak, jak je popsáno v **části 7.1**.
→ Správně sestavený systém (pro odsávání z obou prsů).

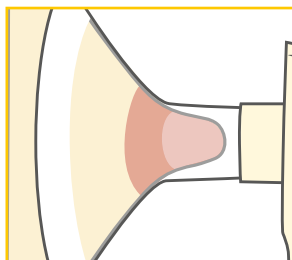

2. Umístěte prsní nástavce na prsy tak, aby bradavka byla správně uprostřed tunelu.

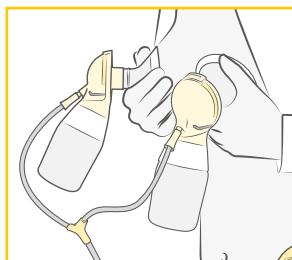


3. Přidržte prsní nástavec a konektor na prsu palcem a ukazováčkem.
4. Podepřete prs dlaní ruky.
5. Začněte odsávat podle popisu v **části 8.4**.

*Dostupnost ve vaší zemi najdete na místních webových stránkách/v obchodech.


7.4 Příprava na odsávání bez držení odsávací soupravy pomocí Pásu pro snadné odsávání

i Informace


Pás pro snadné odsávání je třeba zakoupit zvlášť. Další informace naleznete na www.medela.cz.

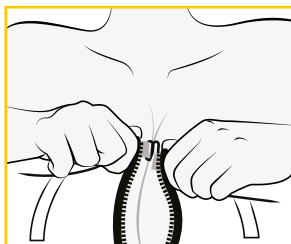


1. Nasadte si Pás pro snadné odsávání a sepněte jej pomocí háčku na vrchní straně.

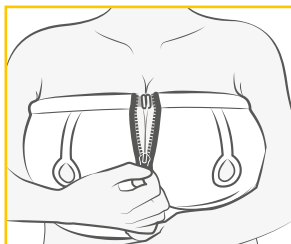

2. Ponechte zip lehce rozepnutý.

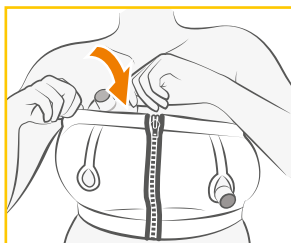

3. Umístěte prsní nástavec na prs pod pásem tak, aby bradavka byla správně ve středu tunelu prsního nástavce.
4. Uzavřete zip pro bezpečné uchycení poprsí.

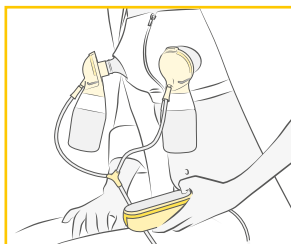

5. Připojte sestavenou odsávací soupravu k prsním nástavcům.
6. Začněte odsávat podle popisu v **části 8.4**.

8. Ovládání odsávačky


29

8.1 Podmínky a označení

2-fázové odsávání	 2 PHASE EXPRESSION TECHNOLOGY	Díky výzkumu Medela zjistila, že děti se krmí ve dvou fázích - stimulační a odsávací. Tento výzkum je základem pro technologii používané ve většině odsávaček mléka Medela.
Stimulační fáze		Režim rychlého sání /odsávání ke stimulaci toku mléka.
Odsávací fáze		Pomalejší režim sání/odsávání pro jemné a efektivní odsávání mléka poté, co mléko začalo odtékat.
Pohodlná úroveň podtlaku		Nejvyšší nastavení vakua, kdy je odsávání stále příjemné. U každé matky se liší.
Let-down		Reflex, díky němuž mléko začne vytékat z prsu (přepnutí do odsávací fáze).

8.2 Ovládací a zobrazovací prvky


Ovládací prvky

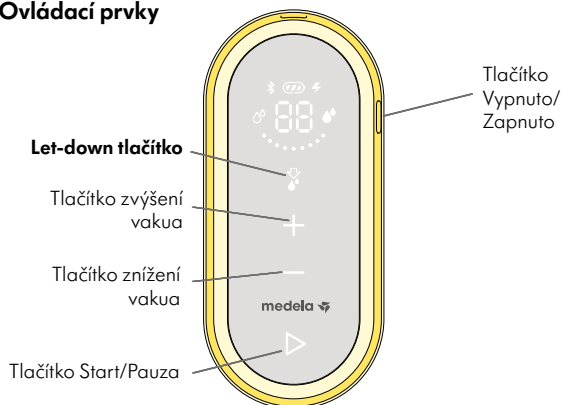

Pokyny pro uživatele:

Ovládací a zobrazovací prvky nejsou vždy viditelné. Když je odsávačka zapnutá, aktivní prvky se rozsvítí.

Zobrazovací prvky:

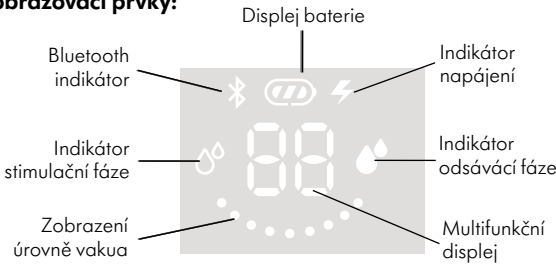

Multifunkční displej zobrazuje v závislosti na stavu zařízení následující informace:

- Čas relace v sekundách (první minuta odsávání), poté v minutách
- L1 až L9 pro úroveň vakua (spolu se zobrazením úrovně vakua)
- Párovací kód (během připojení Bluetooth)
- Zpoždění spuštění v sekundách

Zobrazení stavu napájení a baterie

	Indikátor napájení (symbol blesku) označuje, zda je připojen napájecí adaptér. → Pokud se rozsvítí, je připojen napájecí adaptér.
	Displej baterie zobrazuje stav baterie a její úroveň nabití. → Displej všech tří pruhů indikuje, že je baterie nabitá.
	Při snižování kapacity baterie se objeví méně pruhů. → Dva pruhy: přibl. zbývá 75 % kapacity. → Jeden pruh: přibl. zbývá 40 % kapacity.
 (blikání)	→ Když odsávačka vydává zvukový signál a jedna poslední čára bliká, baterie je téměř vybitá.
 (blikání)	→ Po vyslání druhého zvukového signálu, zatímco bliká obrys displeje baterie, se odsávačka zastaví a po pěti sekundách se úplně vypne.
 (blikání)	Pokud všechny tři pruhy a obrys displeje baterie blikají současně, znamená to, že baterie je přehřátá nebo vadná. Viz Řešení problémů (kapitola 13) nebo volejte zákaznický servis Medela.


8.3 Nabíjení baterie

VAROVÁNÍ


Používejte pouze napájecí adaptér a kabel dodávaný s odsávačkou.
Nedostatečný zdroj energie nebo kabel může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu zařízení.

Informace


- Při nabíjení baterie můžete odsávačku mléka používat. Baterie se nabije, jakmile je odsávačka připojena ke zdroji energie. Když je odsávačka v provozu, bude se nabíjet v pomalejším režimu.

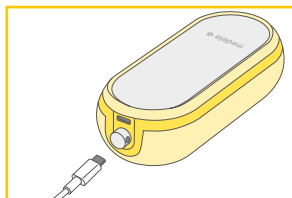

1. Připojte napájecí kabel k motoru.

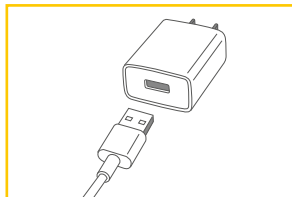

2. Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru.

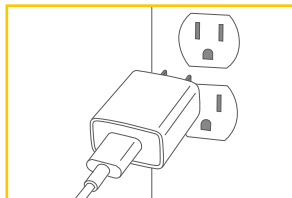

3. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky ve zdi.


8.4 Odsávání mateřského mléka

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Nedržte odsávací soupravu za láhev. Mohlo by dojít ke stlačení a zablokování mlékovodů a nalití prsu.
- Nepokoušejte se odsávat s vakuem, jehož intenzita je příliš vysoká a nepříjemná (bolestivá). Bolest spolu s potenciálním poraněním prsu a bradavek mohou snížit produkci mléka.
- Pokud odsajete jen málo mléka nebo vůbec žádné mléko, nebo pokud je odsávání bolestivé, obraťte se na laktiční poradkyni nebo na odborníka na kojení.

POZNÁMKA


Během odsávání se ujistěte, že hadička není překroucená nebo stisknutá.

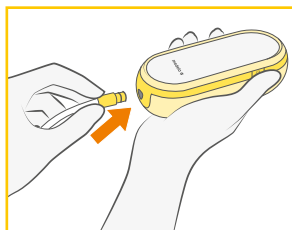


1. Pokud to již není uděláno, připojte sestavenou odsávačku k hadičce na přední straně odsávačky.
2. Ujistěte se, že je odsávací souprava správně připojena a umístěna.

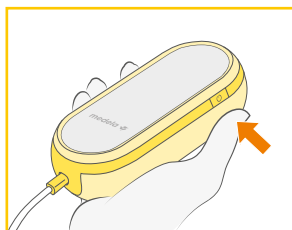


3. Držte tlačítko On/Off  na boku, dokud odsávačka nevydá zvukový signál, poté tlačítko uvolněte.
→ Odsávačka je nyní v pohotovostním režimu.

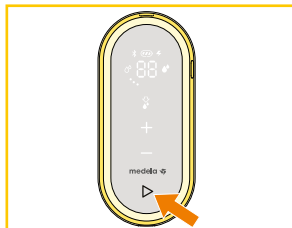


4. Stisknutím tlačítka Start/Pause  zahájíte odsávání.
→ Odsávačka začíná ve stimulační fázi.

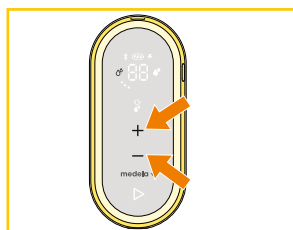

5. Upravte intenzitu vakua pomocí tlačítek Zvýšit intenzitu vakua (+) a Snížit intenzitu vakua (—), a naleznete pro vás pohodlnou intenzitu (pohodlná úroveň podtlaku viz kapitola 9).

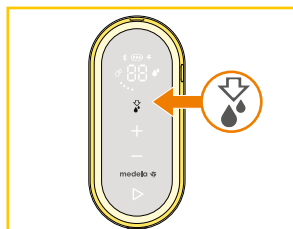


6. Jakmile začne mléko odtékat, stisknutím tlačítka Let-down přejděte do odsávací fáze.
 → Odsávačka pokračuje v odsávací fázi.
 → Nestisknete-li přepínací tlačítko Let-down do dvou minut, odsávačka se automaticky přepne do odsávací fáze.

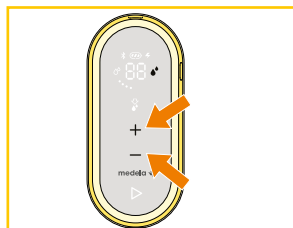

7. Upravte vakuum pomocí tlačítek Zvýšit intenzitu vakua (+) a Snížit intenzitu vakua (—), abyste našli pohodlnou úroveň podtlaku (viz kapitola 9).



8. Když je váš odsávací cyklus ukončen, stisknutím tlačítka Start/Pause ▸ zastavíte odsávání.
 → Pokud nedojde k žádné interakci matky s odsávačkou, odsávačka se sama automaticky zastaví po 30 minutách.

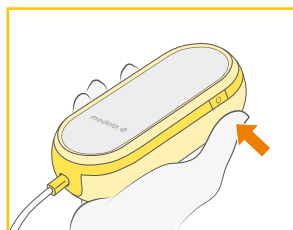

9. Vypněte odsávačku mateřského mléka stisknutím tlačítka On/Off ⏻.

Pozastavení

Odsávačka může být pozastavena ve fázi stimulace i odsávání.

Umožní vám to upravit vaši polohu či odsávací soupravu nebo věnovat pozornost svému okolí.


1. Když je odsávačka v provozu, stiskněte pro její pozastavení tlačítko Start/Pause ►.
Odsávání se zastaví a tlačítko Start/Pauza a zobrazení času blikají.
2. Chcete-li opět zahájit odsávání, stiskněte znovu tlačítko Start/Pauza ►.

Chcete-li zahájit zcela nový odsávací cyklus, vypněte a znovu zapněte odsávačku mateřského mléka dvojitým stisknutím tlačítka On/Off. ⏻.

i Informace

- Pokud se odsávání opět nespustí do dvou minut, odsávačka se automaticky vypne.
- Chcete-li pokračovat v odsávání, budete muset zahájit nový odsávací cyklus.
- Pokud potřebujete pozastavit odsávání na dobu delší než dvě minuty, doporučujeme znovu použít stimulační fázi.
- Nezapomeňte zaznamenat množství odsátého mléka do aplikace Medela Family.

Po odsávání

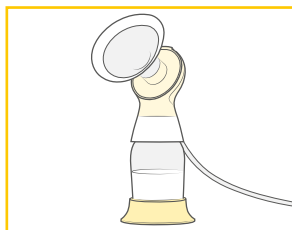

Připravte mléko pro skladování následujícím způsobem:


1. Abyste zabránili převrácení láhve, použijte stojan na láhve.



2. Uzavřete láhev víčkem.

Informace o skladování mléka naleznete v **kapitole 11**.

9. Nalezení pohodlné úrovně podtlaku

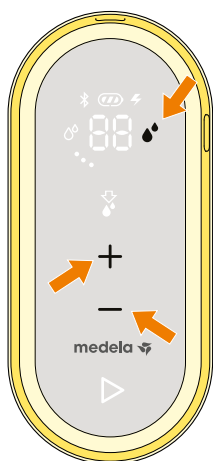

Jakmile odsáváte v **odsávací fázi** , zvýšte podtlak pomocí tlačítka Zvýšit intenzitu vakua (+) a zvyšujte intenzitu vakua až do okamžiku, kdy bude odsávání mírně nepříjemné (ne bolestivé), potom stiskněte tlačítko Snížit intenzitu vakua (—) a vakuum nepatrně snižte.

35

Informace

- Pohodlná úroveň podtlaku je nejvyšší nastavení vakua, při kterém je odsávání stále příjemné. Je to u každé ženy individuální.
- Stimulace by měla být na pohodlné úrovni vakua, snaha o maximální úroveň zde není nutná.
- Po celou dobu odsávání vyhodnocujte, která intenzita vakua je pro vás nejpohodlnější. S každým stadiem kojení se může měnit.

10. Speciální funkce

36

10.1 Bluetooth® připojení

Bluetooth je bezdrátová technologie pro výměnu dat na krátké vzdálenosti. Lze použít k připojení odsávačky mateřského mléka Freestyle Flex prostřednictvím osobního zařízení, například chytrého telefonu, k aplikaci Medela Family.


Připojením odsávačky k platforme Medela Family můžete automaticky přenášet údaje o odsávání (délka odsávacího cyklu, fáze a úrovně) a ručně zadávat množství odsátého mléka. Chcete-li využívat funkce platformy, musíte si vytvořit účet v Medela Family.

Instalace aplikace Medela Family

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Medela Family do svého mobilního zařízení. Aplikace je k dispozici zdarma pro operační systémy Apple® iOS a Android™.
2. Otevřete aplikaci Medela Family na svém mobilním zařízení a zaregistrujte se pomocí aplikace.

Připojení (spárování) odsávačky mléka Freestyle Flex

1. Ujistěte se, že je na vašem mobilním zařízení zapnuta funkce Bluetooth.
2. V Medela Family klikněte na „More“ (Více), přejděte na „Connected breast pump“ (Připojená odsávačka mateřského mléka) > „Set up a new breast pump“ (Nastavit novou odsávačku mléka) a postupujte podle pokynů k nastavení a párování na obrazovce, které zahrnují následující kroky:
3. Zapněte odsávačku mateřského mléka Freestyle Flex do pohotovostního režimu.

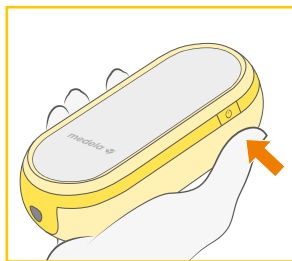

4. Stisknutím a podržením tlačítka Zap / Vyp  po dobu dvou sekund spusťte proces párování.


→ Indikátor Bluetooth  bliká, což značí, že je odsávačka mateřského mléka připravena ke spárování s vaším zařízením Bluetooth, a multifunkční displej zobrazuje párovací kód.

Rozpoznávání ochranných známek

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností Medela AG je podmíněno licencí.

Apple je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.

Android je ochranná známka společnosti Google LLC.

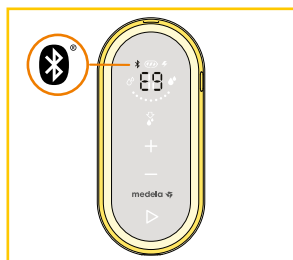

5. Přečtěte si párovací kód na multifunkčním displeji a vyberte odpovídající zařízení v aplikaci Medela Family.
 - Po úspěšném spárování se indikátor Bluetooth  na odsávačce trvale rozsvítí.
 - Pokud spárování nebude úspěšné do dvou minut, odsávačka se automaticky vypne.

Informace

- Sledováním vašich odsávacích cyklů na platformě Medela Family můžete zůstat v obraze díky denním upozorněním a vlastního obsahu.
- Přehled o historii vašich odsávacích cyklů vám dává příležitost efektivně plánovat každý den a sledovat změny ve vašem těle, jako je zvýšení nebo snížení produkce mléka.
- Po počátečním nastavení se na vaši odsávačce mateřského mléka po zapnutí automaticky zobrazí indikátor Bluetooth  na odsávačce mléka, pokud je spárované zařízení blízko a aplikace Medela Family je otevřená.
- S odsávačkou Freestyle Flex můžete spárovat více mobilních zařízení.
- S odsávačkou Freestyle Flex může komunikovat pouze jedno mobilní zařízení současně.
- Odsávačka Freestyle Flex má schopnost uložit si do paměti posledních 30 odsávacích cyklů. Pokud odsávačka není připojena před odsávacím cyklem 31, vaše historie bude přepsána novými daty odsávání.
- Po připojení k odsávačce váš účet v aplikaci Medela Family zaznamená nekonečné množství historických odsávacích cyklů.

Odebrání odsávačky Freestyle Flex z mobilního zařízení

1. Přejděte na platformu Medela Family..
2. Podle pokynů na obrazovce odeberte (zrušte spárování) odsávačky Freestyle Flex.

Informace


- Odebráním odsávačky Freestyle Flex z mobilního zařízení nedojde ke smazání informací o odsávání uložených v aplikaci Medela Family.
- Pokud znovu připojíte odsávačku a mobilní zařízení, přenesou se posledních 30 záznamů uložených v odsávačce.

Další informace najdete na www.medela.cz.


10.2 Opožděný start

Odsávačka Freestyle Flex je vybavena funkcí opožděného startu. Díky tomu se odsávačka spustí se zpožděním deseti sekund.

To je užitečné v případech, že chcete mít při zahájení odsávání volné ruce (např. pro držení prsních nástavců při odsávání z obou prsů).

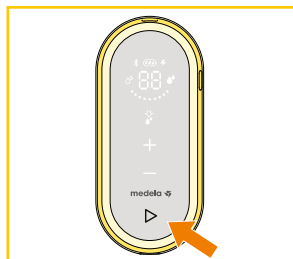

1. Chcete-li aktivovat zpoždění, stiskněte a podržte tlačítko Start/Pauza ▶ po dobu dvou sekund v pohotovostním režimu nebo v režimu pozastavení.
 - Odsávačka mateřského mléka vydá zvukový signál, který indikuje spuštění zpoždění.
 - Během doby zpoždění bliká tlačítko Start/Pauza ▶ a multifunkční displej zobrazuje zbývající čas v sekundách.
 - Po uplynutí doby zpoždění začne odsávačka mléka pracovat.

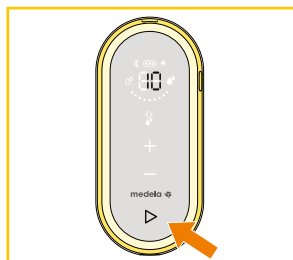

2. Chcete-li zpoždění přeskočit, stiskněte tlačítko Start/Pauza ▶.
 - Odsávačka mléka začne fungovat okamžitě.

11. Skladování a rozmrazování mateřského mléka

11.1 Skladování

**Pokyny pro skladování čerstvě odsátého mateřského mléka
(pro zdravé donošené děti)**

Pokojeová teplota 16 to 25°C (60 to 77°F)	Lednice 4°C (39°F) nebo chladnější	Mraznička -18°C (0°F) nebo chladnější	Mateřské mléko rozmražené v lednici
Nejlépe do 4 hodin	Nejlépe do 3 dnů	Nejlépe do 6 měsíců	Při pokojové teplotě: Do 2 hodin
*Do 6 hodin pro mléko odsávané za velmi čistých podmínek	*Do 5 dnů pro mléko odsávané za velmi čistých podmínek	*Do 9 měsíců pro mléko odsávané za velmi čistých podmínek	Lednice: Do 24 hodin Nezmrazujte opakovaně!

*Pokyny pro odsávání mléka za velmi čistých podmínek:

Před odsáváním mateřského mléka by si matky měly umýt ruce mýdlem a vodou nebo alkoholovým desinfekčním prostředkem. Díly odsávačky, láhve a místo pro odsávání musí být čisté. Prsy a bradavky není nutné před odsáváním umývat.

- Tyto pokyny pro skladování a rozmrazování mateřského mléka jsou pouhá doporučení. Pro další informace se obraťte na svou laktační poradkyni nebo odborníka/ci na kojení.
- Uchovávejte mateřské mléko v nejlhldnější části lednice (zadní část skleněné police nad přihrádkou na zeleninu).

11.2 Skladování mateřského mléka v chladicí tašce Medela

Vaše chladicí taška Medela obsahuje jedno chladicí médium Medela. Až čtyři 150 ml láhve s mateřským mlékem zůstanou chladné po dobu až deseti hodin v prostředí pokojové teploty uvnitř tašky odsávačky. Až čtyři 150 ml láhve s mateřským mlékem zůstanou chladné po dobu až osmi hodin v prostředí pokojové teploty uvnitř chladicí tašky, která není uložena v tašce odsávačky.

- Jakmile dokončíte odsávání, vložte láhev mateřského mléka nebo sáček na skladování mateřského mléka do chladicí tašky s chladicím médiem.
- Jakmile jste doma, přeneste láhve s mateřským mlékem nebo sáčky na skladování mateřského mléka do lednice nebo mrazničky.

11.3 Zmrazení

POZNÁMKA

- Opakované zmrazování/rozmrazování ničí strukturu mléka. Proto nikdy mateřské mléko opětovně nezmrazujte.
- Odsáté mateřské mléko je možné zmrazit v plastových lahvích nebo v sáčcích na skladování mléka. Nikdy neplňte lahve nebo sáčky do více než 3/4 objemu kvůli možnému rozpínání.
- Označte lahve nebo sáčky štítkem s datem odsátí a množstvím odsátého mléka.
- Plastové lahve a jednotlivé díly mohou být po zmrazení křehké a mohou se při pádu z výšky rozbít.
- Mateřské mléko nepoužívejte, pokud lahve nebo jednotlivé díly vykazují znaky poškození.

11.4 Rozmrazování

⚠ UPOZORNĚNÍ

Mateřské mléko nerozmrazujte ani neohřívejte v mikrovlnné troubě, ani v nádobě s vroucí vodou. To pomůže zachovat důležité složky a brání v popálení.

- Pro zachování složek rozmrazte mateřské mléko ponecháním přes noc v lednici
- Případně lze láhev nebo sáček podržet pod proudem teplé vody (max. 37 °C / 98,6 °F).

POZNÁMKA

Opětovného vmísení oddělených tuků dosáhnete jemným kroužením láhve nebo sáčkem. Mléko neprotřepávejte, ani nemíchejte.

11.5 Krmení mateřským mlékem

Před krmením z láhve se doporučuje, aby bylo kojení dobře zavedeno.

- Lahvičku, savičku a další součásti vždy zkontrolujte bezprostředně před a po každém použití. Pokud se zdá, že je savička prasklá nebo natržená, okamžitě ji přestaňte používat.
- Abyste předešli možnému nebezpečí udušení, vyzkoušejte pevnost savičky zatažením za její konec.
- Nepokoušejte se zvětšovat otvor v savičce.
- Kojenci nesmí být krmení z láhve bez dozoru dospělé osoby.
- Nepoužívejte savičku láhve jako dudlík.

Další informace o sběru a skladování mateřského mléka naleznete na adrese www.medela.cz.

12. Údržba a péče

12.1 Péče o napájecí adaptér



POZNÁMKA

Abyste udrželi napájecí adaptér a kabel v dobrém provozním stavu, věnujte pozornost následujícímu:
Neodpojujte kabel ani napájecí adaptér taháním za kabel, ale držte jej za konektor kabelu a tělo adaptéru.

Cestování do zahraničí

i Informace

Tipy na cestování s odsávačkou

Při cestování do zahraničí doporučujeme zakoupit cestovní adaptér (není součástí produktu), který odpovídá odpovídající zásuvce. Poradte se s lidmi ze země, kterou navštívíte, abyste zjistili, jaký typ adaptéru bude fungovat nejlépe. Napájecí adaptér odsávačky mléka je dvojitý a nevyžaduje uzemněnou zásuvku.

12.2 Údržba baterie

Vaše odsávačka obsahuje zabudovanou (nevyměnitelnou) lithium-iontovou dobíjecí baterii.

POZNÁMKA

V případě zcela vybité baterie nelze odsávačku ihned po připojení k napájecímu adaptéru použít. Před zapnutím odsávačky nechte baterii nabíjet alespoň 15 minut.

POZNÁMKA

- Pro optimální výkon odsávačky a baterie použijte napájecí adaptér dodávaný s odsávačkou.
- Ujistěte se, že napětí napájecího adaptéru je kompatibilní se zdrojem napájení.

i Informace

Chcete-li zachovat životnost baterie:

- Uchovávejte odsávačku na chladném místě.
- Dobijte baterii, než se zcela vybije. To je lepší pro životní cyklus baterie.
- Před skladováním odsávačky plně nabijte baterii.

Informace o stavu nabití baterie najdete v **části 8.2**.

- Pokud byla vaše odsávačka uložena na horkém místě, nemusí se okamžitě napájet z baterie. Chcete-li obnovit normální funkci baterie, nechte odsávačku vychladnout po dobu jedné hodiny. Během této doby můžete odsávačku napájet pomocí napájecího adaptéru zapojeného do zásuvky ve zdi.

Cestování do zahraničí

i Informace

Tato odsávačka mléka má lithium-iontovou baterii. Přeprava takových baterií v letadle může být omezena zemí, kterou navštěvujete. Poradte se se zemí, kterou navštěvujete, abyste zjistili, zda existují nějaká omezení týkající se cestování s lithium-iontovými bateriemi.

12.3 Dlouhodobé skladování

Vaše odsávačka obsahuje dobíjecí baterii. Aby se zachovala odsávačka, pokud ji delší dobu nepoužíváte, automaticky se přepne do režimu skladování.

Chcete-li jej přepnout z režimu skladování, připojte odsávačku k externímu zdroji energie a nabíjejte baterii po dobu dvou hodin.


Před skladováním odsávačky na delší dobu nezapomeňte:



- ☐ Vyčistit odsávačku a láhve
(viz **kapitola 5**)



- ☐ Vyčistit motor
(viz **kapitola 5.5**)

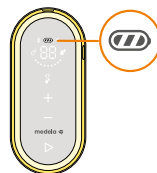

- ☐ Ujistit se, že je baterie nabitá (viz níže)

Nejllepší je plně nabít baterii před dlouhodobým skladováním odsávačky mléka. Informace o stavu nabití baterie najdete v **části 8.2**.

13. Řešení problémů

V případě neočekávaného chování odsávačky zkontrolujte tabulku řešení problémů. Vyhledejte problém ve sloupci „Problém“ a postupujte podle pokynů ve sloupci „Řešení“.

Tabulka řešení problémů

Problém	Řešení
Po stisknutí tlačítka On/Off se odsávačka mléka nepřepne do pohotovostního režimu	• Držali jste tlačítko On/Off příliš krátce nebo příliš dlouho. • Stiskněte tlačítko On/Off, dokud neuslyšíte zvukový signál, a poté jej uvolněte. Pokud je odsávačka v režimu skladování, bude trvat o něco déle (přibližně jednu sekundu), dokud nebude vydán zvukový signál.
Po stisknutí tlačítka On/Off se displej nerozsvítí	• Chcete-li odsávačku resetovat, stiskněte a podržte tlačítko On/Off (na boku) po dobu sedmi až deseti sekund. • Pokud nedojde ke změně, ujistěte se, že je odsávačka mateřského mléka připojena ke správně fungujícímu zdroji energie. • Pokud stále nedojde ke změně, kontaktujte zákaznický servis Medela.
Časovač po stisknutí tlačítka Start/Pause nefunguje	• Kontaktujte zákaznický servis Medela.
Odsávačka po stisknutí tlačítka Start/Pause neprodukuje žádné vakuum (motor nefunguje)	• Ujistěte se, že je odsávačka zapnutá. • Kontaktujte zákaznický servis Medela.
Odsávačka místo sání vytváří pouze konstantní vakuum	• Kontaktujte zákaznický servis Medela.
Odsávačka mléka přestane fungovat nebo ji nelze zapnout (vydává zvukový signál a všechny prvky displeje baterie blikají)	• Odsávačka mléka odmítá operaci kvůli přehřátí baterie. Nechte motorovou jednotku vychladnout a poté odsávačku znovu spusťte.
Všechny prvky na displeji baterie blikají, když se pokoušíte nabít odsávačku	• Nabíjení není možné, pokud je teplota baterie příliš vysoká. Nechte motor vychladnout a poté pokračujte v nabíjení.

Sání je slabé nebo žádné	• Ujistěte se, že jsou všechny díly odsávaček čisté a suché a že připojení jsou zabezpečena. • Počas odsávání zkontrolujte, zda prsní nástavec správně těsní prs po celém obvodu. • Při odsávání z jednoho prsu zasuňte nepoužitou hadičku do držáku hadičky. • Pokud se sání po provedení těchto kroků nezlepší, kontaktujte zákaznický servis Medela.
Odsávačka nereaguje podle očekávání	• Chcete-li odsávačku resetovat, stiskněte a podržte tlačítko On/Off (na boku) po dobu sedmi sekund. • Pokud nedojde ke změně, kontaktujte zákaznický servis Medela.
Pokud odsávačka navlhne	• Odpojte síťový adaptér z elektrické zásuvky a vypněte odsávačku. • Uložte odsávačku na 24 hodin na suché a teplé místo.
Odsávačka mléka byla ponořena do vody	• Odpojte síťový adaptér z elektrické zásuvky a vypněte odsávačku. • Kontaktujte zákaznický servis Medela.
Data se nepřenáší	• Funkce Bluetooth  na mobilním zařízení je vypnutá. Zapněte funkci Bluetooth a zkuste data odeslat znovu. • Párování mezi dvěma zařízeními nebylo dokončeno. Znovu proveďte pokyny k párování. Viz část 10.1. • Mobilní zařízení je příliš daleko od odsávačky mléka. Přesuňte zařízení a odsávačku blíže k sobě. • Aplikace v mobilním zařízení není připravena. Zkontrolujte aplikaci.

Pokud se vám problém s odsávačkou nepodařilo vyřešit nebo máte další dotazy, obraťte se na zákaznický servis Medela. Kontaktní údaje naleznete na adrese **www.medela.com**. V části „Kontakt“ vyberte svou zemi.

14. Příslušenství

Příslušenství

Číslo výrobku	Produkt
* Dostupnost záleží na vašem regionu, více zjistíte na místních webových stránkách/obchodech.	Prsní nástavec PersonalFit Flex S (21 mm)
	Prsní nástavec PersonalFit Flex M (24 mm)
	Prsní nástavec PersonalFit Flex L (27 mm)
	Prsní nástavec PersonalFit Flex XL (30 mm)
	Freestyle Flex hadička
	PersonalFit Flex konektor

* Pokud je výsledek odsávání neuspokojivý nebo je odsávání bolestivé, obraťte se na Vaši laktační poradkyni nebo odborníka na kojení. Při použití jiné velikosti prsního nástavce může být odsávání příjemnější a úspěšnější.

V případě potíží s hledáním požadovaného příslušenství kontaktujte zákaznický servis Medela. Kontaktní údaje najdete na www.medela.cz v části „Kontakt“.

Pro výměnu ztracených nebo vadných dílů kontaktujte zákaznický servis Medela.

Další produkty Medela jsou k dispozici na webu **www.medela.cz**

15. Záruka

46

Podrobné informace o záruce naleznete v brožůře „Mezinárodní záruka“.

16. Likvidace


Likvidace zařízení

Na konci své provozní životnosti oddělte jednotlivé díly odsávačky a zlikvidujte je v souladu s následujícími pokyny.

Prsní nástavce, konektor, hadičky a příslušenství

Díly jsou vyrobeny z plastů, které nepoškozují životní prostředí, pokud jsou likvidovány jako odpad z domácnosti. Recyklujte nebo likvidujte podle místních předpisů.

Motor a síťový adaptér

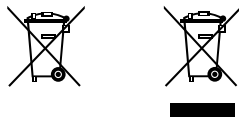

Nelikvidujte elektrická/elektronická zařízení spolu s netříděným komunálním odpadem, třídte toto zařízení určené k likvidaci.

V Evropské unii má výrobce nebo prodejce povinnost převzít zařízení určené k likvidaci. Jiné země mohou mít zavedeny podobné systémy sběru a recyklace. Zlikvidujte použité zařízení v souladu s místními předpisy.

Na odpovídající místa sběru zařízení určeného k likvidaci se informujte v místě prodeje nebo se obraťte na místní úřad.

Tříděný sběr a recyklace vašeho zařízení určeného k likvidaci pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistí, že bude recyklováno způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečné materiály přítomné v elektrických/elektronických zařízeních mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí, nejsou-li tato zařízení vhodným způsobem zlikvidována.

17. Význam symbolů

Následující tabulky vysvětlují význam symbolů, které se nacházejí na částech produktu a jeho obalu.

Symbole použité v tomto návodu



Obecný výstražný symbol bezpečnosti upozorňující na informace související s bezpečností.



Určuje rozsah teplot (např. pro provoz, přepravu nebo skladování).



Určuje rozsah relativní vlhkosti (např. pro provoz, přepravu nebo skladování).



Tento symbol označuje omezení atmosférického tlaku (např. pro provoz, přepravu a skladování).



Označuje, že toto zařízení disponuje bezdrátovou technologií Bluetooth.

Symbole na motoru



Označuje umístění tlačítka On/Off.



Označuje výrobce.



Označuje datum výroby.



Označuje číslo dílu zařízení.



Označuje výrobní číslo zařízení.



Označuje shodu s mezinárodními požadavky týkajícími se ochrany před úrazem elektrickým proudem (použité součásti typu BF).



Nelikvidujte elektrická/elektronická zařízení spolu s netříděným komunálním odpadem (zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy).



Označuje, že pro připojení zařízení k elektrické síti je vyžadován zvláštní samostatný napájecí adaptér, a uvádí jeho model/typ.



Tento symbol označuje, že je potřeba dodržovat pokyny k použití.



Označuje soulad s požadavky Federal Communications Commission.



Označuje, že toto zařízení disponuje bezdrátovou technologií Bluetooth.



Označení shody s předpisy označuje shodu s požadavky EMC a bezpečnostními požadavky v Austrálii.



Značka CE označuje shodu s evropskou směrnicí o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě a rádiových zařízeních.

Význam symbolů

48

Symbols na napájecím adaptéru

Symbols na napájecím adaptéru se mohou lišit v závislosti na trhu, kde se jednotka prodává.



Označuje střídavý proud.



Označuje stejnosměrný proud.



Označuje polaritu USB výstupu napájení.



Označuje, že zařízení je elektrickým spotřebičem třídy II (s dvojitou izolací).



Označuje, že zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru.



Přečtěte si pokyny a postupujte podle nich.



Označuje úroveň účinnosti pro externí zdroje napájení.



Nelikvidujte elektrická/elektronická zařízení spolu s netříděným komunálním odpadem (zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy).



Značka CE označuje shodu s evropskou směrnicí o nízkém napětí a elektromagnetické kompatibilitě. Označuje, že výrobek je v souladu s evropskými směrnicemi pro snížení obsahu nebezpečných látek.



Označuje, že zařízení je oddělovací bezpečnostní transformátor pro ochranu proti zkratu.



Označuje, že elektronické zařízení obsahující transformátor(y) a elektronický obvod(y) převádí elektrické napájení na jednoduché nebo vícenásobné výstupy napájení.



Označení EAC (Eurasian Conformity) označuje, že produkt splňuje základní požadavky na bezpečnost podle technických předpisů Eurasijské celní unie.



Značka UL LISTED označuje, že výrobek je vyroben v souladu s bezpečnostními požadavky UL pro USA a Kanadu.



Označuje soulad s požadavky Federal Communications Commission.



Značka NOM (Norma Oficial Mexicana) NYCE označuje, že produkt byl shledán splňujícím platné požadavky Mexika.



Značka shody s předpisy označuje shodu s australskými požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost.



Označuje shodu s požadavky na povinnou certifikaci v Číně – „China Compulsory Certification“.



Označuje, že období, kdy je používání šetrné k životnímu prostředí „Environment Friendly Use Period“ je deset let (kontrola znečištění v Číně).



Značka PSE označuje, že výrobek je certifikován podle japonského zákona o bezpečnosti elektrických spotřebičů a materiálů.



Značka SAFETY označuje, že výrobek je registrován jako kontrolované zboží podle singapurských předpisů na ochranu spotřebitele.

Symbole na obalu výrobku

	Označuje výrobce.
	Označuje číslo dílu zařízení.
	Obsahuje křehké zboží. Vyžaduje opatrnou manipulaci.
	Uchovávejte mimo sluneční světlo.
	Uchovávejte mimo dosah deště. Uchovávejte v suchu.
	Určuje rozsah teplot pro přepravu nebo skladování.
	Určuje rozsah relativní vlhkosti pro přepravu nebo skladování.
	Tento symbol označuje omezení atmosférického tlaku pro přepravu nebo skladování.
	Obal obsahuje látky, které mohou přicházet do kontaktu s potravinami dle nařízení (ES) 1935/2004.
	Označení CE označuje shodu s příslušnými evropskými směrnici.
	Přečtěte si pokyny a postupujte podle nich.
	Nelikvidujte elektrická/elektronická zařízení spolu s netříděným komunálním odpadem (zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy).
	Označuje, že materiál je recyklovatelný.
	Označuje, že obal je vyroben z papírové lepenky.
	Symbol MCMC (Malaysian Communications and Multimedia Commission) označuje soulad s požadavky na rádiový přenos v Malajsii.
	Označení EAC (Eurasian Conformity) označuje, že produkt splňuje základní požadavky na bezpečnost podle technických předpisů Eurasijské celní unie.
	Symbol NTC (National Telecommunication Commission) označuje, že zařízení má typ schválení pro rádiový přenos ve Filipínské republice.

18. Mezinárodní předpisy

50

18.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMK)

Odsávačka Freestyle Flex splňuje všechny požadavky příslušných norem a předpisů týkající se elektromagnetického vyzařování a odolnosti proti rušení.

VAROVÁNÍ

Elektrická odsávačka mateřského mléka Freestyle Flex by se neměla používat ani ukládat v blízkosti jiného zařízení. Je-li použití nebo uložení v blízkosti jiných zařízení nezbytné, je třeba elektrickou odsávačku Freestyle Flex sledovat a ověřovat normální provoz v konfiguraci, ve které bude používána.

Bezdrátová komunikační zařízení, jako jsou domácí síťová bezdrátová zařízení, mobilní telefony, bezdrátové telefony a jejich základny nebo vysílačky, mohou ovlivnit provoz elektrické odsávačky a měla by proto být umístěna alespoň ve vzdálenosti 30 cm od zařízení.

18.2 Pomůcka pro pití

Díly určené pro krmení dítěte jsou v souladu s evropskou normou EN 14350.

19. Technické údaje

Souhrn důležitých technických specifikací

Výkon vaku (v nadmořské výšce 500 m
[atmosferický tlak 954,62 hPa])

-45 to -245 mmHg

45 to 111 cpm

Síťový adaptér (Model: S010BL*0500200)

*kód země

Vstup	100 - 240 V~ 50/60 Hz max. 0.4 A
Výstup	5 V --- 2 A 10 W
Průměrná účinnost	79%
Spotřeba energie bez zatížení	Nižší než 0,1 W



Rozsah provozních teplot



Rozsah provozní vlhkosti



Rozsah okolního tlaku



Přepravní/skladovací teplota



Přepravní/skladovací rozsah vlhkosti

Motor

Kapacita baterie a typ	3.7 V, 2750 mAh Li-ion
Velikost	148 x 66 x 46,5 mm
Hmotnost	273 g

Standardní přenos: Bluetooth verze 4.0 LE

Frekvenční rozsah: 2402-2480 MHz

Max. výstupní výkon: +4 dBm (třída 2)

Materiály dotýkající se kůže nebo přicházející do styku s mlékem

- Prsní nástavec: Polypropylen, termoplastický elastomer
- Konektor: Polypropylen, silikon
- Láhev: Polypropylen
- Víčko: Polypropylen

Všechny části, které přicházejí do styku s mateřským mlékem, neobsahují BPA (bisfenol A).

1. Dôležité bezpečnostné upozornenia

52

 Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky pokyny.
Tento návod si ponechajte na budúce použitie.

Varovania označujú všetky pokyny, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poraneniu používateľa alebo poškodeniu výrobku.

Nasledujúce symboly a signálne slová vyjadrujú význam varovaní:

VAROVANIE

Môže spôsobiť vážne poranenie alebo smrť.

UPOZORNENIE

Môže spôsobiť menej vážne poranenie.

POZNÁMKA

Môže viesť k materiálnym škodám (netýka sa poranenia osôb).

Informácie

Užitočné alebo dôležité informácie, ktoré sa netýkajú bezpečnosti.

Pri používaní elektrických výrobkov, obzvlášť v prítomnosti detí, vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia.

VAROVANIE

V záujme predchádzania požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo závažným popáleninám:

- Používajte len sieťový adaptér a kábel dodávaný so zariadením. Nevhodný sieťový zdroj alebo kábel môže viesť k nebezpečenstvu požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poruche zariadenia.
- Nikdy nepoužívajte elektrické zariadenie, ktoré má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadlo na zem alebo sa poškodilo, alebo ak spadlo do vody. V prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite prestaňte sieťový adaptér používať a kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Medela.
- Nepoužívajte elektrický výrobok, ktorý bol vystavený vode alebo iným kvapalinám vrátane:
 - Nepoužívajte pri kúpeli ani sprchovaní.
 - Nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín.
 - Nenechajte tiecť vodu po odsávačke.
 - Ak bol elektrický výrobok vystavený vode alebo iným kvapalinám, nedotýkajte sa ho, neodpájajte ho z elektrickej zásuvky, ani ho nevypínajte a kontaktujte výrobcu.

VAROVANIE

V záujme odstránenia zdravotných rizík a rizika vážneho poranenia:

- Nepoužívajte odsávačku Freestyle Flex™ pri vedení motorového vozidla.
- Odsávanie môže vyvolať pôrod. S odsávaním začnite až po pôrode. Ak otehotníte počas dojčenia alebo odsávania, skôr, ako budete pokračovať, poraďte sa s kvalifikovaným zdravotníckym odborníkom.
- Pre matky infikované hepatitídou B, hepatitídou C alebo vírusom HIV: odsávanie materského mlieka nezníži ani neodstráni riziko prenesenia vírusu na dieťa prostredníctvom materského mlieka.
- Časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s prsníkom a materským mliekom, umyte po každom použití.
- Ak je odsávačka materského mlieka alebo príslušenstvo používané v blízkosti detí, je nutný starostlivý dohľad.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí do 14 rokov), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nedozerá osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im neposkytne pokyny o používaní prístroja.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- S týmto zariadením môžu manipulovať deti od ôsmich rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú výsledným rizikám.
- Deti sa nesmú hrať s týmto prístrojom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

UPOZORNENIE

V záujme predchádzania požiaru alebo popáleninám:

- Uistite sa, že napätie na sieťovom adaptéri je kompatibilné so zdrojom elektrickej energie. Technické údaje nájdete v **kapitole 19**.
- S výnimkou nabíjania elektrické výrobky vždy odpojte od napájania hneď po použití.
- Výrobok neumiestňujte ani neuchovávajte na mieste, kde môže spadnúť alebo byť vtiahnutý do odpadu alebo odtoku.
- Prístroj a jeho príslušenstvo nie sú odolné voči teplu. Udržujte ich mimo horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.

UPOZORNENIE

V záujme odstránenia zdravotných rizík a rizika úrazu:

- Tento výrobok je určený len pre jedného používateľa. Používanie viacerými osobami môže predstavovať zdravotné riziko a je dôvodom na zrušenie platnosti záruky.
- Servis ani opravy tohto výrobku nie sú možné. Opravy nevykonávajte sami.
- Prístroj neupravujte.
- Nikdy nepoužívajte poškodený prístroj. Poškodené alebo opotrebované časti vymeňte.
- Prístroj používajte výlučne na určený účel podľa popisu v tomto návode na použitie.
- Prístroj nepoužívajte počas spánku ani vtedy, ak sa cítite nadmerne ospalá.
- Ak je v hadičke pleseň, prerušte používanie a hadičku vymeňte.
- Materské mlieko neohrievajte v mikrovlnnej rúre, ani ho nevarte. Pri zohriatí v mikrovlnnej rúre môže dôjsť k závažnému popáleniu úst dieťaťa v dôsledku horúcich miest, ktoré vzniknú v mlieku počas prípravy v mikrovlnnej rúre (pri príprave v mikrovlnnej rúre sa môže zmeniť aj zloženie materského mlieka).

UPOZORNENIE

V záujme odstránenia zdravotných rizík a rizika úrazu:

- Všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s prsníkom a materským mliekom, očistite a dezinfikujte pred prvým použitím.
- S odsávačkou Freestyle Flex™ používajte len diely odporúčané spoločnosťou Medela.
- Ak je odsávanie nepohodlné alebo spôsobuje bolesť, vypnite odsávačku, prstom uvoľnite prisatie prsného nastavca k prsníku a odoberte prsný nastaviec z prsníka.
- I keď pri prvom použití odsávačky môžete mať nepríjemný pocit, nemali by ste cítiť bolesť. Ak nemáte istotu o správnej veľkosti prsného nastavca, navštívte webovú stránku **www.medela.sk** alebo sa poraďte s laktačnou poradkyňou, ktorá vám pomôže pri výbere.
- Obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo odborníka na dojčenie, ak môžete odsávať iba minimálne alebo žiadne mlieko alebo ak je odsávanie bolestivé. Ďalšie informácie nájdete v **kapitole 6**.

POZNÁMKA

Zaobchádzaniu s fľašami a komponentmi venujte náležitú pozornosť:

- Plastové fľaše a jednotlivé komponenty môžu byť po zmrazení krehké a pri páde sa môžu rozbiť.
- Fľaše a jednotlivé komponenty sa môžu poškodiť pri nesprávnom zaobchádzaní (napr. pri páde, nadmernom utiahnutí alebo náraze).
- Ak fľaše alebo komponenty vykazujú známky poškodenia, materské mlieko nepoužite.

1. Dôležité bezpečnostné upozornenia	4
2. Účel použitia	11
3. Popis produktu	11
3.1 Popis zariadenia	11
3.2 Súčasťou zariadenia je	12
4. Začínáme s odsávaním	14
4.1 Príprava na odsávanie	14
4.2 Napájanie odsávačky	14
5. Čistenie	15
5.1 Prehľad čistenia	16
5.2 Demontáž	17
5.3 Umývanie	18
5.4 Dezinfekcia	19
5.5 Čistenie motora	20
5.6 Čistenie hadičky	21
6. Veľkosť prsného nadstavca	22
6.1 Výber správnej veľkosti prsného nadstavca	22
6.2 Optimalizácia veľkosti prsného nadstavca	23
7. Zostavenie odsávačky	24
7.1 Zostavenie odsávačky	24
7.2 Príprava na odsávanie z jedného prsníka	26
7.3 Príprava na odsávanie z oboch prsníkov súčasne	27
7.4 Príprava na odsávanie bez držania odsávacieho setu pomocou Pásu pre ľahké odsávanie	28
8. Ovládanie odsávačky	29
8.1 Podmienky a označenie	29
8.2 Ovládacie a zobrazovacie prvky	29
8.3 Nabíjanie batérie	31
8.4 Odsávanie materského mlieka	32
9. Nájdienie pohodlnej úrovne podtlaku	35
10. Špeciálne funkcie	36
10.1 Bluetooth® pripojenie	36

10.2. Odložený štart	38
11. Skladovanie a rozmrazovanie materského mlieka	39
11.1 Skladovanie	39
11.2 Skladovanie materského mlieka v chladiacej taške Medela	39
11.3 Zmrazovanie	40
11.4 Rozmrazovanie	40
11.5 Kŕmenie materským mliekom	40
12. Údržba a starostlivosť	41
12.1 Starostlivosť o sieťový adaptér	41
12.2 Údržba batérie	41
12.3 Dlhodobé skladovanie	42
13. Riešenie problémov	43
14. Príslušenstvo	45
15. Záruka	46
16. Likvidácia	46
17. Význam symbolov	47
18. Medzinárodné predpisy	50
18.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMK)	50
18.2 Pomôcka na pitie	50
19. Technické údaje	51

2. Účel použitia

Odsávačka mlieka Freestyle Flex™ je elektrická odsávačka určená pre ženy s laktáciou na odsávanie a zber materského mlieka z prsníkov. Odsávačka Freestyle Flex™ je určená pre jednu používateľku.

59

3. Popis produktu

3.1 Popis zariadenia

Freestyle Flex™ je elektrická odsávačka na osobné použitie, ktorá disponuje technológiou 2-fázového odsávania a umožňuje odsávanie z jedného alebo z oboch prsníkov.

Prevádzková životnosť odsávačky Freestyle Flex™ je 250 hodín.

3.2 Súčasťou zariadenia je


2x PersonalFit Flex
prsňý nadstavec
(21 mm)

2x PersonalFit Flex
prsňý nadstavec
(24 mm)

Ďalšie veľkosti prsného
nástavce nájdete
v kapitole 6

4x Fľaša

1x Motor

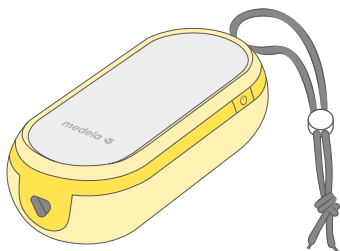

2x PersonalFit Flex konektor




1x Hadička

Krátke konce hadičky
(pripojenie k jednému
alebo k dvom konekto-
rom)

Držiak hadičky


Dlhý koniec hadičky
(pripojenie k motoru)

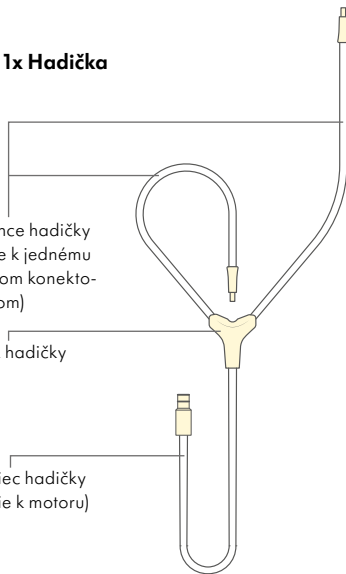

Náhradné diely a príslušenstvo, ktoré je možné objednať, nájdete v kapitole 14.




4x Viacúčelové viečko
fľaše

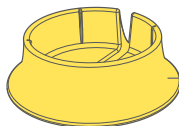

2x Stojan na fľaše


1x Sieťový adaptér s káblom

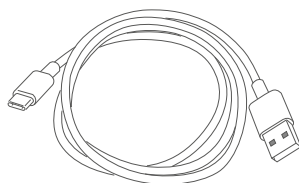

1x Taška odsávačky




1x Chladiaca taška

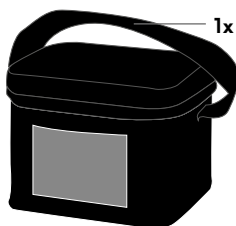

1x Chladiace
médium

(súčasťou chladiacej
tašky)

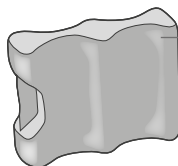

Náhradné diely a príslušenstvo, ktoré je možné objednať, nájdete v **kapitole 14**.

Všetky obrázky zobrazené v tomto návode slúžia iba pre ilustráciu. Skutočný produkt sa môže líšiť v dôsledku miestnych rozdielov alebo vylepšení produktu. Spoločnosť Medela si vyhradzuje právo nahradiť akúkoľvek súčasť alebo príslušenstvo náhradou za rovnocenný výkon.

4. Začíname s odsávaním

62

4.1 Príprava na odsávanie


Aby ste boli pripravení na odsávanie mlieka, vykonajte pred prvým použitím odsávačky nasledujúce kroky:

1. Nabíjajte batériu odsávačky mlieka Freestyle Flex™ dve hodiny - pozri časť 8.3.
2. Pred čistením oddelte všetky časti, ktoré sú vystavené prsiam alebo materskému mlieku - pozri časť 5.2.
3. Vyčistite a dezinfikujte diely - pozri časti 5.3 a 5.4.

4.2 Napájanie odsávačky


Existujú dva spôsoby, ako napájať odsávačku pre odsávanie:

Dobíjacou batériou

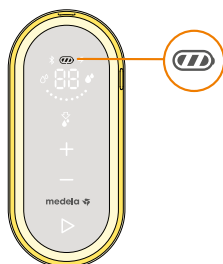

alebo

Sieťovým adaptérom/káblom

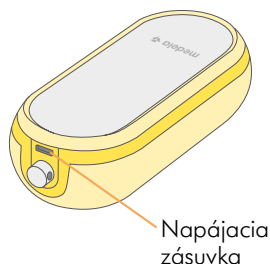

Pred prvým použitím nabite batériu odsávačky po dobu dvoch hodín pomocou napájacieho adaptéra.

Zastrčte napájací kábel do napájacej zásuvky na hornej strane motora.

→ Po dokončení nabíjania sa na displeji batérie zobrazia všetky tri pruhy.

Podrobnosti o displeji batérie pozri **časť 8.2.**

Podrobnosti o napájaní odsávačky/nabíjania batérie - pozri **časť 8.3.**

5. Čistenie

Potrebné vybavenie:

- Jemná tekutina na umývanie
- Čistá mäkká kefa
- Čisté umývadlo
- Pitná voda
- Čistý hrniec na vriacu vodu

Časti na umývanie alebo dezinfekciu:

- Prsné nadstavce
- Fľaše na materské mlieko
- Viečka
- Konektory
- Membrány

UPOZORNENIE

Aby ste zachovali časti odsávačky čisté a hygienické:

- Okamžite po každom použití oddelte a umyte všetky diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Pomôže to odstrániť zvyšky materského mlieka a predchádzať rastu baktérií.
- Dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou.
- Na čistenie používajte výlučne pitnú alebo balenú vodu.
- Jednotlivé komponenty odsávačky neumiestňujte za účelom opláchnutia alebo umytia priamo do drezu. Používajte čisté umývadlo používané len na potreby na kŕmenie detí.
- Na utieranie alebo oklepanie komponentov dosucha nepoužívajte utierku na riad.
- Na čistenie nepoužívajte dezinfekčné prostriedky.

POZNÁMKA

Aby ste zabránili poškodeniu hadičiek:

- Nečistite hadičku tu opísaným spôsobom ani pomocou vreciek Quick Clean v mikrovlnnej rúre. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti 5.6.

POZNÁMKA

Venujte pozornosť nasledovnému:



- Počas čistenia postupujte opatrne, aby ste nepoškodili časti odsávacieho setu.
- Až do ďalšieho použitia uchovávajte suchý odsávací set v čistom vrecku alebo nádobe.
- Neodkladajte mokré ani vlhké časti, aby sa nevytvorila pleseň.
- Ak spozorujete biele zvyšky na komponentoch po ich vyvárání, vaša voda môže mať vysoký obsah minerálov. Zvyšky odstráňte poutieraním komponentov čistou utierkou a nechajte ich vyschnúť na vzduchu.
- Na vyvárание odporúčame destilovanú vodu, aby ste predchádzali postupnému usadzovaniu minerálov, ktoré môžu zhoršiť stav komponentov.

5.1 Prehľad čistenia


Umývanie a dezinfekcia sú dve rôzne činnosti. Musia sa vykonávať osobitne, aby ste chránili seba a svoje dieťa a aby ste zachovali výkon zariadenia.

Umývanie – Očistenie povrchov jednotlivých dielov fyzickým odstránením nečistôt.

Dezinfekcia – Likvidácia živých mikroorganizmov, ako sú plesne, baktérie alebo vírusy, ktoré môžu byť prítomné na povrchoch častí odsávačky.

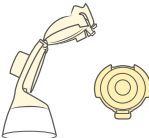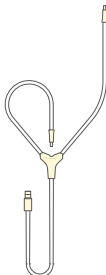	Prsné nadstavce	Konektory a membrány	Fľaše & viečka
Kedy vyčistiť			
Pred prvým použitím	Rozložte diely podľa časti 5.2 Diely umyte podľa časti 5.3 Dezinfikujte diely podľa časti 5.4		
Po každom použití	Rozložte diely podľa časti 5.2 Diely umyte podľa časti 5.3		
Raz denne	Rozložte diely podľa časti 5.2 Dezinfikujte diely podľa časti 5.4		
	Hadica	Motor	
Kedy vyčistiť			
Podľa potreby	Za normálnych okolností čistenie nie je potrebné. Pozri časť 5.6.	Utrite čistou vlhkou utierkou. Pozri časť 5.5.	

5.2 Demontáž

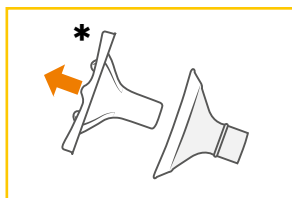

Pred prvým použitím


Odstráňte a zlikvidujte ochranný kryt * z prsného nadstavca.



Po každom použití

Rozložte odsávací set na jednotlivé diely (prsny nadstavec, konektor a fľaša na mlieko) nasledujúcim spôsobom:

1. Odstráňte prsný nadstavec z konektora.
2. Otvorte zadný kryt konektora stlačením oboch klapiek a otočením krytu nahor.
3. Odstráňte membránu z tela konektora.
4. Oddelte fľaše na mlieko, viečka a stojany na fľaše.

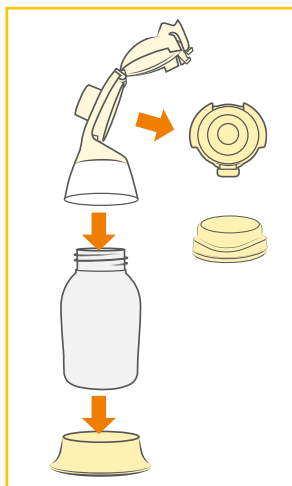


5.3 Umývanie


Umývanie je dôležité z hygienického hľadiska a slúži na čistenie povrchu dielov fyzickým odstránením nečistôt. Diely umývajte buď ručne alebo v umývačke riadu.

Pred prvým použitím a po každom použití

Ručné oplachovanie a umývanie alebo

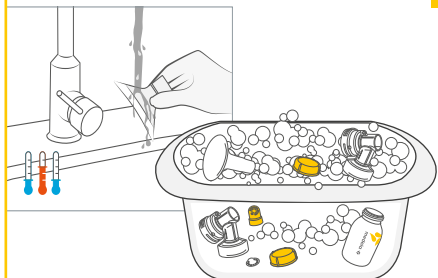

Umývanie v umývačke riadu

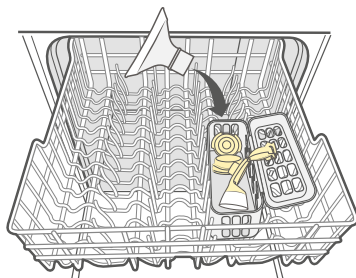

Nevkladajte diely priamo do kuchynského drezu pre opláchnutie a umývanie. Pre dojčenské potreby používajte vyhradené umývadlo.

1. Rozložené diely, s výnimkou hadičky, opláchnite studenou a čistou pitnou vodou (približne 20 °C).
2. Následne ich umyte v dostatočnom množstve teplej mydlovej vody (približne 30 °C). Používajte bežne dostupný tekutý prípravok na umývanie, najlepšie bez umelých vôní a farbív (pH neutrálne).
3. Diely oplachujte 10 až 15 sekúnd studenou vodou (približne 20 °C).
4. Po umytí nechajte vyschnúť.

1. Umiestnite rozložené časti okrem hadičky do hornej zásuvky alebo do časti pre príbor. Používajte komerčne dostupný prostriedok na umývanie riadu.
2. Po umytí nechajte vyschnúť.

i Informácie

Pri používaní umývačky riadu môže dôjsť k zmene farby dielov. To neovplyvní funkciu súčastí. Hadičky bežne neumývajte. Ďalšie informácie nájdete v časti **5.6**.

Sušenie

Nechajte komponenty vyschnúť na vzduchu na čistej, nepoužitej utierke na riad alebo papierovej utierke.




5.4 Dezinfekcia

Dezinfekcia je dôležitá pre hygienu a slúži k usmrčovaniu živých organizmov, ako sú baktérie alebo vírusy. Prevarte časti buď na sporáku alebo použite mikrovlnné vrecká Quick Clean.

Pred prvým použitím a raz denne

Dezinfekcia na sporáku

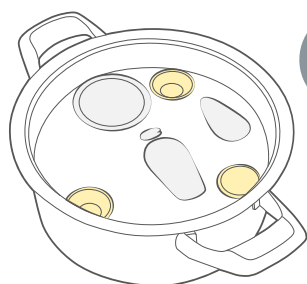

10min

alebo

Dezinfekcia v mikrovlnnej rúre



1. Ponorte umyté diely okrem hadičky do vody a vyvárajte minimálne 10 minút.
2. Po dezinfekcii nechajte vyschnúť.

1. Pri použití vreciek Quick Clean v mikrovlnnej rúre postupujte podľa návodu na použitie uvedenom na vrecku.
2. Po dezinfekcii nechajte vyschnúť.

* Dostupnosť vo vašej krajine zistíte na miestnych webových stránkach/obchodoch.

Sušenie

1. Nechajte komponenty vyschnúť na vzduchu na čistej, nepoužitej utierke na riad alebo papierovej utierke.
2. Suché komponenty skladujte v suchom prostredí. Neuchovávajte ich vo vzduchotesnej nádobe/vrecku, ak sú vlhké. Je dôležité, aby všetka zvyšková vlhkosť vyschla.



5.5 Čistenie motora

Potrebné vybavenie:

- Pitná voda
- Jemná tekutina na umývanie
- Čistý uterák alebo papierová utierka

Potrebné diely:

- Motor

UPOZORNENIE



- Pred čistením motora odsávaciu jednotku odpojte od napájania.
- Odsávaciu jednotku neponárajte do vody.

POZNÁMKA

- Nestriekajte ani nenalievajte tekutinu priamo na motor.
- Pri čistení displeja motora používajte iba vlhký mäkký uterák s jemným čistiacim prostriedkom. Iné čistiace prostriedky alebo abrazívne odevy môžu znížiť výkon displeja.



1. Vypnite odsávačku mlieka.
2. Odpojte odsávačku od zdroja energie.



3. Motor utrite čistým uterákom navlhčeným pitnou vodou.
4. Motor utrite do sucha čistým suchým uterákom.

5.6 Čistenie hadičky

Väčšinou nie je čistenie hadičky nutné.

i Informácie

Skontrolujte hadičky. Ak vo vnútri dochádza ku kondenzácii, okamžite ju umyte a osušte alebo vymeňte hadičku. Pokiaľ je vo vnútri hadičky alebo konektora hadičky materské mlieko, nepokúšajte sa hadičku alebo konektor umyť, vyčistiť alebo sterilizovať. Namiesto toho kontaktujte výrobcu.


Potrebné vybavenie:

- Pitná voda
- Jemný čistiaci prostriedok

Potrebné díly:

- Hadička

Umývanie hadičky

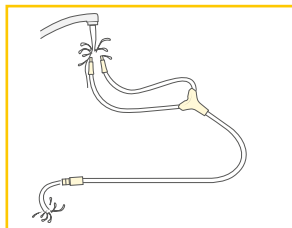


1. Vypnite odsávačku.
2. Oddelte hadičku od zariadenia.
3. Vytiahnite hadičku z viečka konektora.
4. Hadičku opláchnite naliatím studenej vody do oboch krátkych koncov hadičky, kým nezačne vytekať z dlhého konca.
5. Hadičku umyte v teplej mydlovej vode.
6. Hadičku opláchnite čistou vodou.

Sušenie hadičky

1. Vytraste všetky kvapôčky vody.
2. Hadičku zaveste a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.
3. Pred použitím skontrolujte, či je hadička úplne suchá.

POZNÁMKA

- Ak je v hadičke pleseň, prerušte používanie a hadičku vymeňte. Príslušenstvo dostupné na objednávku nájdete v **kapitole 14**.
- **Nepoužívajte odsávačku s mokrou hadičkou; mohlo by dôjsť k poškodeniu odsávačky.**

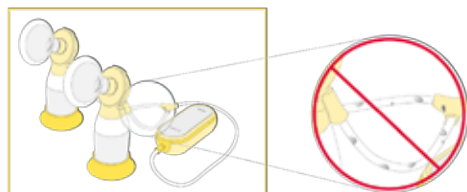

6. Veľkosť prsného nastavca

70


6.1 Výber správnej veľkosti prsného nastavca

Uistite sa, že používate správnu veľkosť prsného nastavca. Je nevyhnutnou súčasťou účinného odsávania a pomáha optimalizovať tok mlieka.

Porozumenie veľkosti prsných nastavcov Medela

Odsávanie by nemalo byť bolestivé. Pre maximálne pohodlie a účinnosť odsávania ponúka Medela niekoľko veľkostí prsných nastavcov. *

Tento návod vám pomôže určiť optimálnu veľkosť nastavca podľa priemeru vašej bradavky.

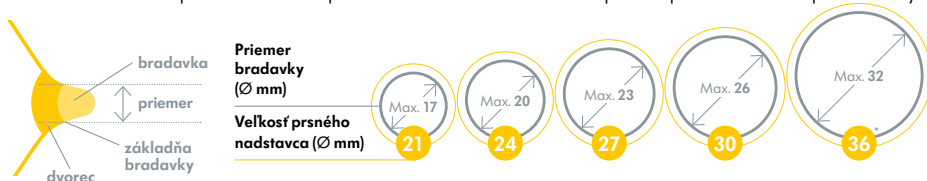

Krok 1

Pomocou pravítka alebo meracej pásky zmerajte priemer vašej bradavky pri základni (cez stred) v milimetroch (mm). Pri meraní vynechajte prsný dvorec.

Krok 2

Podľa nameraného priemeru určte svoju veľkosť prsného nastavca Medela.

Príklad: Ak je priemer vašej bradavky 16 mm, potom odporúčaná veľkosť prsného nastavca Medela je 21 mm.

i Informácie

Prsné nastavce PersonalFit Flex™ sú k dispozícii vo veľkostiach do 30 mm. Ak potrebujete väčší prsný nastavce (36 mm), obráťte sa na miestneho predajcu Medela alebo na www.medela.sk.

*Informácie o objednaní nájdete v kapitole 14.

6.2 Optimalizácia veľkosti prsného nastavca


- Najprv vyskúšajte prsný nastavec dodaný s odsávačkou alebo použite nastavec vybraný podľa zmeraného priemeru bradavky.
- Umiestnite bradavku do stredu tunela a jemne pridržiujte prsný nastavec na prsníku.
- Nastavte maximálne pohodlný podtlak (pozri kapitolu 9) pre dosiahnutie optimálnej úrovne satia.
- Pri odsávaní v odsávacej fáze (po stimulačnej fáze) postupujte podľa obrázkov nižšie.



- Bradavka sa odiera o strany tunela prsného nastavca.
- Vyskúšajte väčšiu veľkosť.



- Bradavka je umiestnená v strede tunela nastavca a pohybuje sa voľne.

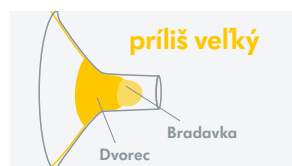

- Bradavka a nadmerná časť prsného dvorca sú vťahované do tunela prsného nastavca.
- Vyskúšajte menšiu veľkosť.

Dôvody pre vyskúšanie inej veľkosti prsného nastavca

- Ak sa vaša bradavka trie o strany tunela natoľko, že spôsobí nepohodlie.
- Ak je do tunela vťahovaná nadmerná časť dvorca.
- Pokiaľ dôjde k začervneniu.
- Ak vám bradavka alebo dvorec zbelie.
- Ak cítite v prsníku po odsávaní neodsaté mlieko.

Ak nastane niektorá z týchto podmienok, zvážte vyskúšanie inej veľkosti podľa vyššie uvedených pokynov na meranie.

V prípade, že si stále nie ste istá, či ste zvolili správnu veľkosť, poraďte sa s laktičnou poradkyňou alebo špecialistom v oblasti dojčenia.

7. Zostavenie odsávačky

72

Pri zostavení odsávačky používajte iba čisté a suché diely. Informácie o čistení nájdete v kapitole 5.

7.1 Zostavenie odsávačky

Potrebné diely:

- Hadička
- Motor
- Prsné nadstavce
- Fľaše na mlieko
- Veko
- Konektory
- Membrány



UPOZORNENIE

Aby ste zabránili kontaminácii mlieka:


- Pred manipuláciou s dielmi odsávačky, komponentmi odsávacieho setu a prsníkom si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.
- Ruky si osušte čistou utierkou alebo jednorazovou papierovou utierkou.
- Nedotýkajte sa vnútra fľašiek ani uzáverov.

Uistite sa, že zariadenie pracuje správne a bezpečne:


- Pred použitím skontrolujte, či komponenty odsávacieho setu nie sú opotrebované alebo poškodené. V prípade potreby ich vymeňte.
- Pred použitím vždy skontrolujte všetky komponenty, či sú čisté. Ak sú špinavé, očistite ich podľa pokynov v kapitole 5.
- Používajte len originálne diely Medela. Podrobnosti nájdete v kapitole 14.

POZNÁMKA

Aby sa zabránilo poškodeniu odsávacej jednotky, musia byť všetky komponenty pred použitím úplne suché.

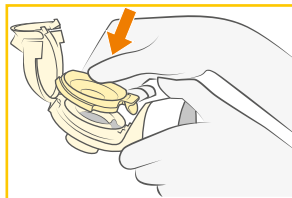

1. Opatrne vložte žltú membránu s krídelkom do otvoru tela konektora.
→ Uistite sa, že membrána tesne prilieha okolo kraja tela konektora.

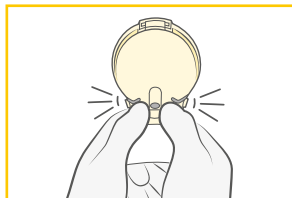


2. Zaklapnite kryt konektora. Uzavretie indikuje počutelné cvaknutie.




3. Naskrutkujte konektor na fľašu.




→ Opatrne nasadíte prsný nadstavec do konektora. Vyberte si veľkosť prsného nadstavca, ktorá vám vyhovuje. Výber správneho nadstavca vid' **kapitola 6**.

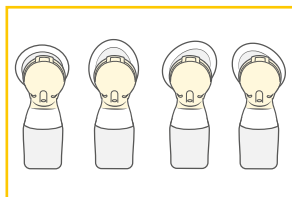

4. Oválne prsné nadstavce možno otáčať (o 360°) a nastaviť ich do požadovanej polohy, aby prilnutie bolo pre vás čo najpohodlnejšie.

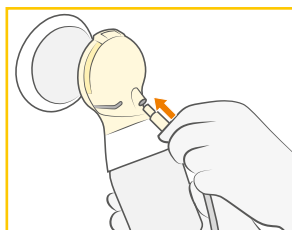


5. Krátky koniec hadičky zasunúť do odpovedajúceho otvoru v uzávere konektora.

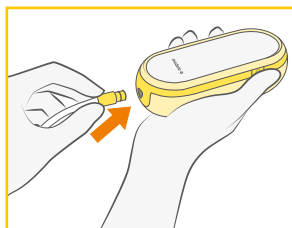


6. Dlhý koniec hadičky zasunúť do odsávacej jednotky, pokiaľ to pôjde.


7.2 Príprava na odsávanie z jedného prsníka

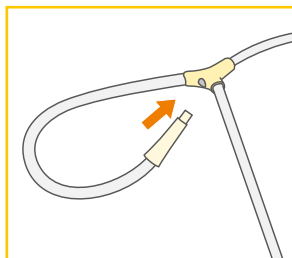

1. Zasuňte voľný koniec hadičky do držiaka hadičky.

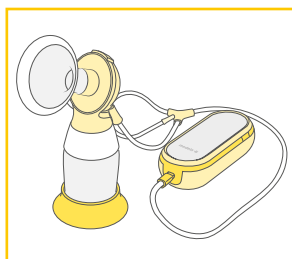

→ Správne zložený systém na odsávanie z jedného prsníka.

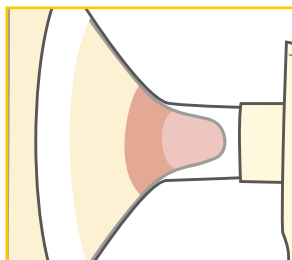

2. Nadstavec priložte na prsník tak, aby sa bradavka dostala správne do stredu tunela.




3. Nadstavec a konektor pridržiňte na prsníku palcom a ukazovákom.
4. Prsník podoprite dlaňou.
5. Začnite odsávať podľa pokynov v časti **8.4**.


7.3 Príprava na odsávanie z oboch prsníkov súčasne

i Informácie


- Dvojité odsávanie šetrí čas a zvyšuje nutričnú hodnotu mlieka.
- Možno budete chcieť spustiť odsávačku mlieka pomocou funkcie odloženého štartu, ktorá vám umožní mať obe ruky voľné pri zahájení odsávania. Funkcia odloženého štartu viď **časť 10.2**.
- Pre odsávanie bez pomoci rúk môžete vyskúšať Pás pre ľahké odsávanie (dostupný na www.medela.sk).

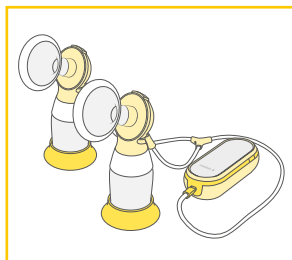

1. Zložte dva odsávacie sety podľa pokynov v **časti 7.1**.
→ Správne zložený systém na odsávanie z oboch prsníkov.

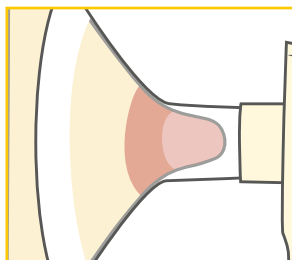

2. Nadstavce priložte na prsníky tak, aby sa bradavka dostala správne do stredu tunela.

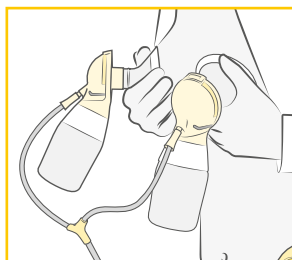


3. Nadstavce a konektory pridržiňte na prsníkoch palcom a ukazovákom.
4. Prsník podoprite dlaňou.
5. Začnite odsávať podľa pokynov v **časti 8.4**.

* Dostupnosť vo vašej krajine nájdete na miestnych webových stránkach/v obchodoch.


7.4 Príprava na odsávanie bez držania odsávacieho setu pomocou Pásu pre ľahké odsávanie

i Informácie


Pás pre ľahké odsávanie je potrebné zakúpiť zvlášť. Ďalšie informácie nájdete na www.medela.sk.

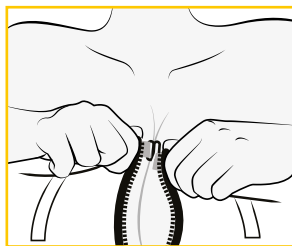

1. Nasadíte si Pás pre ľahké odsávanie a zopnete ho pomocou háčika na vrchnej strane.

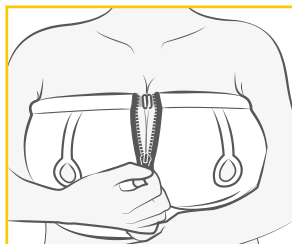

2. Ponechajte zips ľahko rozopnutý.

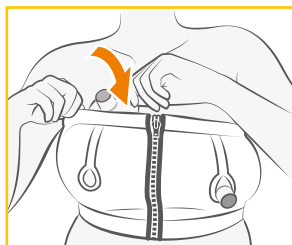

3. Umiestnite prsný nadstavec na prsník pod pásom tak, aby bradavka bola správne v strede tunela prsného nadstavca.

4. Uzavrite zips pre bezpečné uchytenie poprsia.



5. Pripojte zostavený odsávací set k prsným nadstavcom.
6. Začnite odsávať podľa pokynov v časti 8.4.

8. Ovládanie odsávačky


77

8.1 Podmienky a označenie

2-fázové odsávanie		Vďaka výskumu Medela zistila, že deti sa krmia v dvoch fázach - stimulačnej a odsávacej. Tento výskum je základom pre technológiu používanú vo väčšine odsávačiek mlieka Medela.
Stimulačná fáza		Režim rýchleho satia/odsávania k stimulácii toku mlieka.
Odsávacia fáza		Pomalší režim satia/odsávania pre jemné a efektívne odsávanie mlieka, akonáhle mlieko začalo odtekať.
Pohodlná úroveň podtlaku		Najvyššie nastavenie vákua, kedy je odsávanie stále príjemné. U každej matky sa líši.
Let-down		Reflex, vďaka ktorému mlieko začne vytekať z prsníka (prepnutie do odsávacej fázy).

8.2 Ovládacie a zobrazovacie prvky


Ovládacie prvky

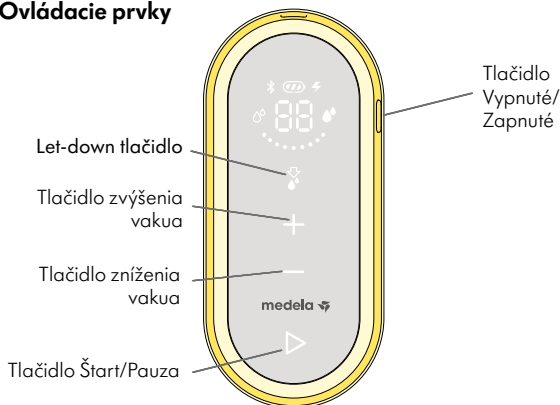

Pokyny pre užívateľov:

Ovládacie a zobrazovacie prvky nie sú vždy viditeľné. Keď je odsávačka zapnutá, aktívne prvky sa rozsvietia.

Zobrazovacie prvky:

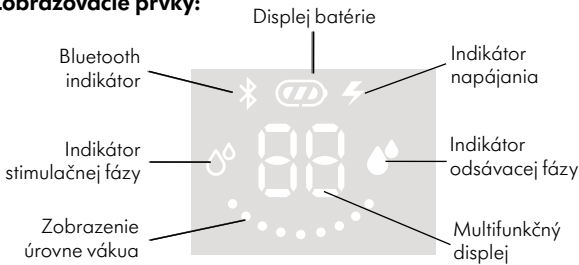

Multifunkčný displej zobrazuje v závislosti od stavu zariadenia nasledujúce informácie:

- Čas relácie v sekundách (prvá minúta odsávania), potom v minútach
- L1 až L9 pre úroveň vakuua (spolu so zobrazením úrovne vakuua)
- Párovací kód (počas pripojenia Bluetooth)
- Oneskorenie spustenia v sekundách

Zobrazenie stavu napájania a batérie

	Indikátor napájania (symbol blesku) označuje, či je pripojený sieťový adaptér. → Ak sa rozsvieti, je pripojený sieťový adaptér.
	Displej batérie zobrazuje stav batérie a jej úroveň nabitia. → Displej všetkých troch pruhov indikuje, že je batéria nabitá.
	Pri znižovaní kapacity batérie sa objaví menej pruhov. → Dva pruhy: pribl. zostáva 75 % kapacity. → Jeden pruh: pribl. zostáva 40 % kapacity.
 (blikanie)	→ Keď odsávačka vydáva zvukový signál a jedna posledná čiara bliká, batéria je takmer vybitá.
 (blikanie)	→ Po vyslaní druhého zvukového signálu, zatiaľ čo bliká obrys displeja batérie, sa odsávačka zastaví a po piatich sekundách sa úplne vypne.
 (blikanie)	Ak všetky tri pruhy a obrys displeja batérie blikajú súčasne, znamená to, že batéria je prehriata alebo chybná. Vid' Riešenie problémov (kapitola 13) alebo volajte zákaznícky servis Medela.

8.3 Nabíjanie batérie


VAROVANIE

Používajte iba sieťový adaptér a kábel dodávaný s odsávačkou.


Nedostatočný zdroj energie alebo kábel môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poruchu zariadenia.

Informácie


- Odsávačku môžete počas nabíjania batérie používať. Batéria sa nabije, akonáhle je odsávačka pripojená k zdroju energie. Keď je odsávačka v prevádzke, bude sa batéria nabíjať pomalšie.

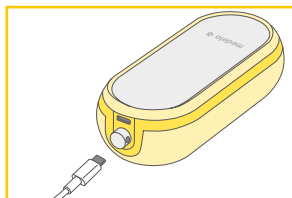

1. Pripojte sieťový kábel k motoru.

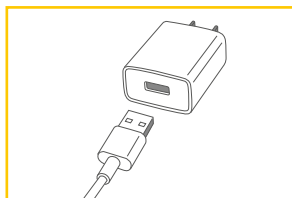

2. Pripojte sieťový kábel k sieťovému adaptéru.

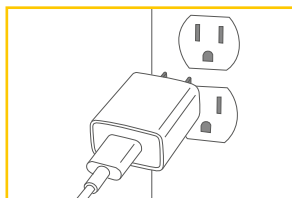

3. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky v stene.


8.4 Odsávanie materského mlieka

⚠ UPOZORNENIE


- Odsávací set nedržte za fľašu. Mohlo by to viesť k stlačeniu a zablokovaniu mliekovodov a naliatiu prsníka.
- Nepokúšajte sa odsávať pomocou vákua, ktorého intenzita je príliš vysoká alebo pri ňom pociťujete nepohodlie (bolesť). Pri bolesti a prípadnom poškodení prsníka a bradavky sa môže znížiť tvorba mlieka.
- Pokiaľ odsávate len málo mlieka alebo žiadne, alebo ak pri odsávaní pociťujete bolesť, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka alebo laktáčnú poradkyňu.

POZNÁMKA


Uistite sa, že hadička nie je zalomená ani stlačená počas odsávania.

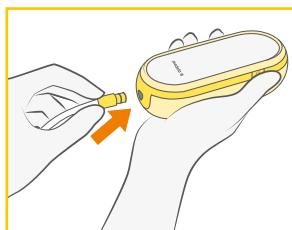


1. Ak to už nie je urobené, pripojte zostavený odsávací set do otvoru pre hadičku na prednej strane odsávačky.
2. Uistite sa, že je odsávací set správne pripojený a umiestnený.

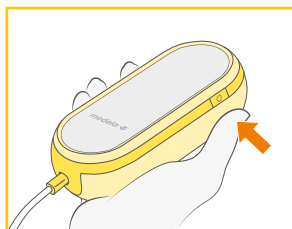


3. Držte tlačidlo On/Off  na boku, kým odsávačka nevydá zvukový signál, potom tlačidlo uvoľnite.
→ Odsávačka je teraz v pohotovostnom režime.

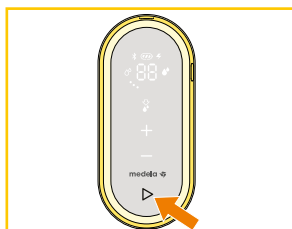


4. Stlačením tlačidla Štart/Pauza  zahájite odsávanie.
→ Odsávačka začína v stimulačnej fáze.

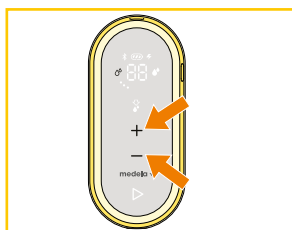

5. Upravte intenzitu vakuu pomocou tlačidiel Zvýšiť intenzitu vakuu (+) a Znížiť intenzitu vakuu (—), a nájdite pre vás pohodlnú intenzitu (pohodlná úroveň podtlaku vid' **kapitola 9**).

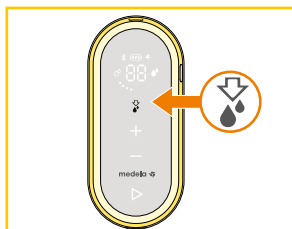


6. Hneď ako začne tiecť mlieko, stlačením tlačidla „Let-down“  prejdete do odsávacej fázy.
 → Odsávačka pokračuje v odsávacej fáze.
 → Ak nestlačíte prepínacie tlačidlo Let-down  do dvoch minút, odsávačka sa automaticky prepne do odsávacej fázy.

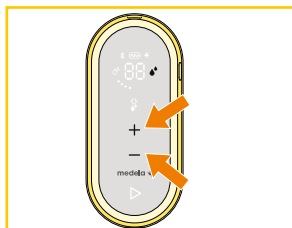

7. Upravte intenzitu vakuu pomocou tlačidiel Zvýšiť intenzitu vakuu (+) a Znížiť intenzitu vakuu (—), aby ste našli pohodlnú úroveň podtlaku (vid' kapitola 9).



8. Keď je váš odsávací cyklus ukončený, stlačením tlačidla Štart/Pauza  zastavíte odsávanie.
 → Pokiaľ nedôjde k žiadnej interakcii matky s odsávačkou, odsávačka sa sama automaticky zastaví po 30 minútach.

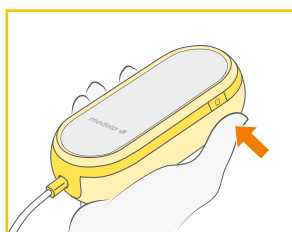

9. Vypnite odsávačku materského mlieka stlačením tlačidla On/Off .

Pozastavenie

Činnosť odsávačky môžete pozastaviť ako v stimulačnej, tak aj v odsávacej fáze. Umožní vám to znovu upraviť polohu svojho tela alebo nastavenie odsávačky, príp. venovať pozornosť okoliu.


1. Odsávačku môžete počas činnosti pozastaviť stlačením tlačidla Štart/Pauza ▷. Odsávanie sa zastaví a tlačidlo Start/Pauza a zobrazenie času blikajú.
2. Ak chcete opäť zahájiť odsávanie, stlačte znovu tlačidlo Start/Pauza ▷.

Ak chcete začať úplne nový odsávací cyklus, vypnite a znovu zapnite odsávačku materského mlieka dvojitém stlačením tlačidla On/Off. ⏻.

i Informácie

- Ak odsávanie do dvoch minút neobnovíte, odsávačka sa automaticky vypne.
- Ak chcete pokračovať v odsávaní, budete musieť začať nový odsávací cyklus.
- Ak potrebujete pozastaviť odsávanie na dobu dlhšiu ako dve minúty, odporúčame znovu použiť stimulačnú fázu.
- Nezabudnite zaznamenať množstvo odsatého mlieka do aplikácie Medela Family.

Po odsávaní

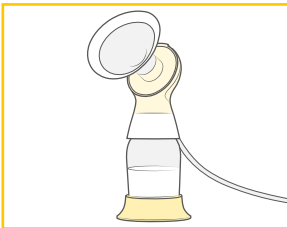

Mlieko pripravte na skladovanie nasledujúcim spôsobom:


1. Fľašu vložte do stojana, aby ste zabránili jej prevráteniu.



2. Fľašu zatvorte viečkom.

Informácie o skladovaní mlieka nájdete v **kapitole 11**.

9. Nájdenie pohodlnej úrovne podtlaku

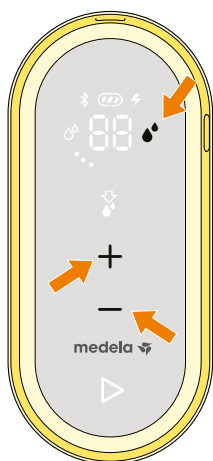

Akonáhle odsávate v **odsávacej fáze** , zvýšte podtlak pomocou tlačidla Zvýšiť intenzitu vaku (**+**) a zvyšujte intenzitu vaku až do okamihu, kedy bude odsávanie mierne nepríjemné (nie bolestivé), potom stlačte tlačidlo Znížiť intenzitu vaku (**-**) a vákuum mierne znížte.

83

Informácie

- Pohodlná úroveň podtlaku je najvyššie nastavenie vaku, pri ktorom je odsávanie stále príjemné. Je to u každej ženy individuálne.
- Stimulácia by mala byť na pohodlnej úrovni vaku, snaha o maximálnu úroveň v tomto prípade nie je nutná.
- Počas celej doby odsávania vyhodnocujte, ktorá intenzita vaku je pre vás najpohodlnejšia. S každým štádiom dojčenia sa môže meniť.

10. Špeciálne funkcie

84

10.1 Bluetooth® pripojenie


Bluetooth je bezdrôtová technológia pre výmenu dát na krátke vzdialenosti. To možno použiť na pripojenie odsávačky Freestyle Flex cez osobné zariadenie, ako je šikovný telefón, k aplikácii Medela Family. Po pripojení odsávačky k aplikácii Medela Family môžete automaticky prenášať údaje o odsávaní (dĺžka odsávacieho cyklu, fáza a úroveň) a ručne ukladať a evidovať informácie o množstve odsatého mlieka. Aby ste mohli využívať výhody tejto aplikácie, musíte si vytvoriť účet v aplikácii Medela Family.

Inštalácia aplikácie Medela Family

1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Medela Family do svojho mobilného zariadenia. Táto aplikácia je k dispozícii zdarma pre operačné systémy Apple® iOS a Android™.
2. Otvorte Medela Family na svojom mobilnom zariadení a zaregistrujte sa pomocou aplikácie.

Pripojenie (spárovanie) odsávačky mlieka Freestyle Flex

1. Uistite sa, že je vo vašom mobilnom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth.
2. V Medela Family kliknite na „More“ (Viac), prejdite na „Connected breast pump“ (Pripojená odsávačka) > „Set up a new breast pump“ (Nastaviť novú odsávačku) a postupujte podľa pokynov k nastaveniu a párovaniu na obrazovke, ktoré zahŕňajú nasledujúce kroky:
3. Zapnite odsávačku Freestyle Flex do pohotovostného režimu.

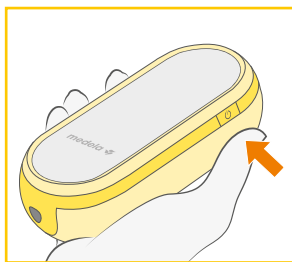


4. Stlačením a podržaním tlačidla Zap / Vyp  po dobu dvoch sekúnd spustíte proces párovania.
→ Indikátor Bluetooth  bliká, čo značí, že je odsávačka materského mlieka pripravená na spárovanie s vaším zariadením Bluetooth, a multifunkčný displej zobrazuje párovací kód.

Rozpoznávanie ochranných známk

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Medela AG je na základe licencie.

Apple je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

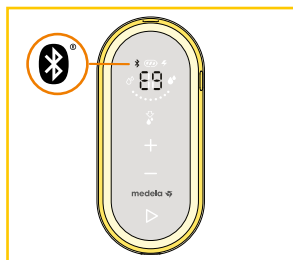

5. Prečítajte si párovací kód na multifunkčnom displeji a vyberte zodpovedajúce zariadenie v aplikácii Medela Family.

→ Po úspešnom spárovaní sa indikátor Bluetooth  na odsávačke trvalo rozsvieti.

→ Ak spárovanie nebude úspešné do dvoch minút, odsávačka sa automaticky vypne.

i Informácie

- Zaznamenávaním vašich odsávacích cyklov, denných mílnikov a ďalšieho obsahu do aplikácie Medela Family môžete rýchlejšie dosiahnuť svoje ciele a priority.
- Viditeľnosť histórie vášho odsávania vám dáva príležitosť efektívne plánovať každý deň a sledovať zmeny vo vašom tele, ako je zvýšenie alebo zníženie produkcie mlieka.
- Po počiatočnom nastavení sa po zapnutí automaticky zobrazí indikátor Bluetooth  na odsávačke mlieka, ak je spárované zariadenie blízko a aplikácia Medela Family je otvorená.
- S odsávačkou Freestyle Flex môžete spárovať viac mobilných zariadení.
- S odsávačkou Freestyle Flex môže pracovať iba jedno mobilné zariadenie súčasne.
- Odsávačka Freestyle Flex má schopnosť uložiť si do pamäti posledných 30 odsávacích cyklov. Ak odsávačka nie je pripojená pred odsávacím cyklom 31, vaša história bude prepísaná novými dátami odsávania.
- Po pripojení k odsávačke váš účet v aplikácii Medela Family zaznamená nekonečné množstvo historických odsávacích cyklov.

Odstránenie odsávačky Freestyle Flex z mobilného zariadenia

1. Prechádzajte platformou Medela Family..
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a odstráňte (zrušte spárovanie) odsávačky Freestyle Flex.

i Informácie

- Odstránením odsávačky Freestyle Flex z mobilného zariadenia neodstránite informácie o odsávaní uložené v Medela Family.
- Ak znovu pripojíte odsávačku a mobilné zariadenie, prenesie sa posledných 30 záznamov uložených v odsávačke.

Ďalšie informácie nájdete na www.medela.sk.

10.2 Odložený štart

Odsávačka Freestyle Flex™ je vybavená funkciou odloženého štartu. Vďaka tomu sa odsávačka spustí s oneskorením desiatich sekúnd.

To je užitočné v prípade, ak chcete mať pri začatí odsávania voľné ruky (napr. pre držanie prsných nastavcov pri odsávaní z oboch prsníkov).




1. Ak chcete aktivovať odložený štart, stlačte a podržte tlačidlo Štart/Pauza ► po dobu dvoch sekúnd v pohotovostnom režime alebo v režime pozastavenia.

→ Odsávačka materského mlieka vydá zvukový signál, ktorý indikuje spustenie odloženého štartu.

→ Počas doby oneskorenia bliká tlačidlo Štart/Pauza ► a multifunkčný displej zobrazuje zostávajúci čas v sekundách.

→ Po uplynutí doby odloženého štartu začne odsávačka mlieka pracovať.

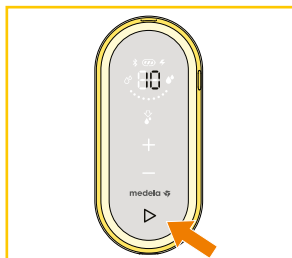

2. Ak chcete meškanie preskočiť, stlačte tlačidlo Štart/Pauza ►.

→ Odsávačka mlieka začne fungovať okamžite.

11. Skladovanie a rozmrazovanie materského mlieka

11.1 Skladovanie

Pokyny pre uskladnenie čerstvo odsátého materského mlieka (pre zdravé donosené deti)

Izbová teplota 16 až 25 °C (60 až 77 °F)	Chladnička 4 °C (39 °F) alebo chladnejšie	Mraznička -18 °C (0 °F) alebo chladnejšie	Materské mlieko rozmrazené v chladničke
Najlepšie do 4 hodín	Najlepšie do 3 dní	Najlepšie do 6 mesiacov	Pri izbovej teplote: Do 2 hodín
*Do 6 hodín pre mlieko odsáté za veľmi čistých podmienok	*Do 5 dní pre mlieko odsáté za veľmi čistých podmienok	*Do 9 mesiacov pre mlieko odsáté za veľmi čistých podmienok	Chladnička: Do 24 hodín Nezmrazujte opakovane!

*Pokyny pre mlieko odsáté za veľmi čistých podmienok:

Pred odsávaním materského mlieka by si matky mali umyť ruky mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu. Súčasti odsávačky, fľašky a miesto, kde odsávate, musia byť čisté. Prsníky a bradavky sa pred odsávaním nemusia umývať.

- Uvedené pokyny na uskladnenie a rozmrazenie materského mlieka slúžia ako odporúčanie. Ďalšie informácie vám poskytne laktčná poradkyňa alebo odborník na dojčenie.
- Materské mlieko uchovávajte na najchladnejšom mieste chladničky (v zadnej časti sklenenej police nad priehradkou na zeleninu).

11.2 Skladovanie materského mlieka v chladiacej taške Medela

Vaša chladiaca taška Medela obsahuje jedno chladiace médium Medela. Až štyri 150 ml fľaše s materským mliekom zostanú chladné po dobu až desiatich hodín v prostredí izbovej teploty vo vnútri tašky odsávačky. Až štyri 150 ml fľaše s materským mliekom zostanú chladné po dobu až ôsmich hodín v prostredí izbovej teploty vnútri chladiacej tašky, ktorá nie je uložená v taške odsávačky.

- Akonáhle dokončíte odsávanie, vložte fľašu materského mlieka alebo vrecko na skladovanie materského mlieka do chladiacej tašky s chladiacim médium.
- Akonáhle ste doma, preneste fľaše s materským mliekom alebo vrecká na skladovanie materského mlieka do chladničky alebo mrazničky.

11.3 Zmrazovanie

POZNÁMKA

- Opakované cykly zmrazenia/rozmrazenia ničia zloženie mlieka. Materské mlieko z tohto dôvodu nikdy opakovane nezmrazujte.
- Odsaté materské mlieko zmrazte v plastových fľašiach alebo vreckách na uskladnenie mlieka. Fľaše ani vrecká nenapĺňajte viac ako do 3/4 objemu, aby ste ponechali dostatok priestoru na možné rozpínanie mlieka pri zmrazení.
- Fľaše alebo vrecká na uchovávanie mlieka označte štítkom s uvedením dátumu odsatia a objemu odsatého mlieka.
- Plastové fľaše a jednotlivé komponenty môžu byť po zmrazení krehké a pri páde sa môžu rozbiť.
- Ak fľaše alebo komponenty vykazujú známky poškodenia, materské mlieko nepoužite.

11.4 Rozmrazovanie

⚠ UPOZORNENIE

Materské mlieko nerozmrazujte ani nezohrievajte v mikrovlnnej rúre ani v nádobe s vriacou vodou. Prispejete tak k zachovaniu dôležitých zložiek a zabránite popáleniu.

- Materské mlieko rozmrazte počas noci v chladničke, aby sa zachovali jeho zložky.
- Prípadne môžete fľašu alebo vrecko podržať pod prúdom teplej vody (max. 37 °C/98,6 °F).

POZNÁMKA

Jemným krúživým pohybom fľaše alebo vrecka vmiešajte oddelený tuk. Mlieko nepretrepávajte ani nemiešajte.

11.5 Kŕmenie materským mliekom

Pred kŕmením z fľaše sa odporúča, aby bolo dojčenie dobre zavedené.

- Fľašku, cumlík a ďalšie súčasti vždy skontrolujte bezprostredne pred a po každom použití. Ak sa zdá, že je cumlík prasknutý alebo natrhnutý, okamžite ho prestaňte používať.
- Aby ste predišli možnému nebezpečenstvu udusenia, vyskúšajte pevnosť cumlíka zatiahnutím za jeho koniec.
- Nepokúšajte sa zväčšovať otvor v cumlíku.
- Dojčatá nesmú byť kŕmené z fľaše bez dozoru dospeléj osoby.
- Nepoužívajte cumlík fľaše ako utišujúci cumlík.

Ďalšie informácie o zbere a skladovaní materského mlieka nájdete na adrese www.medela.sk.

12. Údržba a starostlivosť

12.1 Starostlivosť o sieťový adaptér



POZNÁMKA

Aby ste udržali sieťový adaptér a kábel v dobrom prevádzkovom stave, venujte pozornosť nasledujúcemu: Neodpájajte kábel ani sieťový adaptér ťahaním za kábel, ale držte ho za konektor kábla a telo adaptéra.

Cestovanie do zahraničia

i Informácie

Tipy na cestovanie s odsávačkou

Pri cestovaní do zahraničia odporúčame zakúpiť cestovný adaptér (nie je súčasťou produktu), ktorý zodpovedá zodpovedajúcej zásuvke. Poradte sa s krajinou, ktorú navštevujete, aby ste zistili, aký typ adaptéra bude fungovať najlepšie. Sieťový adaptér odsávačky mlieka je dvojstranný a nevyžaduje uzemnenú zásuvku.

12.2 Údržba batérie

Vaša odsávačka obsahuje zabudovanú (nevymeniteľnú) lítium-iónovú nabíjateľnú batériu.

POZNÁMKA

V prípade úplne vybitej batérie nemožno odsávačku ihneď po pripojení k sieťovému adaptéru použiť. Pred zapnutím odsávačky nechajte batériu nabíjať aspoň 15 minút.

POZNÁMKA

- Pre optimálny výkon odsávačky a batérie použite sieťový adaptér dodávaný s odsávačkou.
- Uistite sa, že napätie sieťového adaptéra je kompatibilné so zdrojom napájania.

i Informácie

Ak chcete zachovať životnosť batérie:

- Uchovávajte odsávačku na chladnom mieste.
- Dobite batériu, než sa úplne vybije. To je lepšie pre životný cyklus batérie.
- Pred skladovaním odsávačky plne nabite batériu.

Informácie o stave nabitia batérie nájdete v **časti 8.2**.

- Ak bola vaša odsávačka uložená na horúcom mieste, nemusí sa okamžite napájať z batérie. Ak chcete obnoviť normálnu funkciu batérie, nechajte odsávačku vychladnúť po dobu jednej hodiny. Počas tejto doby môžete odsávačku napájať pomocou sieťového adaptéra zapojeného do zásuvky v stene.

Cestovanie do zahraničia

i Informácie

Táto odsávačka mlieka má lítium-iónovú batériu. Preprava takýchto batérií v lietadle môže byť obmedzená krajinou, ktorú navštevujete. Poradte sa s krajinou, ktorú navštevujete, aby ste zistili, či existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa cestovania s lítium-iónovými batériami.

12.3 Dlhodobé skladovanie

Vaša odsávačka obsahuje nabíjateľnú batériu. Aby sa zachovala odsávačka, pokiaľ ju dlhšiu dobu nepoužívate, automaticky sa prepne do režimu skladovania.

Ak ju chcete prepnúť z režimu skladovania, pripojte odsávačku k externému zdroju energie a nabíjajte batériu po dobu dvoch hodín.


Pred skladovaním odsávačky na dlhšiu dobu nezabudnite:



- ☐ Vyčistiť odsávačku a fľaše (viď **kapitola 5**)



- ☐ Vyčistiť motor (viď **kapitola 5.5**)

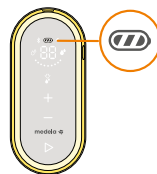

- ☐ Uistiť sa, že je batéria nabitá (viď nižšie)

Najlepšie je plne nabiť batériu pred dlhodobým skladovaním odsávačky mlieka. Informácie o stave nabitia batérie nájdete v **časti 8.2**.

13. Riešenie problémov

V prípade neočakávaného správania odsávačky vyhľadajte v tabuľke riešenia problémov príslušný problém v stĺpci „Problém“ a postupujte podľa pokynov v stĺpci „Riešenie“.

Tabuľka riešenia problémov

Problém	Riešenie
Po stlačení tlačidla On/Off sa odsávačka mlieka neprepne do pohotovostného režimu	• Držali ste tlačidlo On/Off príliš krátko alebo príliš dlho. • Stlačte tlačidlo On/Off, kým nebudete počuť zvukový signál, a potom ho uvoľnite. Pokiaľ je odsávačka v režime skladovania, bude trvať o niečo dlhšie (približne jednu sekundu), kým nebude vydaný zvukový signál.
Po stlačení tlačidla On/Off sa displej nerozsvieti	• Ak chcete odsávačku resetovať, stlačte a podržte tlačidlo On/Off (na boku) po dobu siedmich až desiatich sekúnd. • Pokiaľ nedôjde k zmene, uistite sa, že je odsávačka mlieka pripojená k správne fungujúcemu zdroju energie. • Ak stále nedôjde k zmene, kontaktujte zákaznícky servis Medela.
Časovač po stlačení tlačidla Štart/Pauza nefunguje	• Kontaktujte zákaznícky servis Medela.
Odsávačka po stlačení tlačidla Štart/Pauza neprodukuje žiadne vákuum (motor nefunguje)	• Uistite sa, že je odsávačka zapnutá. • Kontaktujte zákaznícky servis Medela.
Odsávačka namiesto satia vytvára iba konštantné vákuum	• Kontaktujte zákaznícky servis Medela.
Odsávačka mlieka prestane fungovať alebo sa nedá zapnúť (vydáva zvukový signál a všetky prvky displeja batérie blikajú)	• Odsávačka mlieka odmieta operáciu kvôli prehriatiu batérie. Nechajte motorovú jednotku vychladnúť a potom odsávačku znova spustíte.
Všetky prvky na displeji batérie blikajú, keď sa pokúšate nabiť odsávačku	• Nabíjanie nie je možné, ak je teplota batérie príliš vysoká. Motor nechajte vychladnúť a potom pokračujte v nabíjaní.

Satie je slabé alebo žiadne	• Skontrolujte, či sú všetky komponenty odsávacieho setu čisté a suché a pripojenia pevné. • Počas odsávania skontrolujte, či sú prsné nadstavce tesne priložené okolo celého prsníka. • Pri odsávaní z jedného prsníka skontrolujte, či je nepoužívaný koniec hadičky správne pripojený do držiaka na hadičky. • Ak sa odsávanie nezlepší po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Medela.
Odsávačka nereaguje podľa očakávaní	• Ak chcete odsávačku resetovať, stlačte a podržte tlačidlo On/Off (na boku) po dobu sedem sekúnd. • Pokiaľ nedôjde k zmene, kontaktujte zákaznícky servis Medela.
Pokiaľ odsávačka navlhne	• Odpojte sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a vypnite odsávačku. • Uložte odsávačku na 24 hodín na suché a teplé miesto.
Odsávačka mlieka bola ponorená do vody	• Odpojte sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a vypnite odsávačku. • Kontaktujte zákaznícky servis Medela.
Dáta sa nedá odoslať	• Funkcia Bluetooth  na mobilnom zariadení je vypnutá. Zapnite funkciu Bluetooth a pokúste sa dáta odoslať znova. • Párovanie medzi dvoma zariadeniami nebolo dokončené. Znovu vykonajte pokyny na párovanie. Pozri časť 10.1. • Mobilné zariadenie je príliš ďaleko od odsávačky mlieka. Presuňte zariadenie a odsávačku bližšie k sebe. • Aplikácia v mobilnom zariadení nie je pripravená. Skontrolujte aplikáciu.

Ak sa vám problém s odsávačkou nepodarilo vyriešiť alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na zákaznícky servis Medela. Kontaktné údaje nájdete na adrese **www.medela.com**. V časti "Kontakt" vyberte svoju krajinu.

14. Príslušenstvo

Príslušenstvo

Číslo výrobku	Produkt
* V závislosti od vášho regiónu si overte dostupnosť na miestnych webových stránkach/obchodoch.	Prsný nadstavec PersonalFit Flex™ S (21 mm)
	Prsný nadstavec PersonalFit Flex™ M (24 mm)
	Prsný nadstavec PersonalFit Flex™ L (27 mm)
	Prsný nadstavec PersonalFit Flex™ XL (30 mm)
	Freestyle Flex™ hadička
	PersonalFit Flex™ konektor

* Ak je výsledok odsávania neuspokojivý alebo je odsávanie bolestivé, obráťte sa na Vašu laktáčnu poradkyňu alebo odborníka na dojčenie. Pri použití inej veľkosti prsného nadstavca môže byť odsávanie príjemnejšie a úspešnejšie.

V prípade problémov s hľadaním požadovaného príslušenstva kontaktujte zákaznícky servis Medela. Kontaktné údaje na **www.medela.sk** v časti „Kontakt“.

Pre výmenu stratených alebo chybných dielov kontaktujte zákaznícky servis Medela.

Ďalšie produkty Medela sú k dispozícii na webe **www.medela.sk**.

15. Záruka

94

Informácie o medzinárodnej záruke nájdete v brožúre „Medzinárodná záruka“.

16. Likvidácia


Likvidácia zariadenia

Na konci svojej prevádzkovej životnosti oddel'te jednotlivé diely odsávačky a zlikvidujte ich v súlade s nasledujúcimi pokynmi.

Prsné nadstavce, konektor, hadičky a príslušenstvo

Komponenty sú vyrobené z plastov, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie, pokiaľ sú likvidované ako odpad z domácnosti. Recyklujte alebo likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami.

Motor a sieťový adaptér

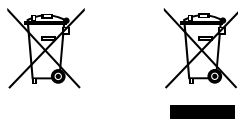

Elektrické ani elektronické zariadenia nelikvidujte spoločne s netriedeným komunálnym odpadom, ale odovzdajte ich do separovaného odpadu.

V Európskej únii musí výrobca alebo jeho obchodný zástupca prevziať späť vyradené zariadenia. Ostatné krajiny môžu mať podobný systém zberu a recyklácie. Odpad z elektrických a elektronických zariadení likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami. Informujte sa v mieste predaja alebo požiadajte miestny úrad o informácie o príslušných zberných miestach odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Separovaný zber a recyklácia vášho vyradeného zariadenia v čase likvidácie pomôže zachovať prírodné zdroje a zaistiť, že bude recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

UPOZORNENIE

Nebezpečné materiály v elektrických/elektronických zariadeniach môžu škodiť ľudskému zdraviu a životnému prostrediu, ak zariadenia nie sú likvidované podľa predpisov.

17. Význam symbolov

Nasledujúce tabuľky vysvetľujú význam symbolov, ktoré sa nachádzajú na častiach produktu a jeho obalu.

Symbole použité v tomto návode

	Všeobecný bezpečnostný výstražný symbol upozorňuje na bezpečnostné informácie.
	Definuje teplotný rozsah (napr. pri prevádzke, preprave alebo skladovaní).
	Definuje rozsah relatívnej vlhkosti (napr. pri prevádzke, preprave alebo skladovaní).
	Tento symbol označuje obmedzenie atmosférického tlaku (napr. pre prevádzku, prepravu a skladovanie).
	Označuje, že toto zariadenie disponuje bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Symbole na motore

	Označuje umiestnenie tlačidla On/Off.
	Označuje výrobcu.
	Označuje dátum výroby.
	Označuje katalógové číslo zariadenia.
	Označuje sériové číslo zariadenia.
	Označuje súlad s medzinárodnými požiadavkami na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom (použitie súčastí typu BF).
	Elektrické/elektronické zariadenia nelikvidujte spoločne s netriedeným komunálnym odpadom (zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi).
	Označuje, že na pripojenie zariadenia k napájacej sieti je vyžadovaný konkrétny samostatný napájací adaptér, a určuje jeho model / typ.
	Tento symbol označuje, že je potrebné dodržiavať pokyny na použitie.
	Označuje súlad s požiadavkami Federal Communications Commission.
	Označuje, že toto zariadenie disponuje bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
	Známka súladu s predpismi označuje súlad s EMK a bezpečnostnými požiadavkami v Austrálii.
	Značka CE označuje zhodu s európskou smernicou o nízkom napätí, elektromagnetickej kompatibilite a rádiových zariadeniach.

Symbole na sieťovom adaptéri

Symbole na napájacom adaptéri sa môžu líšiť v závislosti na trhu, kde sa jednotka predáva.



Označuje striedavý prúd.



Označuje jednosmerný prúd.



Označuje polaritu USB výstupu napájania.



Označuje, že zariadenie je elektrické zariadenie triedy II (s dvojitou ochrannou izoláciou).



Označuje, že zariadenie je určené len na použitie v interiéri.



Prečítajte si pokyny a postupujte podľa nich.



Označuje úroveň účinnosti pre externé zdroje napájania.



Elektrické/elektronické zariadenia nelikvidujte spoločne s netriedeným komunálnym odpadom (zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi).



Značka CE označuje zhodu s európskou smernicou o nízkom napätí a elektromagnetickej kompatibilite. Označuje, že výrobok je v súlade s európskymi smernicami pre zníženie obsahu nebezpečných látok.



Označuje, že zariadenie je bezpečnostný oddeľovací transformátor na ochranu pred skratom.



Označuje, že elektronické zariadenie obsahujúce transformátor(y) a elektronický obvod(y) prevádza elektrické napájanie na jednoduché alebo viacnásobné výstupy napájania.



Značka EAC (Eurasian Conformity – Eurázijská zhoda) označuje, že výrobok je v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa technických nariadení Eurázijskej colnej únie.



Značka UL LISTED označuje, že výrobok je vyrobený v súlade s požiadavkami na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu USA a Kanady.



Označuje súlad s požiadavkami Federálnej komisie pre telekomunikácie.



Značka NOM (Norma Oficial Mexicana) NYCE označuje, že výrobok je v súlade s platnými mexickými požiadavkami.



Známka súladu s predpismi označuje súlad s EMK a bezpečnostnými požiadavkami v Austrálii.



Označuje súlad s požiadavkami systému povinnej certifikácie Číny.



Označuje, že obdobie používania šetrné voči životnému prostrediu je desať rokov (kontrola znečisťovania Číny).



Značka PSE označuje, že výrobok je certifikovaný podľa japonského zákona o bezpečnosti elektrických spotrebičov a materiálov.



Značka SAFETY (Bezpečnosť) označuje, že výrobok je registrovaný ako kontrolovaný výrobok podľa singapurského nariadenia na ochranu spotrebiteľov.

Symbole na obale výrobku

	Označuje výrobcu.
	Označuje katalógové číslo zariadenia.
	Obsahuje krehké časti. Manipulujte opatrne.
	Chráňte pred slnečným svetlom.
	Chráňte pred dažďom. Uchovávať v suchu.
	Definuje teplotný rozsah pre prepravu alebo skladovanie.
	Definuje rozsah relatívnej vlhkosti pre prepravu alebo skladovanie.
	Tento symbol označuje obmedzenie atmosférického tlaku pre prepravu alebo skladovanie.
	Balenie obsahuje výrobky, ktoré môžu prichádzať do kontaktu s potravinami podľa nariadenia ES č. 1935/2004.
	Označenie CE označuje zhodu s príslušnými európskymi smernicami.
	Prečítajte si pokyny a postupujte podľa nich.
	Elektrické/elektronické zariadenia nelikvidujte spoločne s netriedeným komunálnym odpadom (zariadenie zlikvidujte v súlade miestnymi predpismi).
	Označuje, že materiál je využiteľný v procese opätovného použitia a recyklácie.
	Označuje, že obal je vyrobený z lepenky.
	Symbol MCMC (Malaysian Communications and Multimedia Commission) označuje súlad s požiadavkami na rádiový prenos v Malajzii.
	Označenie EAC (Eurasian Conformity) označuje, že výrobok je v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa technických nariadení Eurázijskej colnej únie.
	Symbol NTC (National Telecommunication Commission) označuje, že zariadenie má typové schválenie pre rádiový prenos vo Filipínskej republike.

18. Medzinárodné predpisy

98

18.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMK)

Odsávačka Freestyle Flex™ je v súlade so všetkými požiadavkami relevantných noriem a predpisov vzhľadom na elektromagnetické emisie a odolnosť proti rušeniu.



VAROVANIE

Elektrická odsávačka Freestyle Flex™ by sa nemala používať v blízkosti iného zariadenia ani na ňom. Ak je potrebné použitie v blízkosti iných zariadení alebo na iných zariadeniach, elektrická odsávačka Freestyle Flex™ sa musí sledovať, aby sa overila jej normálna prevádzka v konfigurácii, v ktorej sa bude používať.

Na činnosť elektrickej odsávačky môžu mať vplyv bezdrôtové komunikačné zariadenia, napríklad bezdrôtové zariadenia domácej siete, mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny a ich základné stanice a vysielačky, a majú sa nachádzať vo vzdialenosti najmenej 30 cm od zariadenia.

18.2 Pomôcka na pitie

Časti určené na kŕmenie detí sú v súlade s európskou normou EN 14350.

19. Technické údaje

Súhrn dôležitých technických špecifikácií

Výkon vaku (v nadmorskej výške 500 m
[atmosferický tlak 954,62 hPa])
-45 to -245 mmHg
45 to 111 cpm

Sieťový adaptér (Model: S010BL*0500200)
*kód krajiny

Vstup	100 - 240 V~ 50/60 Hz max. 0.4 A
Výstup	5 V --- 2 A 10 W
Priemerná účinnosť	79%
Spotreba energie bez zófaže	Nižší než 0,1 W

Motor

Kapacita batérie a typ	3.7 V, 2750 mAh Li-ion
Veľkosť	148 x 66 x 46,5 mm
Hmotnosť	273 g

Prenosový štandard: Bluetooth verzia 4.0 LE

Frekvenčné pásmo: 2402-2480 MHz

Max. výstupný výkon: +4 dBm (trieda 2)

Materiály dotýkajúce sa kože alebo prichádzajúce do styku s mliekom

- Prsný nadstavec: Polypropylén, termoplastický elastomér
- Konektor: Polypropylén, silikón
- Fľaša: Polypropylén
- Viečko: Polypropylén

Všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s materským mliekom, neobsahujú BPA (bisfenol A).



Rozsah prevádzkových teplôt



Rozsah prevádzkovej vlhkosti



Rozsah okolitého tlaku



Prepravná/skladovacia teplota



Prepravný/skladovací rozsah vlhkosti



Medela AG

Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com

International Sales

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
www.medela.com

Výhradní distributor pro ČR

DN FORMED Brno s.r.o.
Hudcova 76a, 612 48 Brno
Telefon: +420 532 198 888
E-mail: dnformed@dnformed.cz
www.dnformed.cz
www.medela.cz

Výhradný distribútor pre SR:

DN FORMED Brno s.r.o.
organizačná zložka
Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč
Telefón: +421 948 792 576
Fax: +420 532 198 889
E-mail: dnfomed@dnformed.cz
E-mail: medela@medela.sk
www.dnformed.cz
www.medela.sk

